

يمكنك
الفحص
عن بُعد



اتصل وابدأ المشاركة اليوم!

أصبحت مشاركة بيانات الجلوكوز مع طبيبك أكثر سهولة الآن

اكتشف أنماط واتجاه الجلوكوز

الاتصال مع العيادة الطبية يميزه بقدمها تطبيق فري ستايل ليبري لينك و يتيح لك مشاركة بيانات الجلوكوز الخاصة بك بسهولة مع طبيبك²



ليبري فيو


الاتصال مع العيادة الطبية

استخدم تطبيق فري ستايل ليبري لينك¹

يتم تحميل بيانات الجلوكوز لديك تلقائياً إلى ليبري فيو ، نظام قائم على السحابة الإلكترونية يمكن طبيبك من الوصول لتقارير الجلوكوز الخاصة بك

فري ستايل ليبري لينك

إن الصور والبيانات الواردة لأغراض توضيحية فقط. ولا تمثل مريضاً حقيقياً أو بيانات حقيقية.

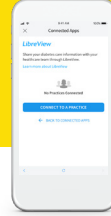


امسح رمز الاستجابة
السريعة لتحميل تطبيق
فري ستايل ليبري لينك¹




كيف يمكنك الاتصال مع عيادة طبيبك؟

في تطبيق فري ستايل ليبري لينك¹، اتبع الخطوات الواردة أدناه، وأدخل مُعرّف العيادة الطبية الخاصة بطبيبك في ليبري فيو.


4 أدخل مُعرّف
العيادة الطبية

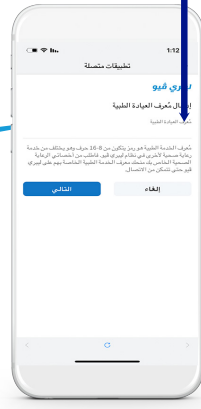


3 انقر فوق اتصال
بالعيادة الطبية

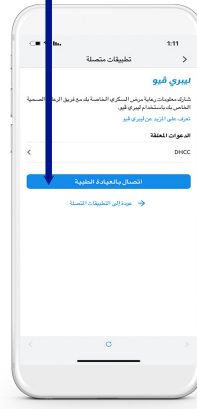

2 إدارة ليبري فيو

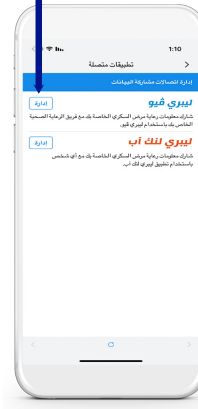

1 انقر فوق
تطبيقات متصلة

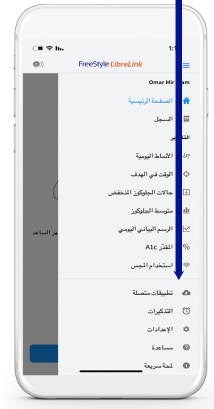

مُعرّف العيادة الطبية:



life. to the fullest.™

Abbott



فري ستايل
ليبري

إخلاء للمسؤولية:

1- تطبيق فري ستايل ليبري لينك يتوافق مع أجهزة هواتف وأنظمة تشغيل معينة. الرجاء زيارة الموقع لمعلومات إضافية حول الأجهزة المتوافقة قبل الشروع بالاستخدام.
2- إن موقع ليبري فيو يتوافق مع أنظمة تشغيل ومتصفحات إنترنت معينة فقط. لأي معلومات إضافية الرجاء زيارة الموقع: www.LibriView.com

© 2021 Abbott

فري ستايل، وليبري، والعلامات التجارية ذات الصلة هي علامات لشركة آبوت.

ADC-32192 v2.0 01/2021

MOHAP - ATGA1FEY - Exp 25/4/22