



Come migliorare l'adesione dei sensori FreeStyle Libre

Prepara la pelle per garantire una corretta adesione. **PRIMA** dell'APPLICAZIONE



LAVARE

Utilizza solo saponi non idratanti e privi di profumo per lavare l'area di applicazione del sensore e poi asciuga.



PULIRE

Utilizza una salvietta imbevuta di alcol (non un gel idroalcolico) per rimuovere i residui di sebo.



ASCIUGARE

Lascia asciugare completamente la pelle prima di applicare il sensore*.

Cosa evitare fra la pelle e il sensore



I prodotti per la pelle e per i capelli possono lasciare **residui oleosi** sulla cute.

Lava, pulisci e asciuga il punto in cui desideri applicare il sensore.



I **peli** possono ridurre la capacità di adesione del sensore.

Rasa i peli in eccesso prima dell'applicazione del sensore.

Suggerimenti per migliorare l'adesione del sensore



Ricordati

Segui attentamente i consigli per la preparazione della pelle e l'applicazione sensore.



Non toccare il sensore

Cerca di toccare il meno possibile il sensore quando lo indossi.



Abbigliamento

Indossa indumenti comodi e di tessuti leggeri. Quando ti vesti o ti spogli, fai con calma. In questo modo eviterai il rischio di distacco accidentale del sensore.



Proteggi il sensore

Se il sudore allenta il sensore, applica un adesivo cutaneo[†]. Considera di utilizzare un bendaggio per proteggere il sensore durante gli sport di contatto.



Asciugati bene


Dopo la doccia o una nuotata*, presta attenzione con l'asciugamano per evitare di rimuovere il sensore.



Evita gli urti

Attento a non urtare il sensore contro porte, portiere, cinture di sicurezza e spigoli.

Prodotti che possono migliorare l'adesione**

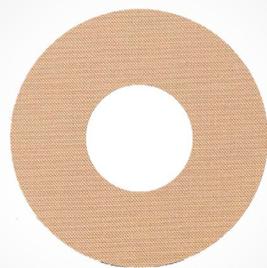

Prodotti di rinforzo

Cerotti, adesivi o bendaggi per uso medico[†]

Salviette per barriere di protezione

Favoriscono l'adesione di cerotti e pellicole adesive alla pelle

Barriere "adesive" per la pelle

Ipoallergeniche e prive di lattice

Adesivi liquidi

Non irritanti e non idrosolubili che fissano le medicazioni

Pellicole trasparenti

Possono fornire una protezione supplementare

* I sensori FreeStyle Libre 2 e FreeStyle Libre 3 sono resistenti all'acqua fino a 1 metro di profondità. Non immergerli per più di 30 minuti.

**La disponibilità dei prodotti può variare in base al paese e alla regione. Attenersi alle istruzioni per l'uso del fabbricante di ogni prodotto.

[†] Se si desidera coprire il sensore con un bendaggio, questo deve essere applicato al momento dell'applicazione del sensore. L'apertura/il foro al centro del sensore non deve essere coperto. È consentito applicare ulteriori bende/nastri adesivi per uso medico; una volta applicati, non è consentito rimuoverli fino a quando il sensore deve essere rimosso.

Per ulteriore assistenza con l'adesione del
sensore, puoi contattare il **Servizio Assistenza
Tecnica Abbott all' 800 088 244**

Il Servizio Clienti è disponibile da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 18.00

