


نبذة حول إعداد تطبيق فري ستايل ليبري لينك

يمكنك الفحص بدون وخز

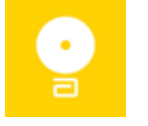

حمل تطبيق FreeStyle LibreLink من متجر التطبيقات مجاناً.



Android



IOS



1 قم بتجميع ووضع المجس على جسمك

استمر

الخطوة 3



أزغ الغطاء بالكامل عن علبة المجس لف الغطاء وارفعه عن مطبق المجس. **تنبيه:** ينبغي أن تتطابق رموز المجس على علبة المجس ومطبق المجس

الخطوة 2



نظف الموقع بمسحة كحولية. اسمح للموقع بأن يجف قبل الاستمرار.

الخطوة 1



اختر موقعاً على ظهر الذراع العلوي. **ملاحظة:** تفادي الندوب، الشامات، الخطوط البيضاء، النتوءات، ومواقع حقن الأنسولين، للوقاية من تهيج الجلد. قم بتغيير المواقع بين التطبيقات خذ بعين الاعتبار راحتك وأنشطتك

الخطوة 6



مطبق المجس جاهز لوضع المجس. **تنبيه:** يحتوي مطبق المجس الآن على إبرة، لا تلمس داخل مطبق المجس أو تضعه مجدداً في علبة المجس.

الخطوة 5



ارفع مطبق المجس خارج علبة المجس.

الخطوة 4



حاذا العلامة الداكنة على مطبق المجس مع العلامة الداكنة على علبة المجس. اضغط بإحكام على مطبق المجس على سطح صلب حتى يتوقف.

استمر في إعداد مجسك

الخطوة 9



تأكد من أن المجس ثابت. تخلص من مطبق المجس المستخدم وعلبة المجس طبقاً للقوانين المحلية.

الخطوة 8



اسحب برفق مطبق المجس بعيداً عن جسمك.

الخطوة 7



ضع مطبق المجس على الموقع واضغط للأسفل بإحكام لوضع المجس **تنبيه:** لا تضغط لأسفل على مطبق المجس حتى يصبح فوق الموقع المجهز، وذلك لتفادي نتائج أو إصابة غير مقصودة.

ضع المجس

2 تثبيت إعدادات التطبيق

الخطوة 3



راجع المعلومات الهامة بشأن قراءات مستوى الجلوكوز، ومتى ينبغي إجراء فحص الجلوكوز، وأين يجب تطبيق المجس. ثم انقر على "التالي" للمتابعة حتى ترى شاشة "مسح المجس جديد".

الخطوة 2



أدخل إعداداتك الشخصية. انقر على "التالي" بعد كل شاشة.

الخطوة 1




تأكد من اتصال هاتفك الذكي بشبكة إنترنت لا سلكية أو خيوية. انقر على **تسجيل الدخول أو البدء الآن**. راجع المعلومات القانونية واتبع التعليمات لإنشاء حساب ليبري فيو أو سجل دخولك إن كان لديك حساب مسبقاً.

3 استخدام التطبيق لمسح المجس

طريقة المسح

انقر على زر المسح (📷) يمكنك أن تنقر على المربع الأزرق في الشاشة الرئيسية أو على (📷) في أعلى الزاوية اليمنى. ضع رأس هاتف الآيفون قرب المجس حتى تسمع نغمة و/ أو اهتزازاً.

الخطوة 3

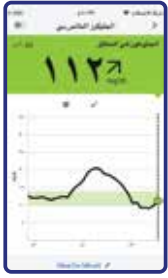

يمكنك الآن مسح المجس للحصول على قراءة مستوى الجلوكوز.

الخطوة 2



الخطوة 1



آيفون



أندرويد

امسح المجس لتشغيله. **ملاحظة:** إذا أردت أن تستخدم القارئ والتطبيق معاً لفحص مستوى الجلوكوز لديك، يجب أن تشغل المجس مع القارئ أولاً.

تقارير سجل الجلوكوز لديك



الأنماط اليومية

الوقت في الهدف

حالات انخفاض الجلوكوز

متوسط الجلوكوز

الرسم البياني اليومي

المقدر A1c

- انقر على ☰ في أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة للدخول إلى تقاريرك.
- انقر على 📌 لمشاركة لقطة من الشاشة.
- انقر على ⓘ لمشاهدة وصف للتقرير.



FreeStyle Libre
FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM



life. to the fullest.™

Abbott

أ. فحص المجس للحصول على قيم الجلوكوز لا يتطلب استخدام إبرة الوخز. تطبيق فري ستايل ليبري لينك يتوافق مع أجهزة هواتف وأنظمة تشغيل معينة. الرجاء زيارة الموقع لمعلومات إضافية حول الأجهزة المتوافقة قبل الشروع باستخدام. يتطلب استخدام FreeStyle LibreLink التسجيل في LibreView. التسجيل في التجميل التلقائي يتطلب اتصال إنترنت لاسلكي أو اتصال بيانات محمول. الصور للأغراض التوضيحية فقط وليست لمريض أو أخصائي رعاية صحية حقيقي. البيانات المُحاكاة للأغراض التوضيحية فقط. ولا تعود إلى مريض حقيقي أو تُعد بيانات حقيقية.

© 2021 Abbott

فري ستايل وليبري والعلامات التجارية ذات الصلة هي علامات لشركة أبات. ZHFN3917 – 10/05/2022 ADC- 39315 V1.0 5/21