



أندرويد



# يمكنك الفحص

في أي وقت وفي أي مكان




## هل تتلقى إشعار فقدان الإشارة؟

إن كان مفعلاً، يقوم إشعار فقدان الإشارة بتنبيهك عند فقدان الإتصال بين المجس وتطبيق الهاتف لمدة ٢٠ دقيقة لأن ذلك قد يتسبب بعدم مقدرتك على كشف إرتفاع أو إنخفاض مستويات الجلوكوز. ليستمر حصولك على التنبيهات عند إنخفاض أو إرتفاع مستويات الجلوكوز، قم بعمل الخطوات التالية.



قم بإبطال وضعية عدم الإزعاج في هاتفك أو قم بتفعيل تخطي وضعية عدم الإزعاج في الاعدادات.

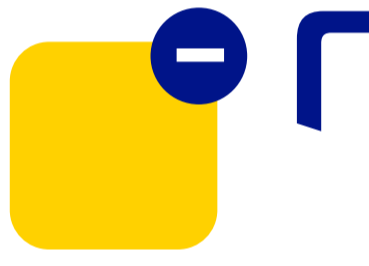

لا تقم بغلاق التطبيق، بل دعه يعمل في الخلفية.



تأكد من وجود هاتفك العامل بنظام أندرويد الخاص بك في نطاق ٦ متر منك طوال الوقت.



إن أستمرت التنبيهات الخاصة بفقدان الإشارة بالظهور، برجاء التواصل مع خدمة العملاء.

إن قمت بلمس مجس فري ستايل ليبري ٢ بواسطة هاتفك أولاً، ستحصل على التنبيهات على هاتفك فقط. إن قمت باللمس بواسطة قارئ فري ستايل ليبري ٢ أولاً، ستحصل على التنبيهات من خلال القارئ فقط.



أبقي البلوتوث في وضعية التشغيل.



يجب عليك قبول طلب التطبيق بإرسال تنبيهات هامة لغلاق وضعية عدم الإزعاج. يمكنك أيضاً تفعيل خاصية التنبيهات الهامة مباشرة من التطبيق عن طريق إعدادات الإخطار.

تنبيه. مسح. تصرف.

إكتشف المزيد من خلال زيارة [www.FreeStyleDiabetesME.com](http://www.FreeStyleDiabetesME.com)

أو قم بلمس رمز الإستجابة السريعة أدناه.



قم بلمس

## خدمة العملاء

نحن هنا للإجابة عن أي سؤال أو استفسار على نظام فري ستايل ليبري ٢.

يمكنك التحدث مع مندوبينا من السبت إلى الخميس من الساعة ٨ صباحاً حتى الساعة ٩ مساءً.

920003788