

المجسات تلتصق بشكل أفضل عندما تقوم بغسل وتنظيف وتجفيف جلدك قبل التطبيق

٢. التنظيف

استعمل مسحة كحول طبية
لإزالة البواقي الزيتية من على الجلد



١. الغسل

استعمل صابون غير
مرطب وخالي من العطور
لغسل المنطقة المراد
وضع المجس عليها




٣. التجفيف

دع بشرتك تجف بشكل كامل قبل
وضع المجس. تذكر هذه الخطوة جيداً
خصوصاً إن أردت وضع المجس بعد
الاستحمام أو ممارسة السباحة



قبل وضع المجس:

- تأكد من لصق المجس في المكان الصحيح (الجزء الخلفي من ذراعك العلوي)
- لا تضع الكريمات أو مرطبات الجسم على المنطقة المراد لصق المجس عليها لأنها قد تترك بقايا زيتية
- قم بخلق الشعر الزائد في الجهة الخلفية من أعلى الذراع لأن الشعر يمكن أن يؤثر على جودة التصاق المجس بالجلد

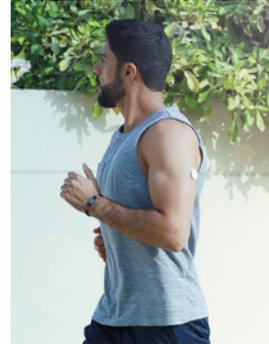

نصائح هامّة للصق المجس

لماذا تستخدم الوخز عندما يمكنك الفحص؟^١



استعمل هذه المنتجات للصق المجس بشكل أفضل!

TEGADERM I.V. 3m.com

غشاء شفاف يساعد على
لصق المجس



MASTISOL LIQUID ADHESIVE eloquesthehealthcare.com

سائل شفاف غير مهيّج
لللبشرة يؤمن الضمادات



TORBOT SKIN TAC torbot.com

مناديل مخصّصة للجلد
غير مسبّبة للحساسية
وخالية من اللاتيكس




SKIN-PREP PROTECTIVE WIPES smith-nephew.com

تساعد الشريط والغشاء
على الالتصاق مع الجلد



OVER-BANDAGE

ضمادة أو شريط لاصق طبي يتم وضعه عند تطبيق المجس. يجب الانتباه الى عدم إزالة الضمادة أو الشريط اللاصق إلا عند إزالة المجس تفادياً لارتخاء المجس. تأكّد من إبقاء الفتحة في منتصف المجس مفتوحة للتهوية.

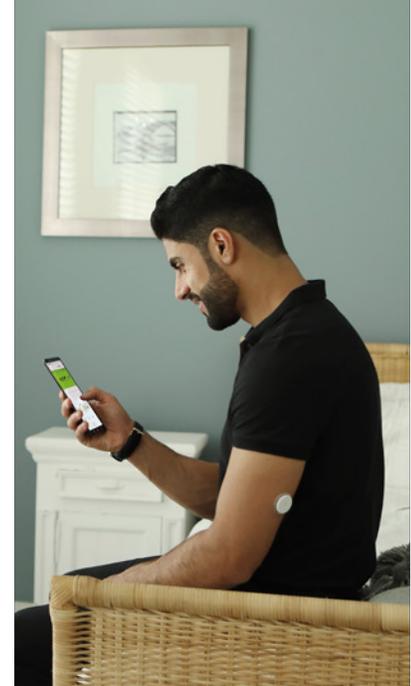



نصائح للحفاظ على المجس في مكانه

الرياضات الاحتكاكية والتمارين الرياضية الكثيفة

تأكد من اختيار موقع في الجهة الخلفية من أعلى ذراعك يقلل من نسبة إزاحة الجهاز من مكانه، و/أو حاول استخدام أي من المنتجات التي تم ذكرها في الصفحة السابقة



تمهل

كن حذرًا عند ارتداء أو خلع الملابس كي لا تعلق مع المجس



أبقِ اليد بعيدة

حاول أن لا تقوم بلمس أو شد أو اللعب بالمجس



كن حذرًا

انتبه كي لا يرتطم المجس بباب المدخل، باب السيارة، حزام الأمان، أو حواف الأثاث



جفف بحرص

انتبه كي لا تقوم بإزالة المجس عند خلع المنشفة بعد الاستحمام أو السباحة



ارتدِ الملابس اللائقة

اترك مساحة كافية للمجس عن طريق ارتداء ملابس واسعة مصنوعة من مواد خفيفة



life. to the fullest.

Abbott

لا يتميز المجس بقرنته على الضوء داخل الماء على عمق أكثر من (3 أقدام) لمدة 30 دقيقة كحد أقصى. تطبيق فري ستايل ليبري لا يتوافق مع أجهزة هواتف وأنظمة تشغيل معينة. الرجاء زيارة الموقع لمعرفة معلومات إضافية حول الأجهزة المتوافقة قبل الشروع بالاستخدام. يتطلب استخدام LibreLink، FreeStyle LibreView، LibreView التسجيل في LibreView. التحميل التلقائي يتطلب اتصال إنترنت الاسلكي أو اتصال بيانات محمول. إن الصور والبيانات الواردة ببيانات ضرورية لأغراض توضيحية فقط. ولا تمثل مريضاً حقيقياً أو بيانات حقيقية.

© Abbott 2022. فري ستايل، وليبري، و التسميات التجارية ذات الصلة هي علامات لشركة Abbott. Abbott Diabetes Care Ltd., Range Road, Wincobury, Oxon, OX29 0YL, United Kingdom. ADC-50411 v1.0 MDAD01220018