




UZAKTAN DİYABET YÖNETİMİ MÜMKÜN!

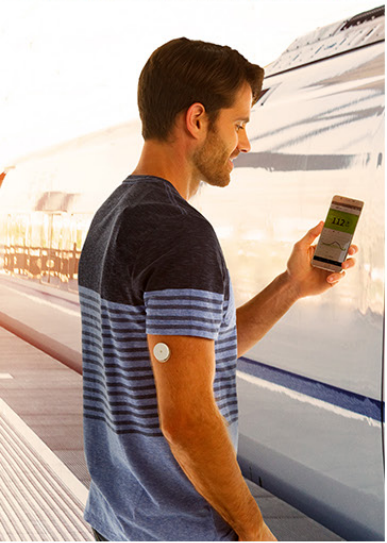

Diyabetliler, sağlık uzmanları ile glikoz verilerini uzaktan paylaşabilir, yüz yüze olmadan dahi diyabet yönetimine kesintisiz devam edebilirler.




FreeStyle Libre 


 **Abbott**

Veriler sadece gösterim amaçlı olup gerçek kullanıcı verisi içermemektedir.
© 2020 Abbott. FreeStyle, Libre ve ilgili markalar Abbott'un markalarıdır.
www.abbott.com.tr

Diyabetliler FreeStyle Libre sensörlerini FreeStyle LibreLink mobil uygulamasıyla okutarak kolayca glikozlarını takip edebilirler. Mobil uygulama ile alınan her glikoz ölçümü otomatik olarak LibreView sistemine aktarılır.²

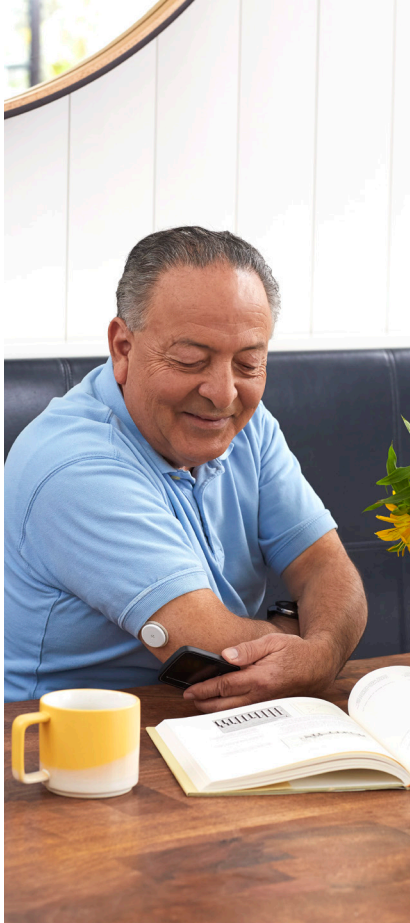


FreeStyle
LibreLink

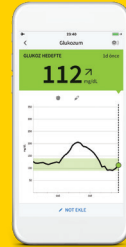

Diyabetliler için kolay ve kullanışlı


Dilerseniz mobil uygulama ile dilerseniz okuyucu ile, dilerseniz her ikisi ile birlikte ölçümünüzü yapabilirsiniz. Her ikisi ile ölçüm yapılacağı zaman mutlaka sensörü öncelikli olarak okuyucu sonra mobil uygulama ile başlatmak gerektiği unutulmamalıdır.¹

LibreView

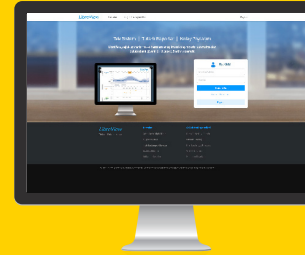

Sağlık uzmanları için kolay ve kullanışlı

FreeStyle LibreLink ile alınan glikoz ölçümleri direkt LibreView sistemine aktarılır. Böylece sağlık uzmanları tek bir sistem üzerinden takip ettikleri tüm diyabetliler için uğraşmadan detaylı raporlara ve glikoz verisine erişim sağlar.^{2,3}

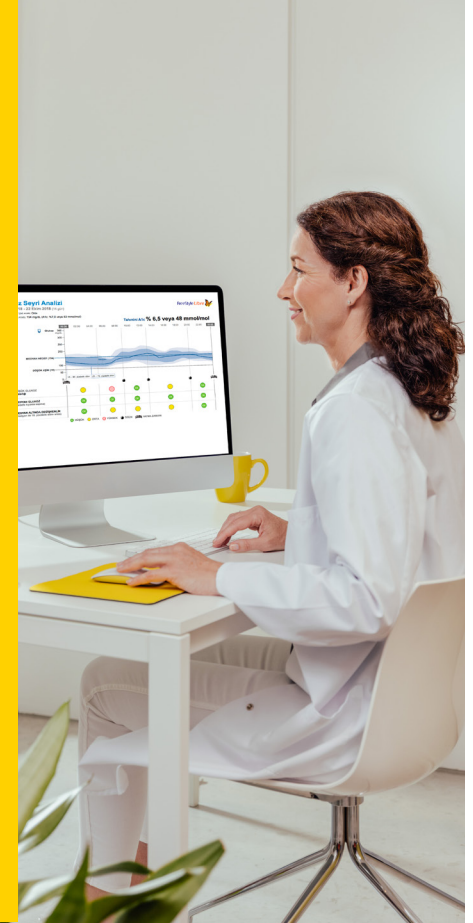

1. FreeStyle LibreLink mobil uygulaması ile FreeStyle Libre okuyucusu benzerdir ancak birbirini aynı ürünler değildir. Glikoz düzeylerinin hızla değiştiği durumlarda, interstisyel (hücreler arası) sıvı glikoz düzeyleri kan glikoz düzeylerini doğru olarak yansıtmadığında veya sistem hipoglisemi ya da yaklaşan hipoglisemi uyarısı verdiğinde veya belirtiler sistem okumalarıyla uyumlanmadığında kan şekeri ölçüm cihazı ile parmaktan ölçüm yapılması gerekir. 2. FreeStyle LibreLink mobil uygulaması NFC destekli Android OS 5.0 ve yukarıları ve iPhone 7 OS11 ve yukarıları telefonlarla uyumludur. 3. LibreView, Safari tarayıcısında Mac OS X Mountain Lion ve yukarıları veya iOS ve yukarıları cihazlarda kullanılabilir. Şu an sadece Windows tabanlı bilgisayarlara glikoz verisi yüklenir. Minimum sistem gereksinimleri için "<http://www.libreview.com>" www.libreview.com adresine göz atabilirsiniz.

Etkin diyabet yönetimi için detaylı ve kolay anlaşılır glikoz raporları¹



Kolay veri yükleme

FreeStyle LibreLink ile yapılan glikoz ölçümleri otomatik olarak LibreView sisteminde görüntülenir. Ayrıca okuyucudan gelen verilerinizi de bağlantı kablonuzla kolayca LibreView'a aktarabilirsiniz.



Uzaktan erişim

İnternet erişimi olan herhangi bir cihazdan kolayca sisteme giriş yapılabilir. Detaylı glikoz verilerinize hem siz hem de sağlık uzmanınız kolayca ulaşabilir.



Güvenli ve güvenilir

Glikoz verilerine çevrimiçi olarak güvenli, bulut tabanlı bir sistem üzerinden ücretsiz olarak erişilebilir.



LibreView sisteminin sunduğu tüm raporları inceleyebilmek için www.libreview.com'a göz atabilirsiniz.

Veriler sadece gösterim amaçlı olup gerçek kullanıcı verisi içermemektedir.

1. LibreView ve LibreLinkUp, birincil glikoz monitör etme aracı olarak tasarlanmamıştır. Kullanıcıların yazılımdan gelen bilgilerle herhangi bir medikal yorum yapmadan ya da tedaviye başlamadan önce mutlaka birincil ölçüm cihazlarını da kontrol etmeleri ve bir sağlık uzmanına danışmaları gerekir. Sağlık uzmanları yazılımdaki bilgilerle, sahip oldukları diğer verileri birleştirerek tedavi kararı vermemelidir.

Diyabetliler, glikoz verilerini uzaktan sağlık uzmanlarıyla kolayca paylaşmak için FreeStyle LibreLink uygulamasını kullanabilirler.¹



FreeStyle LibreLink ile SAĞLIK UZMANINIZA BAĞLANIN¹

FreeStyle Librelink mobil uygulama üzerindeki Bağlantılı Uygulamalar butonundan LibreView bölümüne gidilerek “Sağlık Uzmanı Grubuna Bağlan” özelliği ile; diyabetlilerin kolayca glikoz verilerini uzaktan sağlık uzmanlarıyla paylaşabilmeleri sağlanır.



FreeStyle
LibreLink



Diyabetlilerin glikoz verilerini görüntülemek için güvenilir çevrimiçi sistem

Otomatik aktarılan glikoz verileri ile sağlık uzmanları uzaktan da hasta takibi yapabilir ve etkili tedaviye kesintisiz devam edebilir.³

LibreView



Kolayca bağlanın

Mobil uygulamanız üzerinden; sağlık uzmanınızdan gelen daveti kabul edebilir ya da sağlık uzmanı grup kimliğini sağlık uzmanınızdan alarak siz bağlanabilirsiniz.

Kolay ve kullanışlı

Bağlandıktan sonra diyabetlilerin glikoz verileri otomatik olarak FreeStyle LibreLink uygulamasından LibreView'a yüklenir. Sağlık uzmanının ya da yardımcılarının veri yükleme, indirme gibi süreçlerle uğraşmasına gerek yoktur.

Uzaktan diyabet yönetimi

Daha bilinçli tedavi kararları ve uzaktan dahi etkin diyabet yönetimi için glikoz raporlarına kolay erişim sağlanır.


Veriler sadece gösterim amaçlı olup gerçek kullanıcı verisi içermemektedir.



1. FreeStyle LibreLink mobil uygulaması NFC destekli Android OS 5.0 ve yukarısı ve iPhone 7 OS11 ve yukarısı telefonlarla uyumludur. Telefonunun NFC uyumluluğunu telefon ayarlarından kontrol edebilir ya da telefon üreticinden bilgi alabilirsiniz. FreeStyle LibreLink kullanımı için LibreView'a kaydolman gerekir ve otomatik glikoz verisi aktarımı için kablosuz internet bağlantısı veya mobil veri bağlantısına ihtiyaç vardır. 2. Sensör okutarak şeker ölçümü parmak delmeyi gerektirmez, mobil uygulamalar ve sistemler arası data aktarımı mobil cihazın internet erişimi ve bağlantı hızıyla doğrudan alakalıdır.

Sağlık uzmanları; tedavi sürecinde takip ettikleri tüm diyabetlileri glikoz verilerini paylaşmaya kolayca davet edebilirler.

Seçenek 1:

Sağlık uzmanları LibreView aracılığıyla hastalarını evden veri yüklemeye davet edebilirler.¹

1. Kayıtlı bir hasta arayın veya navigasyon çubuğunun üst kısmındaki "Hasta Ekle"  simgesini tıklayın.
2. Diyabetli kişinin profilinde "Davet Et"i seçin ve diyabetli kişi için doğru e-posta adresini kullandığınızdan emin olun.
3. Davet giden diyabetli kişi, FreeStyle LibreLink uygulamasında ve e-postasında davetiyeyi görür.

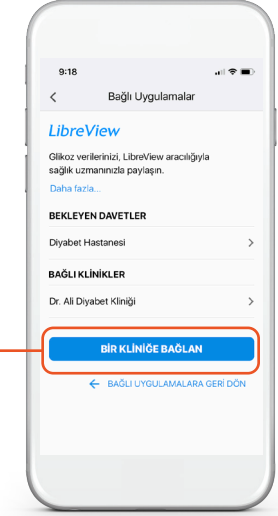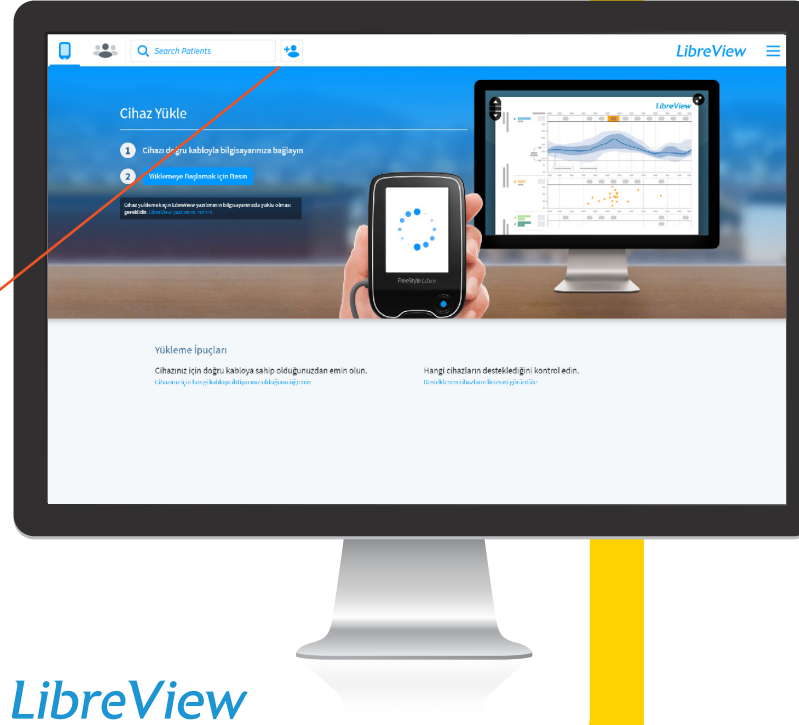

Diyabetliler, e-postalarına gelen davetiyeyi ya da FreeStyle LibreLink mobil uygulamalarına gelen davetiyeyi kabul ederek sağlık uzmanlarına bağlanabilirler.

FreeStyle
LibreLink 


**Destek için www.libreview.com'daki
Müşteri Desteği bölümünü ziyaret edebilirsiniz.**

Diyabetliler sađlık uzmanlarından alacakları "Sađlık Uzmanı Grubu Kimliđi"ni mobil uygulamalarına girerek uzaktan eriřim ve veri paylařımını bařlatabilirler.


Seenek 2:

Diyabetliler mobil uygulamalarından sađlık uzmanı grubuna bađlanırlar.

Sađlık uzmanının vereceđi "Sađlık Uzmanı Grubu Kimliđi" ile giriř yapan FreeStyle LibreLink kullanıcısı kolayca sađlık profesyoneli ile bađlantı gerekleřtirebilir. Sađlık profesyoneli grup kimliđine LibreView sađ menüden kolayca eriřir ve diyabetli hastasına iletir.

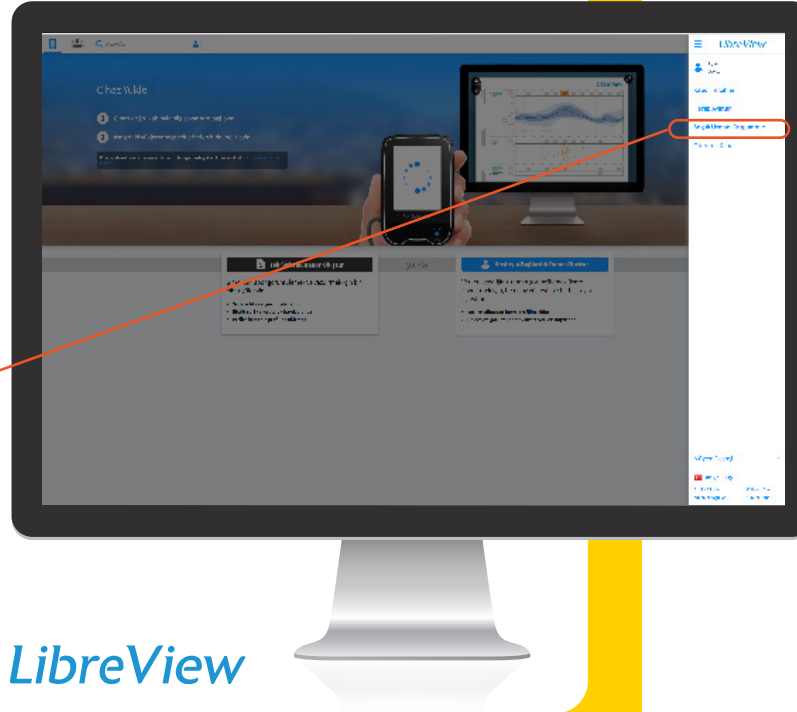

LibreView

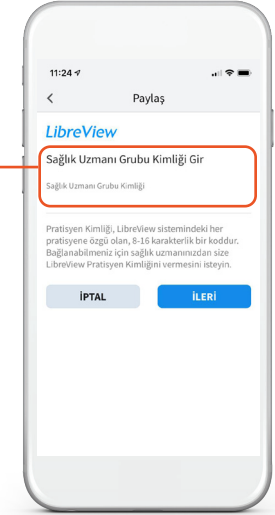

FreeStyle LibreLink mobil uygulamasının "Bađlantılı Uygulamalar" blmnden LibreView alanına giriř yapılır ve buraya "Sađlık Uzmanı Grubu Kimliđi" girilir. Ardından "İleri" butonuna basarak bađlantı gerekleřtirilmiř olur.

Destek iin www.libreview.com'daki Mřteri Desteđi blmn ziyaret edebilirsiniz.



UZAKTAN DİYABET YÖNETİMİ MÜMKÜN!

Yeni nesil FreeStyle Libre Dijital Diyabet Yönetimi ürünleri ile glikoz verileri sağlık uzmanlarıyla uzaktan paylaşılabilir ve etkin tedavi sürecine kesintisiz devam edilebilir.



- Her ölçüm sonucu otomatik olarak sağlık uzmanının da erişebileceği LibreView sistemine ücretsiz ve kolayca akar.¹
- FreeStyle Libre okuyucu kullanmaya devam eden kullanıcılar okuyucularındaki verileri bağlantı kablolarıyla kolayca LibreView sistemi üzerinden sağlık uzmanlarıyla paylaşabilir.^{2,3}
- LibreView sisteminin sağladığı detaylı raporlar ve kullanımı kolay arayüz ile hem diyabetliler hem de sağlık uzmanları için diyabet yönetimi kolaylaşır ve etkinliği artar. Raporlarda tedavideki ana noktalar kolayca tespit edilip buna uygun tedavi basamakları takip edilebilir.

FreeStyle Libre 

Sağlık uzmanlarıyla glikoz ölçüm sonuçları evden de paylaşarak etkin diyabet yönetimine kesintisiz devam edilir.



1. LibreView ve LibreLinkUp, birincil glikoz monitör etme aracı olarak tasarlanmamıştır. Kullanıcıların yazılımdan gelen bilgilerle herhangi bir medikal yorum yapmadan ya da tedaviye başlamadan önce mutlaka birincil ölçüm cihazlarını da kontrol etmeleri ve bir sağlık uzmanına danışmaları gerekir. Sağlık uzmanları yazılımdaki bilgilerle, sahip oldukları diğer verileri birleştirerek tedavi kararı vermektedir. 2. FreeStyle LibreLink mobil uygulaması ile FreeStyle Libre okuyucusu benzerdir ancak birbirini aynı ürünler değildir. Glikoz düzeylerinin hızla değiştiği durumlarda, interstisyel (hücreler arası) sıvı glikoz düzeyleri kan glikoz düzeylerini doğru olarak yansıtmadığında veya sistem hipoglisemi ya da yaklaşan hipoglisemi uyarısı verdiğinde veya belirtiler sistem okumalarıyla uyummadığında kan şekeri ölçüm cihazı ile parmaktan ölçüm yapılması gerekir. 3. FreeStyle LibreLink mobil uygulaması NFC destekli Android OS 5.0 ve yukarısı ve iPhone 7 OS11 ve yukarısı telefonlarla uyumludur. 4. LibreView, Safari tarayıcısında Mac OS X Mountain Lion ve yukarısı veya iOS ve yukarısı cihazlarda kullanılabilir. Şu an sadece Windows tabanlı bilgisayarlara glikoz verisi yüklenebilir. Minimum sistem gereksinimleri için "<http://www.libreview.com>" www.libreview.com adresine göz atabilirsiniz. 5. FreeStyle Libre sistemi 4 yaş ve üzeri diyabetlilerde hücreler arası sıvı glikoz düzeylerini ölçmek için endikedir. 4-17 yaş arasındaki çocukların ürün kullanımı en az 18 yaşında olan bir yakınının gözetimi altında olmasıyla sınırlandırılmıştır. En az 18 yaşında olan bu kişi çocuğun FreeStyle Libre sistemini kullanmakla, ölçümlerini okumakla ve ona yardımcı olmakla sorumludur.
© 2020 Abbott. FreeStyle, Libre ve ilgili markalar Abbott'un markalarıdır. ADC-31778 v.1.0 12/20
www.abbott.com.tr