



FreeStyle
Libre 3
SYSTÈME DE MESURE EN CONTINU DU GLUCOSE

Installation de l'application FreeStyle Libre 3

Pour les utilisateurs de FreeStyle Libre 2




ÉTAPE - 1 Vérification préalable

1. Vérifiez l'adresse e-mail utilisée sur votre application FreeStyle LibreLink actuelle.
 - a. Accédez à : Paramètres > Détails du compte
2. Vérifiez votre connexion LibreView au cabinet de votre convention
 - a. Accédez à : Paramètres > Applications connectées > LibreView
 - b. Vous voyez le nom de votre convention ? > Tout est en ordre
 - c. Si ce n'est pas le cas > Veuillez contacter votre convention

ÉTAPE - 2 Désinstallation

Attention : veillez à appliquer cette procédure lorsque votre capteur FreeStyle Libre 2 actuel est en fin de vie. L'application FreeStyle Libre 3 prend uniquement en charge le capteur FreeStyle Libre 3.

1. Désinstallez votre application FreeStyle LibreLink actuelle
 - a. Désinstaller signifie que vous devez effacer complètement l'application de votre téléphone. Pas seulement effacer l'icône (ou le raccourci).

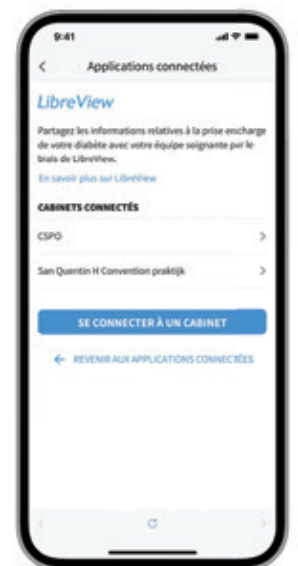

ÉTAPE - 3 Installation

1. Accédez à l'Apple Store / Google Play Store sur votre smartphone
2. Recherchez : FreeStyle Libre 3
3. Installez l'application FreeStyle Libre 3 - BE
4. L'application fonctionnant avec votre application FreeStyle Libre 3 se présente comme ceci :



ÉTAPE - 4 Connexion

1. Ouvrez l'application FreeStyle Libre 3 - BE
2. Lors de la première utilisation:
 - a. Autorisez les notifications (Android)
 - b. Autorisez l'utilisation de Bluetooth (iOS)
3. **NE CRÉEZ PAS UN NOUVEAU COMPTE**
4. Cliquez sur **Se connecter**
5. Utilisez la même adresse e-mail que celle utilisée dans l'ancienne application
6. Saisissez le mot de passe associé à cette adresse e-mail
 - a. Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur « Mot de passe oublié » et suivez les étapes.



ÉTAPE - 5 Étapes d'intégration de l'application

1. Attention :
 - a. Veillez à accepter l'ensemble de l'accord.
 - b. Veillez à accepter tous les messages de notification.

Vous êtes prêt à commencer à utiliser un capteur FreeStyle Libre 3 !
Profitez de votre nouveau système FreeStyle Libre.

Point d'attention :

1. Vérifiez votre connexion LibreView au cabinet de votre convention
Accédez à : Paramètres > Applications connectées > LibreView
2. Vous voyez le nom de votre convention ? > Tout est en ordre
Si ce n'est pas le cas > Veuillez contacter votre convention



IMPORTANT! Ces fonctionnalités de votre téléphone peuvent IMPACTER LES ALARMES :

Android



- Cette application doit fonctionner en arrière-plan. Si vous redémarrez votre téléphone, ouvrez votre application pour vérifier si elle fonctionne correctement.
- N'utilisez pas la minuterie de l'application Bien-être numérique. Si vous utilisez le Mode Concentration, ne limitez pas cette application (Android uniquement).
- Ne mettez pas cette application sur pause.
- N'utilisez pas les modes d'économie d'énergie qui limitent l'activité de l'application en arrière-plan.
- Ne désactivez pas l'autorisation Dispositifs à proximité pour l'application.

iOS - iPhone



- Si vous utilisez la fonctionnalité Temps d'écran, ajoutez Libre 3 à la liste des applications Toujours autorisées.
- Si vous utilisez Résumé programmé :
 - N'ajoutez PAS FreeStyle Libre 3 à la liste « Applications dans le résumé ».
 - Réglez la livraison des notifications de FreeStyle Libre 3 sur « Livraison immédiate » dans les paramètres de votre système d'exploitation.
 - Si vous utilisez Concentration, ajoutez FreeStyle Libre 3 à la liste des applications dans Notifications autorisées.
- Votre application doit fonctionner en arrière-plan. Si vous redémarrez votre téléphone, ouvrez votre application pour vérifier si elle fonctionne correctement.

Mises à jour du système d'exploitation (OS¹) :

- Il est recommandé de désactiver les mises à jour automatiques d'OS.
- Après une mise à jour d'OS, ouvrez votre application pour vérifier si elle fonctionne correctement.



**Système FreeStyle Libre 3, mesure
du glucose en continu.**

Abbott
life. to the fullest.®

1. Operating System, signifie système d'exploitation