



CONFIGURACIÓN DE ALARMAS DE FreeStyle LibreLink

DESCARGA LA APP **FreeStyle LibreLink:**







Si quieres recibir las alarmas opcionales, deberás utilizar únicamente la app FreeStyle LibreLink para escanear el sensor.

CÓMO CONFIGURAR LAS ALARMAS OPCIONALES


Las alarmas^{1,2} están desactivadas por defecto.

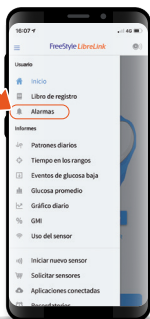

01. En el menú de la app FreeStyle LibreLink, ir a **<<Alarmas>>**

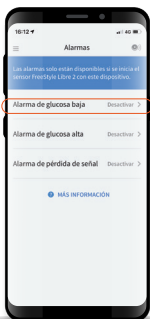


02. Seleccionar la alarma **<<Alarma de glucosa baja>>**

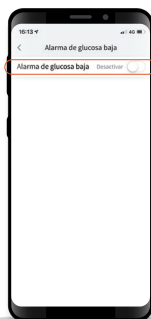


03. Pulsar el botón o desplácelo hacia la derecha para activar la alarma



04. La alarma **«pérdida de señal»** se activa automáticamente en cuanto una alarma se activa por primera vez. Puede activarse o desactivarse en cualquier momento

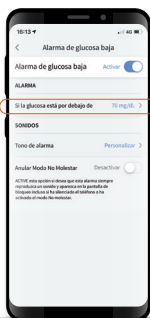

05. Seleccionar el valor límite de alarma individual desplazando hacia abajo o hacia arriba y pulsando **«Guardar»**

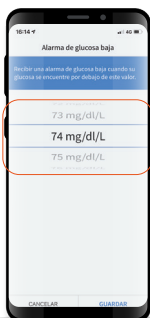

06. Para elegir el sonido, en **«Tono de alarma»** se podrá escoger entre **«Personalizar»** o **«Estándar»**



07. Configurar la alarma **«Alarma de glucosa alta»** siguiendo los mismos pasos



Aparecen cuando el sensor no se ha comunicado con la aplicación durante 5 minutos.
Acción: Revisar los ajustes o la conectividad.

PASOS NECESARIOS PARA RECIBIR ALARMAS

Asegúrate de tener la configuración correcta y permisos activados en tu teléfono móvil para recibir alarmas.



ANDROID*



IOS*



Activar el Bluetooth y NFC (en Android)

Asegúrate de no desactivar ninguna función ni modificar la configuración del teléfono de forma que pueda interrumpirse el envío de notificaciones



Activar los permisos de ubicación

Android 6.0 y posteriores requieren que las aplicaciones tengan activados los permisos de ubicación para poder conectarse con dispositivos Bluetooth. Si deseas recibir alarmas, los permisos de ubicación deben estar activados



Activar las notificaciones de la aplicación

VER "Cómo configurar las notificaciones"

Activa las notificaciones de la pantalla de bloqueo, las notificaciones tipo banner/tiras, los sonidos de notificación y la vibración o los sonidos generales del teléfono



Distancia entre teléfono móvil y sensor <6m

(sin obstrucciones)

El sensor y el teléfono móvil deben estar a menos de 6 metros de distancia para no poder la conexión



Activar las alarmas en la configuración de la app

VER "Cómo configurar las alarmas opcionales"

Revisa esta sección para conocer cómo configurar las alarmas opcionales



Activar el sensor con la aplicación FreeStyle LibreLink

Debes activar el nuevo sensor con la aplicación FreeStyle LibreLink para poder comprobar tu glucosa y recibir las alarmas opcionales



Configurar en el teléfono móvil




Configurar en la app FreeStyle LibreLink

CÓMO CONFIGURAR LAS NOTIFICACIONES



ANDROID

1. Seleccionar, en los «**Ajustes**» del teléfono móvil, en «**Apps**», la app FreeStyle LibreLink³
2. Continuar en «**Notificaciones de la App**»
3. Activar las notificaciones para no perderse ninguna alarma¹

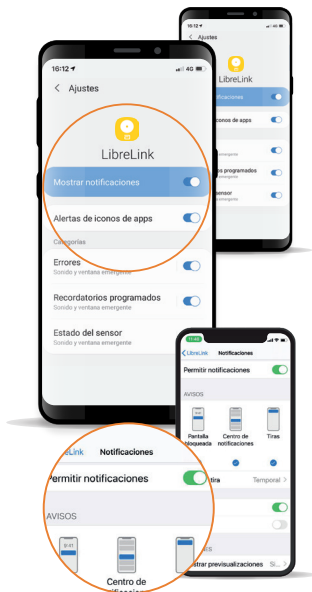

IOS

1. Dentro de «**Ajustes**» del teléfono, ir a «**Notificaciones**», y buscar la app FreeStyle LibreLink³ y seleccionar
2. Activar la función «**Permitir notificaciones**»
3. Activar **TODAS** las opciones de notificación (pantalla de bloqueo, notificaciones...)

Nota: si utiliza la función «Resumen programado» desactive la aplicación de la lista «Resumen de aplicaciones» y configure las notificaciones «entrega inmediata»



SOLO EN ANDROID

¿CÓMO ACTIVAR LOS PERMISOS Y NOTIFICACIONES EN ANDROID?

Ir a «**Ajustes**» del teléfono > activar en «**herramientas**» o desde «**permisos de las aplicaciones**».

! **ATAJO:** En función del terminal utilizar el buscador del teléfono: «**Aplicaciones**», «**Lista de aplicaciones**» o «**Permisos**».

¿CÓMO DESACTIVAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA BATERÍA?


Dependiendo del modelo de teléfono utilizado se podrá hacer desde la aplicación FreeStyle LibreLink o dentro de «**Ajustes**» del teléfono, en «**Aplicaciones**», «**Lista de aplicaciones**» o «**Batería**».



EXCLUSIVO PARA ANDROID

- **Desactiva la optimización de la batería** para la aplicación, para que ésta pueda ejecutarse en segundo plano y así asegurarte de que recibirás las alarmas incluso si el teléfono móvil tiene la batería baja
-
- Es posible que tengas que **añadir la aplicación FreeStyle LibreLink** a la lista de **aplicaciones que no se pondrán en suspensión**

AJUSTES DE LAS ALARMAS

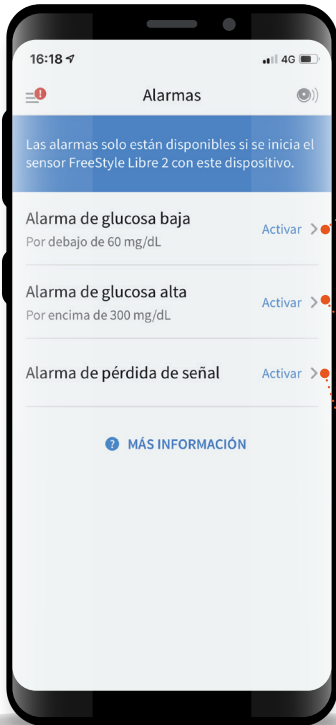

Alarma de glucosa baja

(posibilidad de ajuste **60-100 mg/dL**)

Alarma de glucosa alta


(posibilidad de ajuste **120-400 mg/dL**)

Alarma de pérdida de señal

Aparece cuando el sensor FreeStyle Libre 2 lleva más de 20 min sin poder conectarse a la app FreeStyle LibreLink

RECOMENDACIONES

- Recuerda que la configuración de las alarmas tendrán la configuración del **sonido y de la vibración** predefinidas en tu teléfono móvil, por lo que dichos ajustes **deberán estar a un nivel que puedas oír** para evitar que haya alarmas que pasen desapercibidas
- **Deberás desconectar los auriculares cuando no los estés utilizando**, ya que es posible que no recibas audio con alarmas
- Si estás **utilizando dispositivos externos** conectados a tu teléfono móvil, como auriculares inalámbricos o un smartwatch, **es posible que recibas las alarmas solamente en uno de los dispositivos** (teléfono móvil o dispositivo externo), no en todos
- **Desactiva el modo “No Molestar”** en tu teléfono móvil **o activa “Anular modo no molestar”** en la configuración de las alarmas de la aplicación. Activa esta última opción si deseas que las alarmas reproduzcan siempre un sonido y aparezca en la pantalla de bloqueo, incluso cuando el teléfono móvil está en silencio o está activado “No Molestar” (imagen). La función de “Anular no molestar” depende del modelo de teléfono móvil y de la versión del sistema operativo que estés utilizando

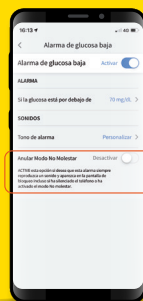

1. Las alarmas están desactivadas por defecto y deben activarse, consulte con su profesional sanitario si es conveniente o aconsejable activar la alarma opcional de FreeStyle Libre 2 en su caso concreto. 2. La app FreeStyle LibreLink únicamente podrá emitir una alarma en el caso de haberse iniciado antes el sensor con la app. 3. La aplicación FreeStyle LibreLink solo es compatible con ciertos dispositivos móviles y sistemas operativos. Por favor, consulte el sitio web (www.FreeStyleLibre.es/libre/productos/librelink.html) para obtener más información sobre la compatibilidad del dispositivo antes de usar la aplicación.

FreeStyle, Libre, y las marcas relacionadas son marcas de Abbott. Para mayor información lea atentamente el manual de usuario. El Sistema Flash de Monitorización de Glucosa FreeStyle Libre debe retirarse antes de someterse a un estudio de imágenes por resonancia magnética (RM). Consulte a su profesional sanitario si tiene alguna duda o pregunta acerca del control de su diabetes.