


FreeStyle
LibreLink
SPECIAL EDITION APP



FREESTYLE LIBRELINK SPECIAL EDITION -SOVELLUKSEN KÄYTÖN ALOITTAMINEN

 **Abbott**
life. to the fullest.®


Tuotekuvia käytetään vain havainnollistamarkoituksessa, ei todellisia potilaita.
©2022 Abbott. FreeStyle, Libre ja niihin liittyvät tavaramerkit ovat Abbottin tavaramerkkejä.
Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. ADC-50918 v1.0 01/22

FreeStyle LibreLink Special Edition -sovellus on yhteensopiva **A5X** laitteen kanssa



Mikä on **A5X** -laite?

A5X on Abbottin jakelema ja NUU Mobilen valmistama laite, joka on yhteensopiva FreeStyle LibreLink Special Edition -sovelluksen kanssa.

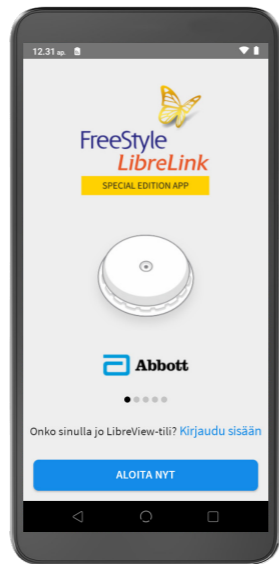

Kenelle **A5X** on tarkoitettu?

FreeStyle LibreLink Special Edition -sovellus on tarkoitettu FreeStyle Libre- / FreeStyle Libre 2 -käyttäjille, joilla ei ole lukulaitetta tai FreeStyle LibreLink -sovelluksen kanssa yhteensopivaa älypuhelinlaite.




A5X-laittepaketti sisältää kaiken tarvittavan käytön aloittamista varten



A5X-laite



Aloituspapas

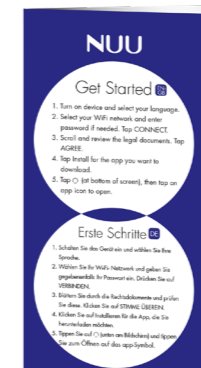

Aloituspapas -ohjekortti (WiFi-yhteyden muodostaminen sovelluksen lataamista varten)



Latausjohto ja virtapistoke




Vaihe 1: **A5X**-laitteen määrittäminen ja FreeStyle LibreLink Special Edition -sovelluksen lataaminen

VINKKEJÄ


1. A5X-laitteen akku on valmiiksi ladattu ja käyttövalmis
2. Siirry tilaan, jossa on WiFi-yhteys
3. Varmista, että käytössäsi on sähköpostiosoite tilin luontia varten (valinnainen)




1. Käynnistä laite painamalla virtapainiketta, kunnes näyttöön syttyy valo.

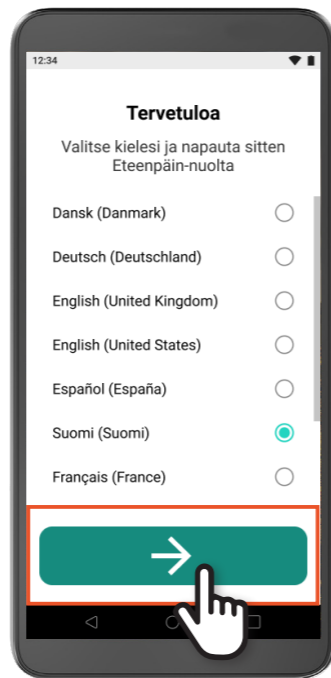

2. SELAA, valitse ja **NAPAUTA** kieltä. **NAPAUTA** sitten eteenpäin osoittavaa nuolta.

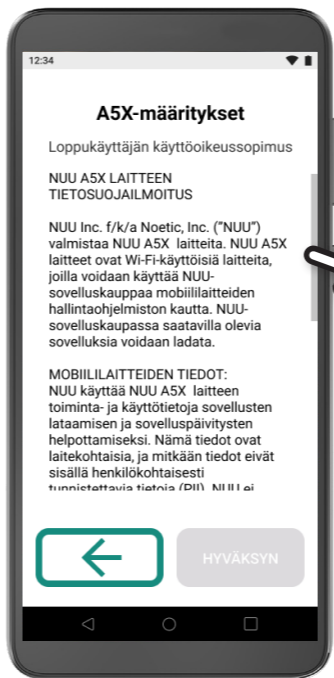


3. PYYHKÄISE ylös lukeaksesi oikeudelliset asiakirjat.

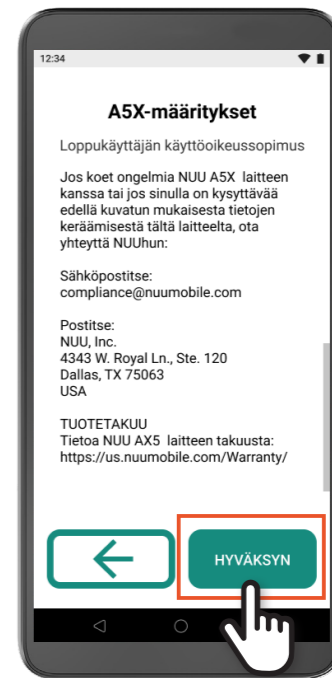


4. Hyväksy oikeudelliset asiakirjat **NAPAUTTAMALLA** HYVÄKSYN.

Vaihe 1: **A5X**-laitteen määrittäminen ja FreeStyle LibreLink Special Edition -sovelluksen lataaminen (jatkuu)


Vaihe 1: **A5X**-laitteen määrittäminen ja FreeStyle LibreLink Special Edition -sovelluksen lataaminen (jatkuu)

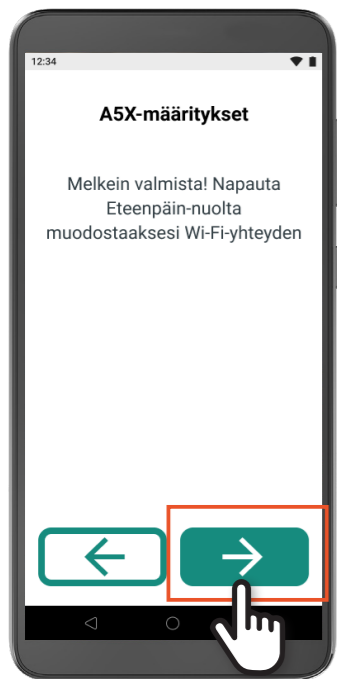


5. **NAPAUTA** ETEENPÄIN OSOITTAVAA NUOLTA.

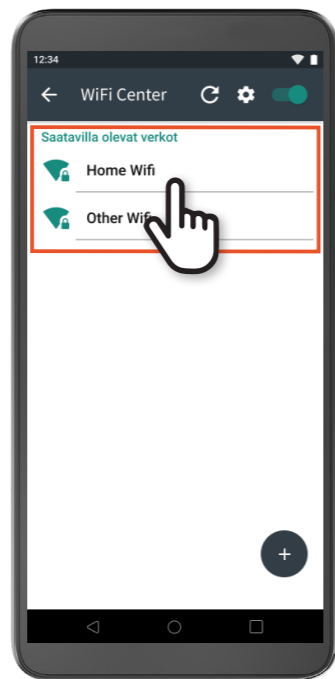

6. **NAPAUTA** tunnettua WiFi-verkkoa yhdistääksesi laitteen siihen.

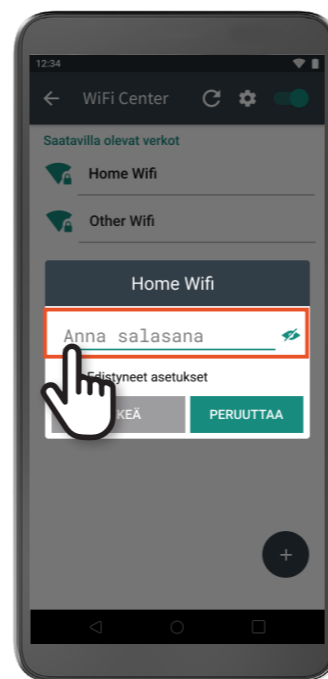

7. **NAPAUTA** Anna salasana, jos niin pyydetään. Anna sitten WiFi-salasana.

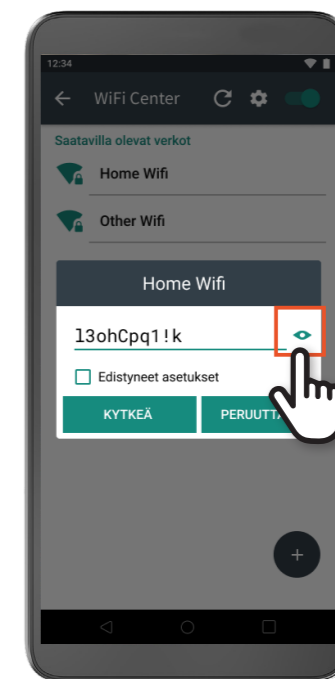


8. **NAPAUTA** silmäkuvaketta, jos haluat nähdä salasanan sen kirjoittamisen aikana.


Vaihe 1: **ASX**-laitteen määrittäminen ja FreeStyle LibreLink Special Edition -sovelluksen lataaminen (jatkuu)



9. NAPAUTA KYTKEÄ. Laitteen ollessa yhdistettynä WiFi-verkkoon, odota noin 2 minuuttia, jotta NUU App Storen asettaminen saadaan suoritettua loppuun. Suosittelemme, ettet napauta mitään sovelluskuvakkeita näiden kahden minuutin aikana.

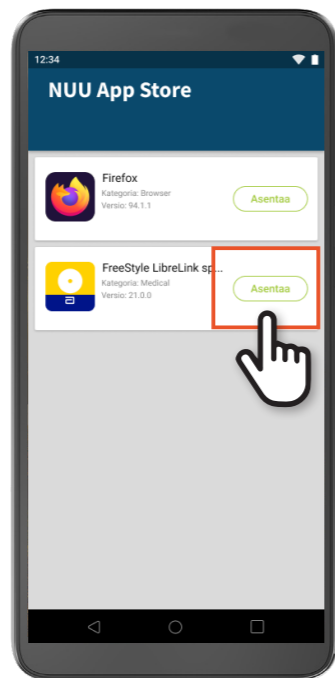


10. NUU App Store käynnistyy automaattisesti kun sen asettaminen on suoritettu loppuun. Laitteen ollessa yhdistettynä WiFi-verkkoon, **NAPAUTA** FreeStyle LibreLink Special Edition -sovelluskuvakkeen vieressä olevaa **ASENTAA**-painiketta NUU App Storessa ja odota, että sovellus latautuu. Käyttäjän on **NAPAUTETTAVA** **ASENTAA**-painiketta, ei kuvaketta tai muuta kohtaa, jotta sovellus latautuu.

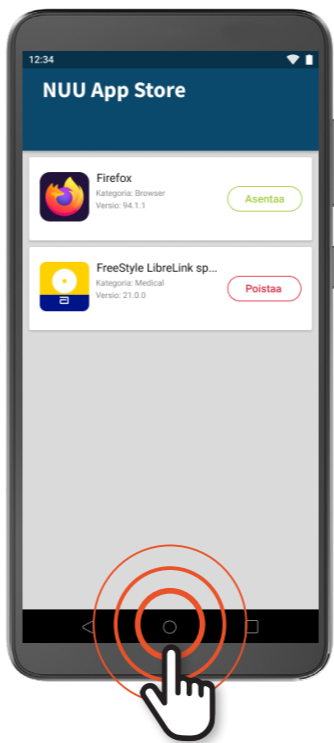

11. Kun sovelluksen lataus on valmis, **NAPAUTA** alhaalta ympyräpainiketta. **Huomautus:** Kun sovelluksen lataus on valmis, vihreä palkki katoaa, vihreä **Asentaa**-painike muuttuu punaiseksi ja siinä lukee "Poistaa". Sen jälkeen FreeStyle LibreLink Special Edition -sovelluskuvake ilmestyy laitteen aloitusnäyttöön.

Vaihe 2: FreeStyle LibreLink Special Edition -sovelluksen asentaminen

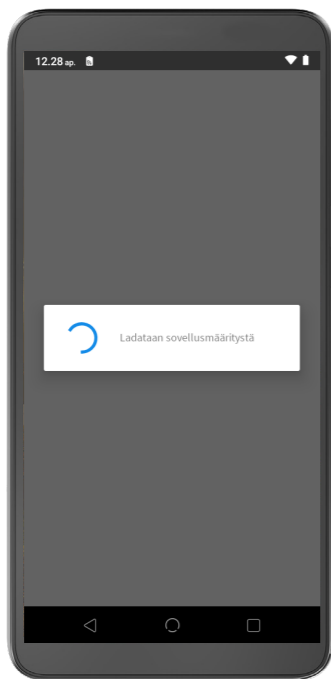

- 1. NAPAUTA** FreeStyle LibreLink Special Edition -sovelluksen kuvaketta. Odota, että sovellus latautuu. Huomaa, että WiFi-yhteys vaaditaan edelleen. Tämä saattaa kestää hetken aikaa internet-yhteyden nopeudesta riippuen.

Vaihe 2: FreeStyle LibreLink Special Edition -sovelluksen asentaminen (jatkuu)



- 2. Sovelluksen voi käynnistää kolmella tavalla:**

A. Luo LibreView¹-tili jakaaksesi glukoositietoja hoitotiimin kanssa, jolloin tiedot ovat automaattisesti käytettävissä² ennen käyntiä vastaanotolla (suositeltava vaihtoehto).

Jos käyttäjällä ei ole sähköpostiosoitetta tai hän ei halua luoda LibreView-tiliä, käyttö voidaan aloittaa ilman LibreView-tiliä. Katso **Vaihtoehto C** liitteestä.

B. **KIRJAUDU SISÄÄN** käyttämällä olemassa olevaa LibreView-tilin sähköpostiosoitetta. (Katso aihetta koskeva sivu liitteessä.)

C. Käytä sovellusta ilman LibreView-tiliä. (Katso aihetta koskeva sivu liitteessä.)

Viimeistele sovelluksen asennus noudattamalla näytön ohjeita. Kun sovelluksen asennus on valmis, internet-yhteyttä ei vaadita glukoosiarvojen tarkastamiseen.


Vaihtoehto A: Luo uusi LibreView¹-tili




1. Aloita
NAPAUTTAMALLA
ALOITA NYT.



2. Vahvista asuinmaasi
NAPAUTTAMALLA
SEURAAVA.

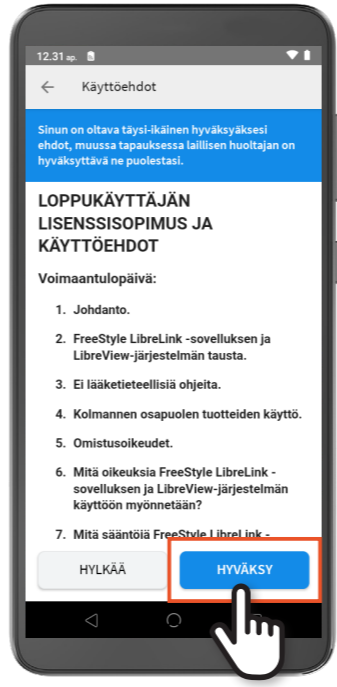


3. Lue käyttöehdot
ja hyväksy ne
NAPAUTTAMALLA
HYVÄKSY.

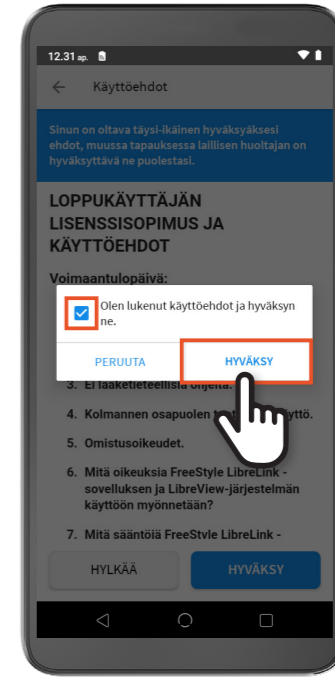


4. Valitse ruutu
NAPAUTTAMALLA
ja **NAPAUTA** sitten
HYVÄKSY.

Vaihtoehto A: Luo uusi LibreView¹-tili (jatkuu)

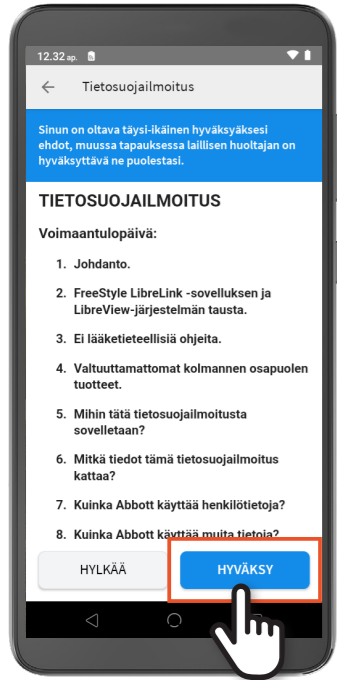


5. Lue tietosuojailmoitus ja hyväksy se **NAPAUTTAMALLA** **HYVÄKSY**.

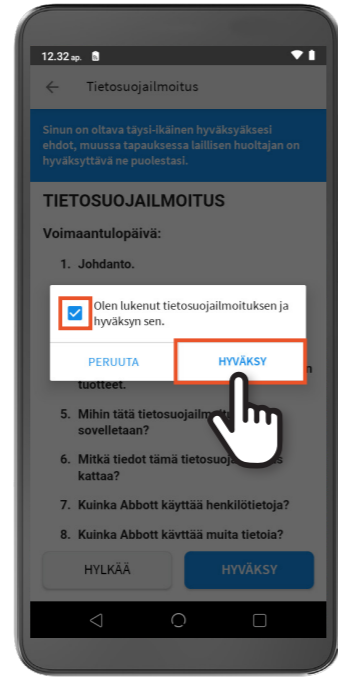


6. Valitse ruutu **NAPAUTTAMALLA** ja **NAPAUTA** sitten **HYVÄKSY**.

Vaihtoehto A: Luo uusi LibreView¹-tili (jatkuu)

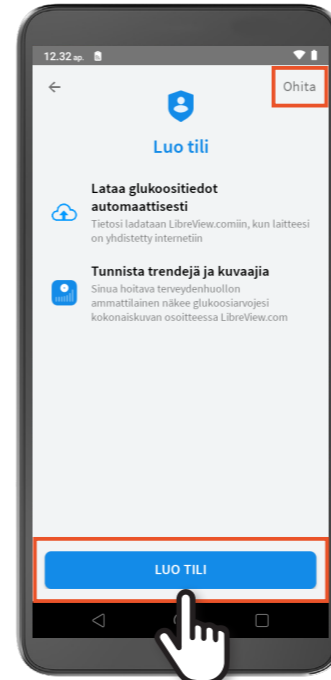


7. Luo uusi tili **NAPAUTTAMALLA** **LUO TILI** ja jatka vaiheeseen 8. Tai **NAPAUTA** Ohita, jos haluat käyttää sovellusta ilman LibreView¹-tiliä.

Jos käyttäjällä ei ole sähköpostiosoitetta tai hän ei halua luoda LibreView-tiliä, käyttö voidaan aloittaa ilman LibreView¹-tiliä napauttamalla Ohita. Katso **Vaihtoehto C** liitteestä.

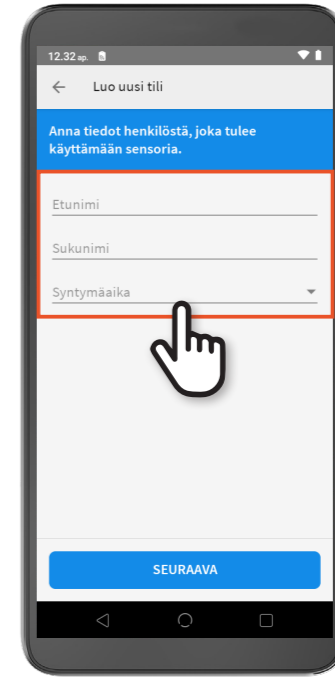


8. **NAPAUTA** ETUNIMI ja kirjoita etunimesi. **NAPAUTA** SUKUNIMI ja kirjoita sukunimesi. **NAPAUTA** SYNTYMÄAIKA tai **NAPAUTA** nuolta.

Vaihtoehto A: Luo uusi LibreView¹-tili (jatkuu)

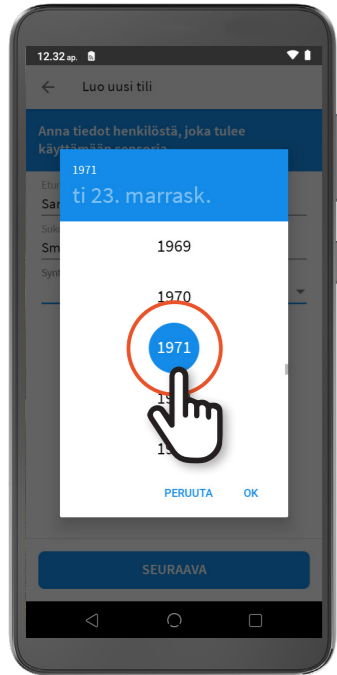


9. Etsi syntymävuosi pyyhkäisemällä ylös tai alas ja **NAPAUTA** syntymävuotta.

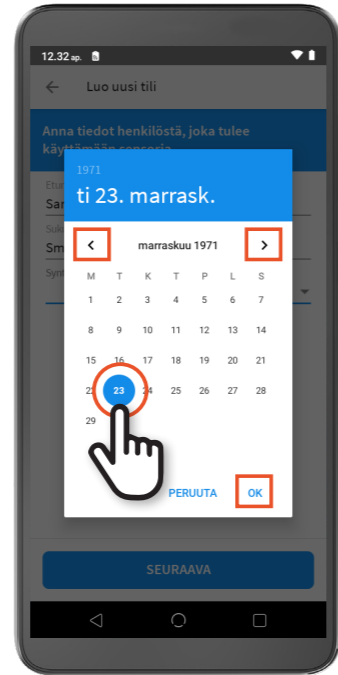


10. **NAPAUTA** nuolista kuukausi ja **NAPAUTA** päivämäärä. **NAPAUTA** OK.

Vaihtoehto A: Luo uusi LibreView¹-tili (jatkuu)

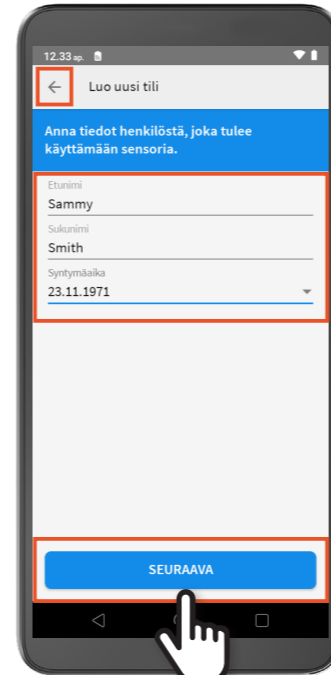

11. Jos käyttäjä tekee virheen, hän voi **NAPAUTTAA** aluetta uudelleen tai **NAPAUTTAA** taaksepäin osoittavaa nuolta. Jatka **NAPAUTTAMALLA** SEURAAVA.

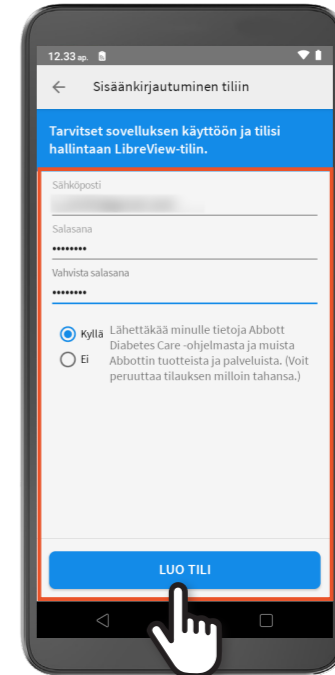


12. **NAPAUTA** SÄHKÖPOSTI ja anna sähköpostiosoite. **NAPAUTA** SALASANA ja anna salasana. **NAPAUTA** VAHVISTA SALASANA ja anna salasana uudelleen. **NAPAUTA** vaihtoehtoa, haluaako käyttäjä vastaanottaa tietoja Abbottilta. **NAPAUTA** LUO TILI.

Vaihtoehto A: Luo uusi LibreView¹-tili (jatkuu)




13. Vahvista maa ja mittayksikkö **NAPAUTTAMALLA** SEURAAVA.

Vaihtoehto A: Luo uusi LibreView¹-tili (jatkuu)

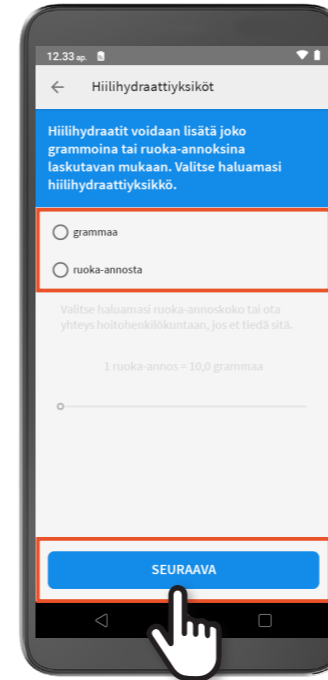


14. NAPAUTA haluamaasi hiilihydraattiyksikköä. **NAPAUTA** SEURAAVA.

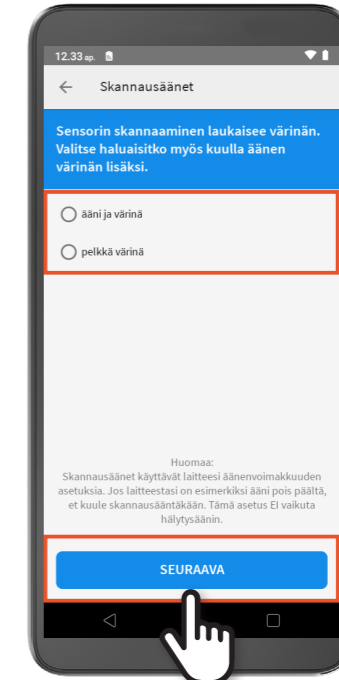


15. NAPAUTA haluamaasi skannausääntä. **NAPAUTA** SEURAAVA.

Vaihe 3: Uuden sensorin käynnistäminen sovelluksella

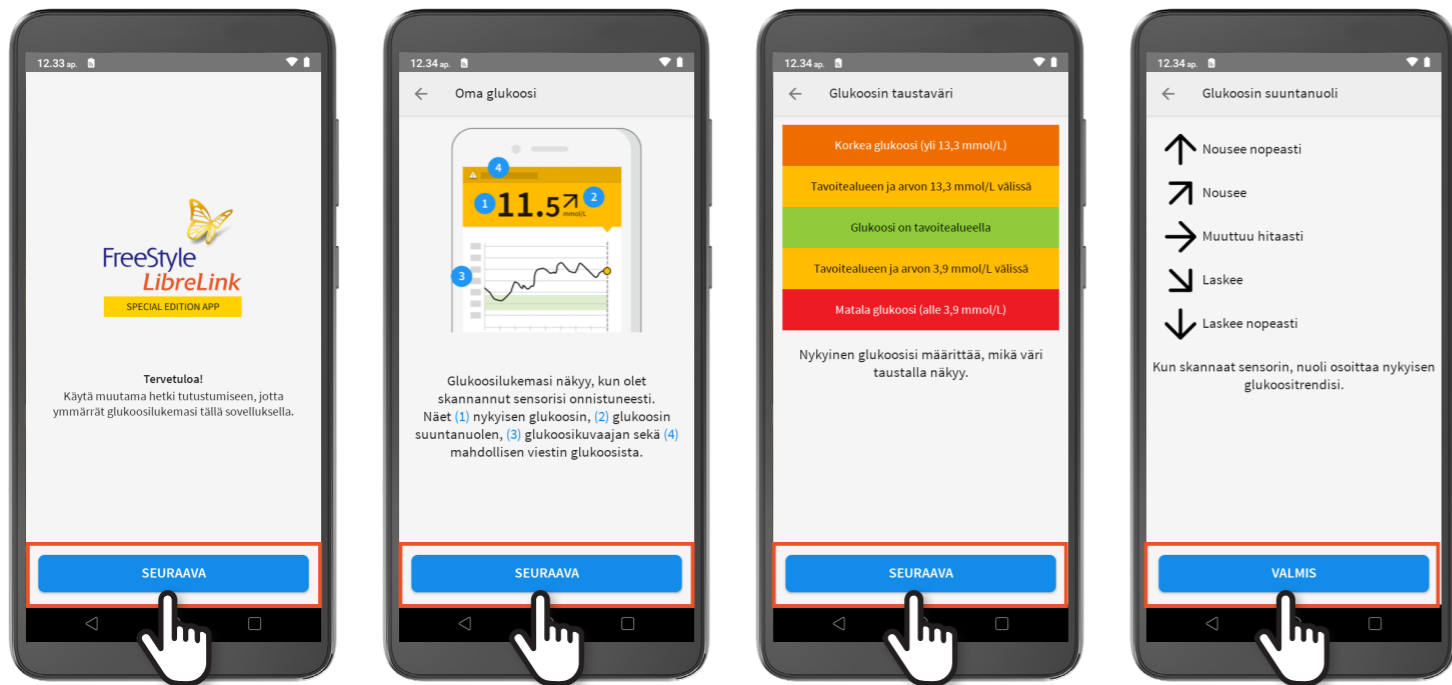

NAPAUTA SEURAAVA aloittaaksesi sovelluksen opastuksen, jotta käyttäjät voisivat ymmärtää glukoosilukemiaan. Lue opastus läpi napauttamalla SEURAAVA. Kun olet lukenut opastuksen, **NAPAUTA** VALMIS.


Vaihe 3: Uuden sensorin käynnistäminen sovelluksella (jatkuu)

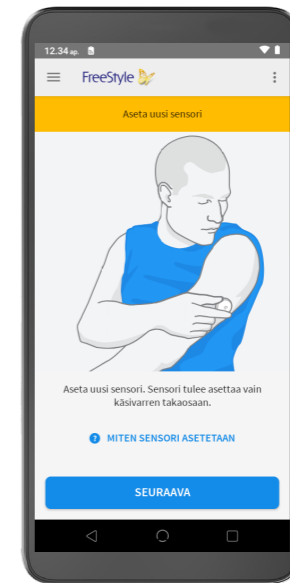


Noudata samoja vaiheita aina kun skannaat sensorin sovelluksella.

1. Kun olet kiinnittänyt uuden sensorin olkaparran takaosaan,
A. Pidä A5X-laitteen taustapuolen keskiosaa sensorin lähellä aloittaaksesi SKANNAAMISEN. Käyttäjän on ehkä siirreltävä laitteen keskiosaa sensorin päällä muutaman kerran oikean kohdan löytämiseksi.
B. Kun käyttäjä kuulee ensimmäisen merkkiäänän tai värinäilmoituksen, jatka laitteen pitelemistä (älä liikuta sitä). Kun käyttäjä kuulee toisen merkkiäänän tai värinäilmoituksen se osoittaa, että sensori on aloitettu ja laite on valmis käytettäväksi.
C. Toisen merkkiäänän tai värinäilmoituksen jälkeen siirrä laite pois sensorin läheltä.

Vaihe 3: Uuden sensorin käynnistäminen sovelluksella (jatkuu)

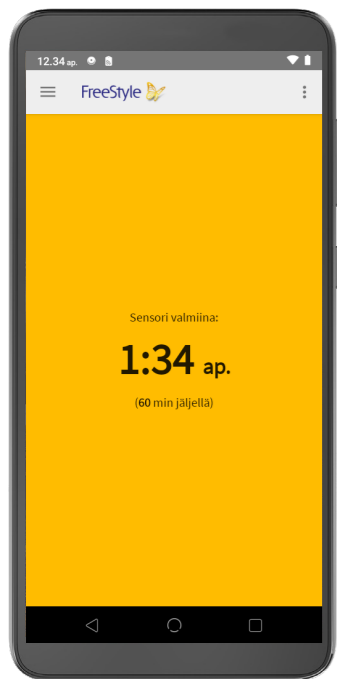


2. Sensoria voidaan käyttää glukoosiarvojen tarkistamiseen 60 minuutin kuluttua. Sovelluksessa oleva laskuri ilmoittaa 60 minuutista jäljellä olevan ajan.

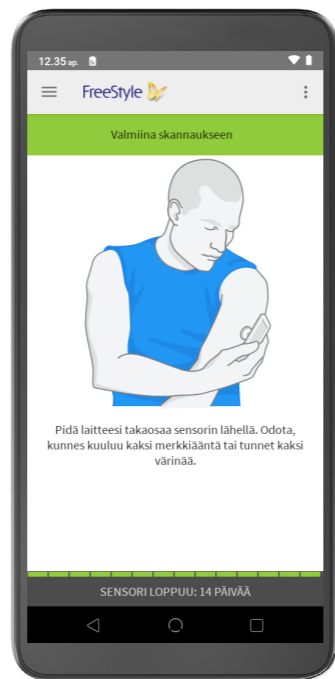


3. Kun 60 minuuttia on kulunut, **SKANNAA** sensori tarkastaaksesi ajankohtaisen glukoosiarvon. Kattavan glukoosihistorian saamiseksi sensori on skannattava kerran 8 tunnin välein.

Glukoosihälytysten asettaminen ja glukoosin tavoitealueen muuttaminen

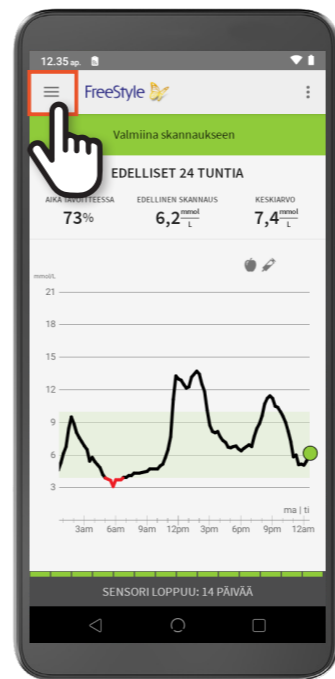


1. NAPAUTA VALIKKO-kuvaketta.

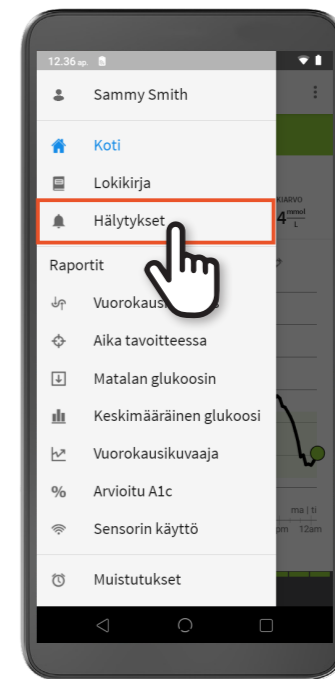

2. NAPAUTA sitten HÄLYTYKSET.

Glukoosihälytysten asettaminen ja glukoosin tavoitealueen muuttaminen (jatkuu)

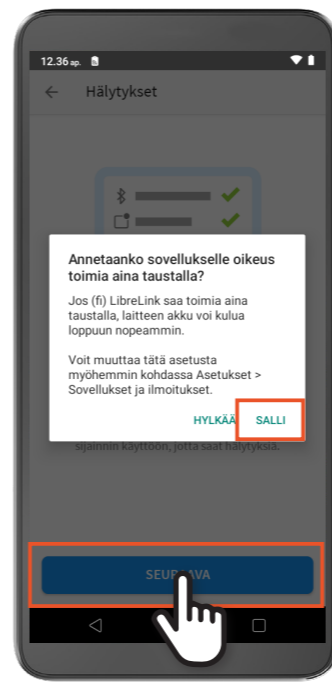


4. Salli sovelluksen toimiminen taustalla **NAPAUTTAMALLA SEURAAVA.**




5. Lue Ei saa häiritä -opastus ja **NAPAUTTA SEURAAVA.**

3. Lue glukoosihälytysten opastusnäytöt ja **NAPAUTTA SEURAAVA.**


Glukoosihälytysten asettaminen ja glukoosin tavoitealueen muuttaminen (jatkuu)

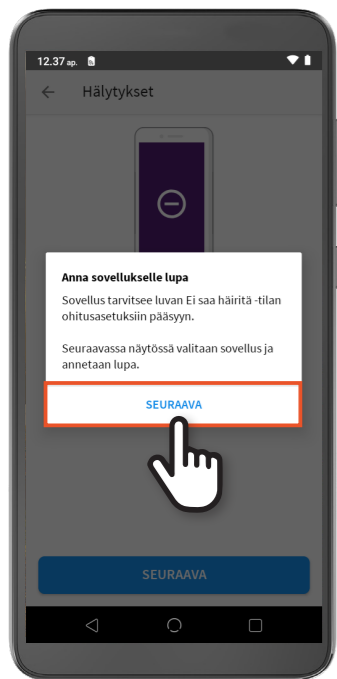

6. Vahvista Ei saa häiritä -asetus **NAPAUTTAMALLA** SEURAAVA.

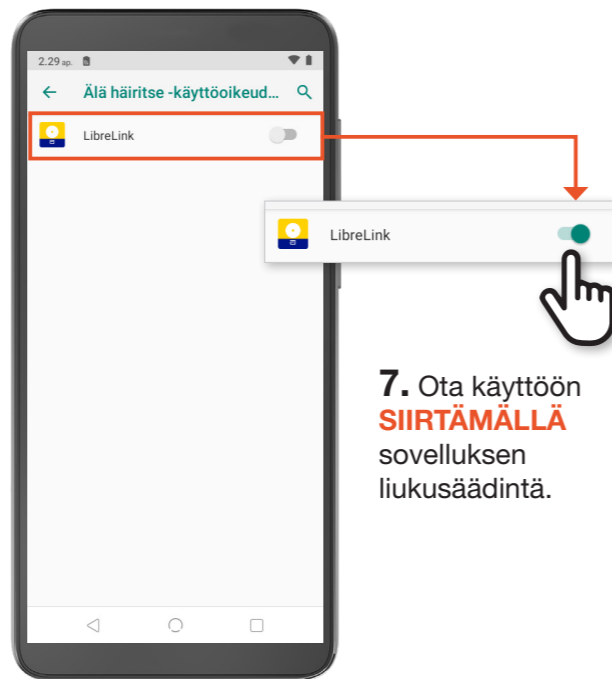


7. Ota käyttöön **SIIRTÄMÄLLÄ** sovelluksen liikusäädintä.

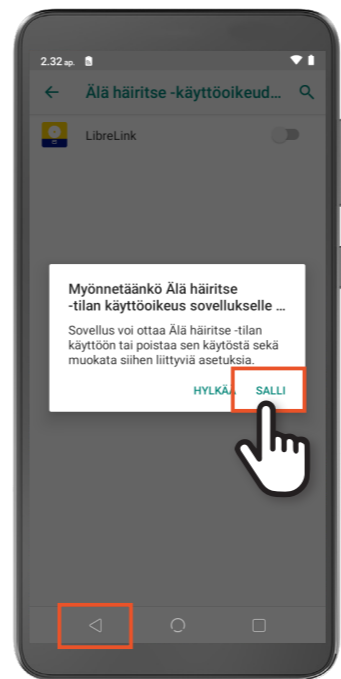

8. Ohita Älä häiritse -tila **NAPAUTTAMALLA** sitten SALLI. Jos Älä häiritse -tila on käytössä, käyttäjät eivät saa glukoosihälytyksiä. Jotta voisit vastaanottaa hälytyksiä, salli Älä häiritse -tilan ohitus. **NAPAUTA** sitten paluupainiketta.

Glukoosihälytysten asettaminen ja glukoosin tavoitealueen muuttaminen (jatkuu)

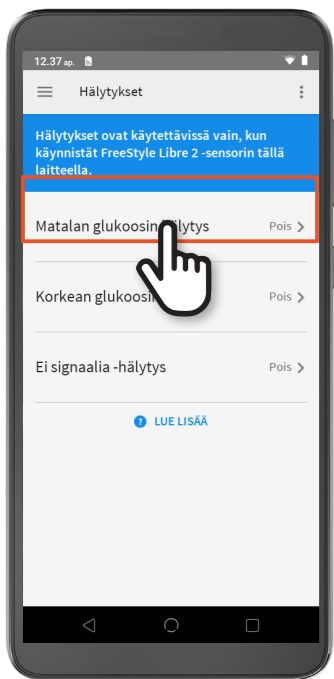


1. NAPAUTA MATALAN GLUKOOSIN HÄLYTYS.



2. Ota käyttöön MATALAN GLUKOOSIN HÄLYTYS **SIIRTÄMÄLLÄ** liukusäädintä.




3. Vahvista, että Ei signaalia -hälytys on kytketty automaattisesti päälle **NAPAUTTAMALLA** OK.

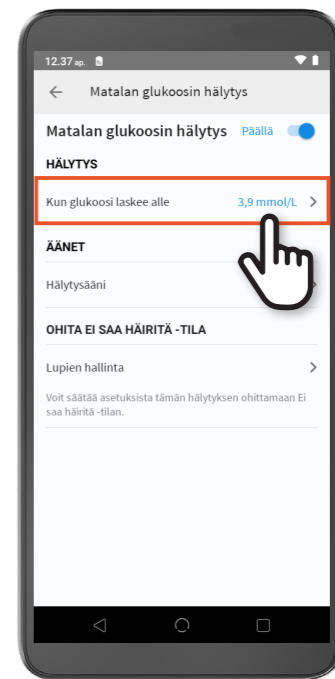

4. Muuta glukoosiarvoa **NAPAUTTAMALLA** glukoosin raja-arvoa.

Glukoosihälytysten asettaminen ja glukoosin tavoitealueen muuttaminen (jatkuu)

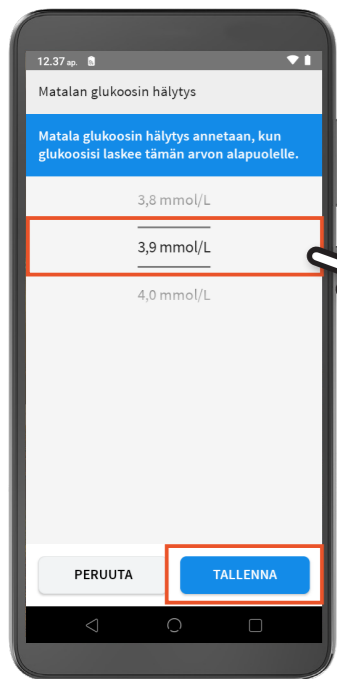

5. Valitse glukoosin raja-arvo pyyhkäisemällä ylös tai alas ja **NAPAUTA TALLENNA**.


Glukoosihälytysten asettaminen ja glukoosin tavoitealueen muuttaminen (jatkuu)



VINKKI


Glukoosin oletusarvoinen tavoitealue on 3,9–10,0 mmol/L. Käyttäjät voivat tarvittaessa muuttaa tätä tavoitealuetta.

1. **NAPAUTA** kotinäytössä ylivirtausvalikkovaketta (oikeassa yläkulmassa).

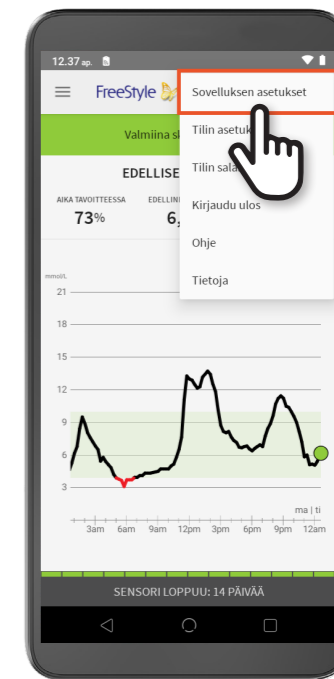

NAPAUTA SOVELLUKSEN ASETUKSET.

Glukoosihälytysten asettaminen ja glukoosin tavoitealueen muuttaminen (jatkuu)

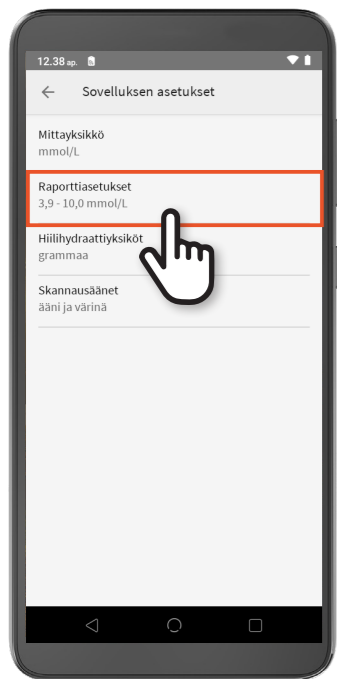

2. NAPAUTA RAPORTTIASETUKSET.




3. Oletusarvoinen tavoitealue on 3,9–10,0 mmol/L. Tavoitealuetta voidaan muuttaa pyyhkäisemällä glukoosiarvoja ylös- tai alaspäin ja NAPAUTTAMALLA TALLENNA.

Aikavyöhykkeen asettaminen





1. NAPAUTA ASETUKSET.

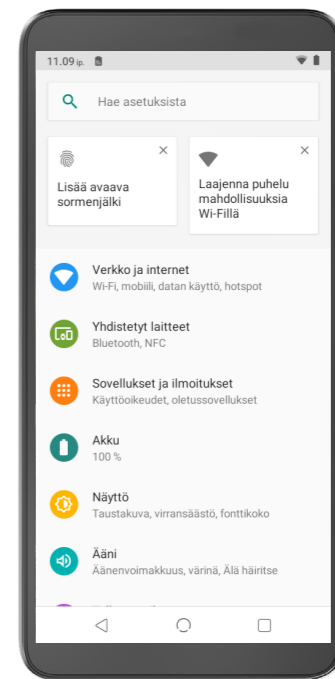

2. VIERITÄ näytön alareunaan

Aikavyöhykkeen asettaminen (jatkuu)



3. NAPAUTA Järjestelmä.

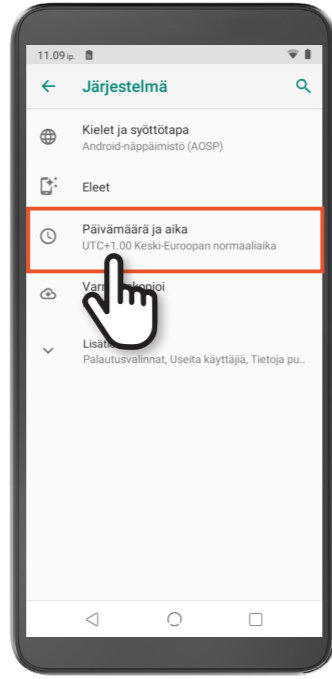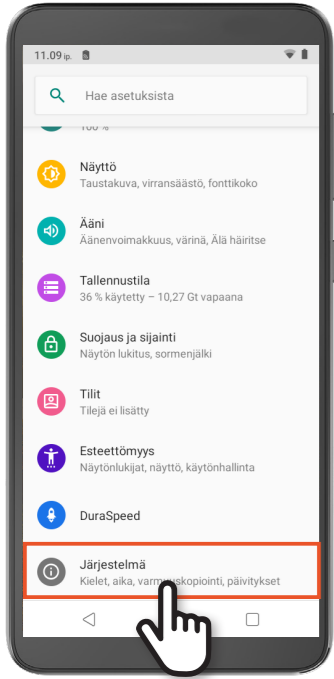

4. NAPAUTA päivämäärä ja aika.


Aikavyöhykkeen asettaminen (jatkuu)

5. SIIRÄ liikusäädintä vasemmalle ottaaksesi Automaattisen aikavyöhykkeen pois käytöstä.

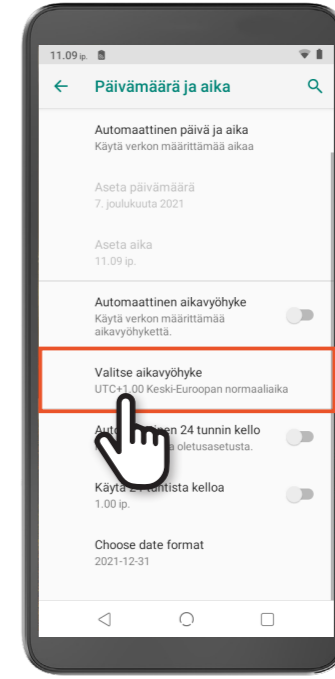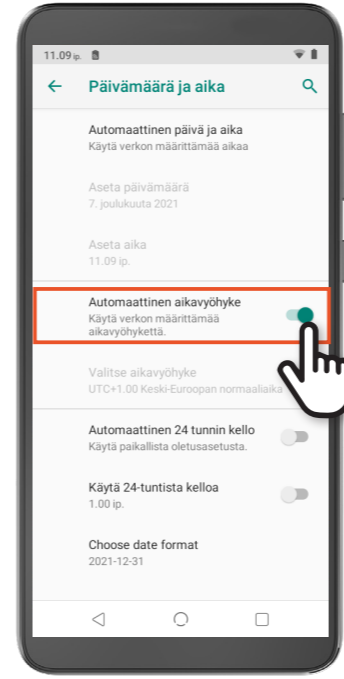


6. NAPAUTA Valitse aikavyöhyke.

Aikavyöhykkeen asettaminen (jatkuu)

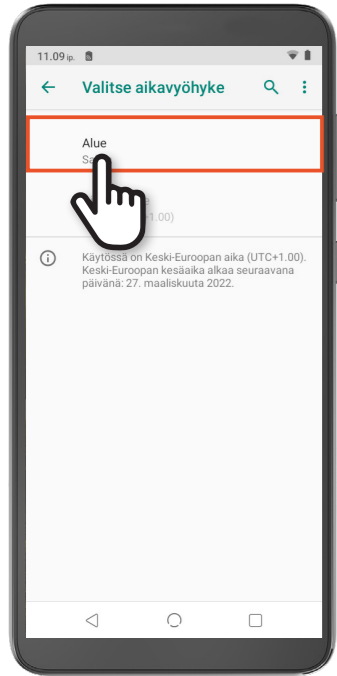

7. **NAPAUTA** Alue.

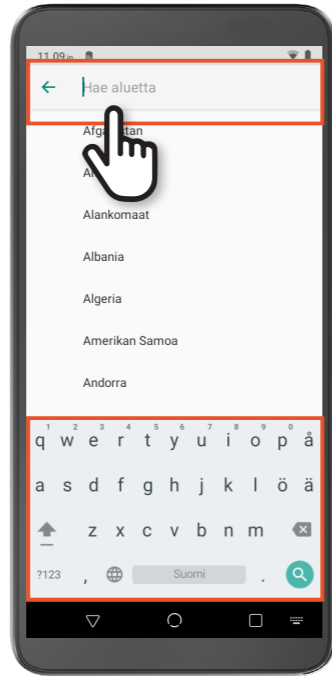


8. **KIRJOITA** maasi nimi.

Aikavyöhykkeen asettaminen (jatkuu)




9. **NAPAUTA** maatasi.*

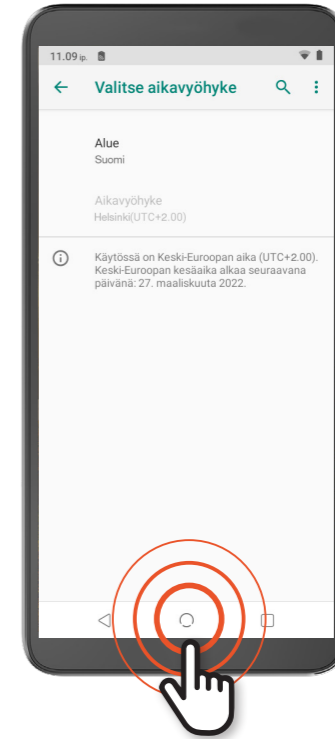

10. **NAPAUTA** alhaalta ympyräpainiketta.

*Jos valitulla maalla on useita aikavyöhykkeitä, käyttäjää pyydetään valitsemaan myös kaupunki samankaltaisella aikavyöhykkeellä ennen siirtymistä vaiheeseen 10.

FreeStyle LibreLink Special Edition -sovelluksen¹ käyttäminen lukulaitteen sijaan

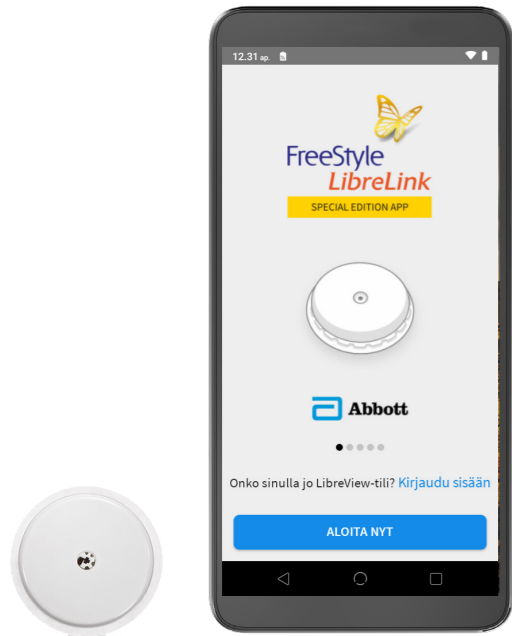

FreeStyle LibreLink Special Edition -sovellus on yhteensopiva NUU Mobilen valmistaman ja Abbottin jakeleman A5X-laitteen kanssa.

FreeStyle LibreLink Special Edition -sovellus on tarkoitettu FreeStyle Libre- / FreeStyle Libre 2 -käyttäjille, joilla ei ole lukulaitetta tai FreeStyle LibreLink -sovelluksen kanssa yhteensopivaa älypuhelinia.

FreeStyle LibreLink Special Edition -sovellus on verrattavissa lukulaitteeseen, koska sillä voidaan esimerkiksi skannata sensori glukoosiarvojen saamiseksi, ja sitä voidaan käyttää ilman internet-yhteyttä sovelluksen asentamisen jälkeen.

Jos sinulla on kysyttävää, soita asiakaspalvelunumeromme **0800 555 500** (arkisin klo 8.00 - 16.00).



Miksi pistää², kun voi skannata?

1. FreeStyle LibreLink Special Edition -sovellus on toistaiseksi yhteensopiva vain A5X-laitteen kanssa. 2. FreeStyle Libre -sensorin käyttäjät: Sormenpäästä on otettava pistonäyte, jos glukoosilukemat tai -hälytykset eivät vastaa oireita tai odotuksia. FreeStyle Libre 2 -sensorin käyttäjät: Sormenpäästä on otettava pistonäyte, jos glukoosilukemat tai -hälytykset eivät vastaa oireita tai odotuksia.
FreeStyle Libre Flash -glukoosinseurantajärjestelmä, FreeStyle Libre 2 Flash -glukoosinseurantajärjestelmä, FreeStyle LibreLink -sovellus, FreeStyle LibreLink Special Edition -sovellus ja LibreView -pilvipalvelu ovat CE -merkattuja lääkinmällisiä laitteita. CE 2797 Valmistaja: Abbott Diabetes Care Ltd., Range Road, Witney, Oxon, OX29 0YL, UK
©2022 Abbott. FreeStyle, Libre ja niihin liittyvät tavaramerkit ovat Abbottin tavaramerkkejä. Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. ADC-50918 v1.0 01/22
www.FreeStyle.Abbott - 0800 555 500 - Abbott Oy - Karvaamokuja 2A - 00380 Helsinki

LIITE




A5X-laitepaketti sisältää kaiken tarvittavan käytön aloittamista varten



A5X-laite



Aloitusopas

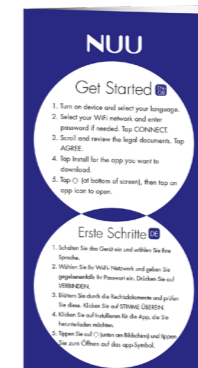

Aloitusopas -ohjekortti
(WiFi-yhteyden
muodostaminen
sovelluksen
lataamista varten)



Latausjohto ja
virtapistoke




Vaihtoehto B: Kirjaudu olemassa olevalle LibreView¹-tilillesi


Vaihtoehto B: Kirjaudu olemassa olevalle LibreView¹-tilillesi (jatkuu)




1. Aloita **NAPAUTTAMALLA** KIRJAUDU SISÄÄN.

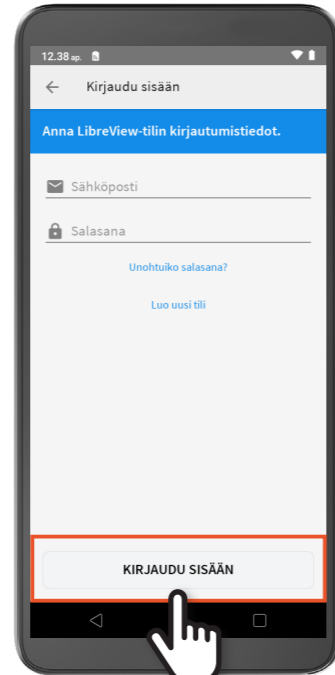

2. Anna LibreView-tilin sähköpostiosoite ja salasana. **NAPAUTA** KIRJAUDU SISÄÄN.

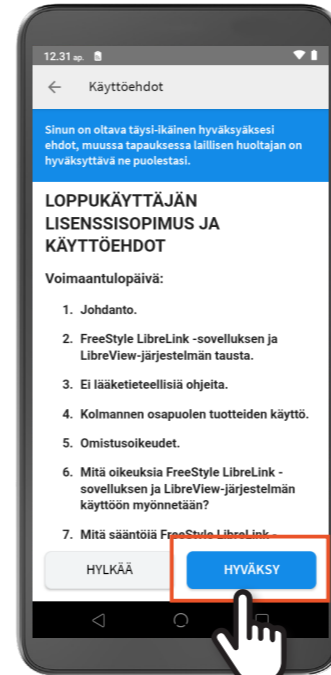


3. Lue käyttöehdot ja hyväksy ne **NAPAUTTAMALLA** HYVÄKSY.

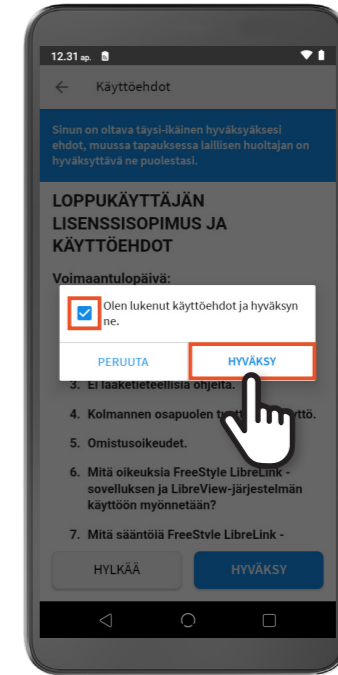


4. Valitse ruutu **NAPAUTTAMALLA** ja **NAPAUTA** sitten **HYVÄKSY**.

Vaihtoehto B: Kirjautu olemassa olevalle LibreView¹-tilillesi (jatkuu)

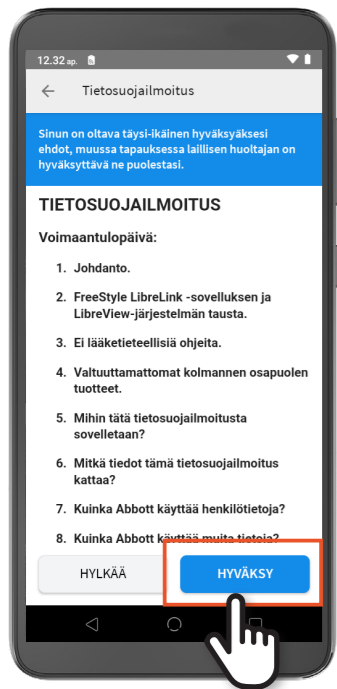

5. Lue tietosuojailmoitus ja hyväksy se **NAPAUTTAMALLA** HYVÄKSY.

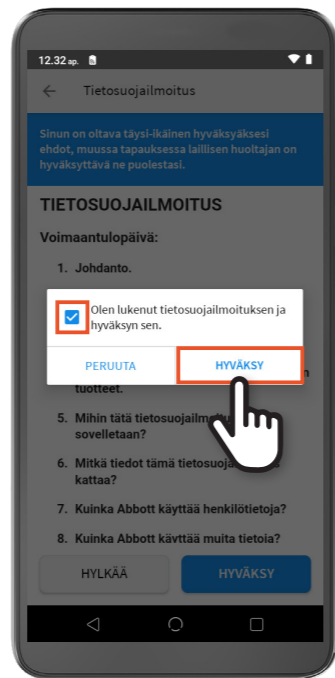


6. Valitse ruutu **NAPAUTTAMALLA** ja **NAPAUTA** sitten **HYVÄKSY**.

Vaihtoehto B: Kirjautu olemassa olevalle LibreView¹-tilillesi (jatkuu)




7. Vahvista maa ja mittayksikkö **NAPAUTTAMALLA** SEURAAVA.

Vaihtoehto B: Kirjaudu olemassa olevalle LibreView¹-tilillesi (jatkuu)

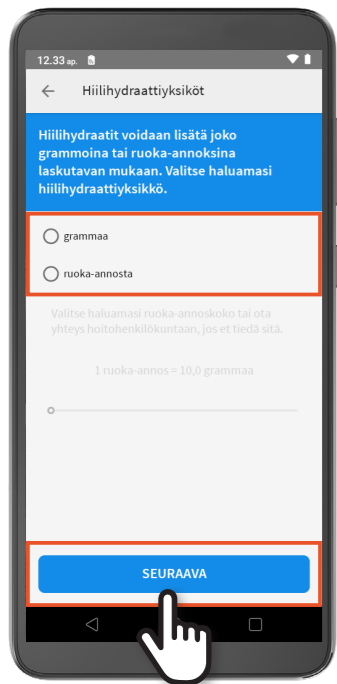

8. NAPAUTA haluamaasi hiilihydraattiyksikköä. **NAPAUTA SEURAAVA.**

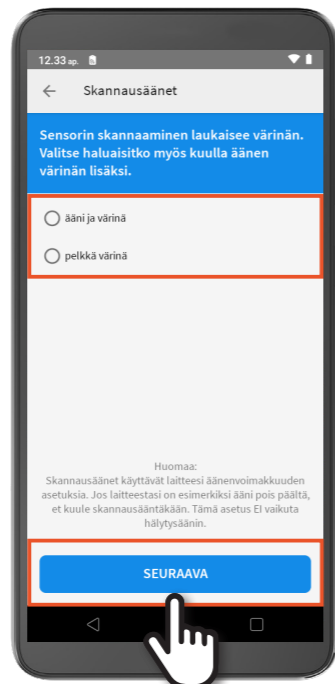

9. NAPAUTA haluamaasi skannausääntä. **NAPAUTA SEURAAVA.**




1. Aloita NAPAUTTAMALLA ALOITA NYT.




2. Vahvista asuinmaasi NAPAUTTAMALLA SEURAAVA.

Vaihtoehto C: Käytä FreeStyle LibreLink Special Edition -sovellusta ilman tiliä, WiFi-yhteyttä ei vaadita


Vaihtoehto C: Käytä FreeStyle LibreLink Special Edition -sovellusta ilman tiliä, WiFi-yhteyttä ei vaadita (jatkuu)

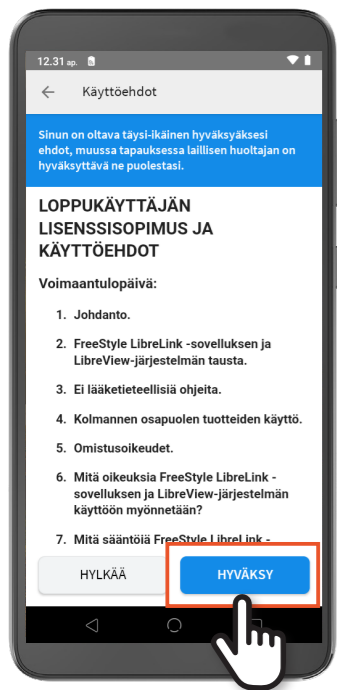


3. Lue käyttöehdot ja hyväksy ne **NAPAUTTAMALLA** HYVÄKSY.

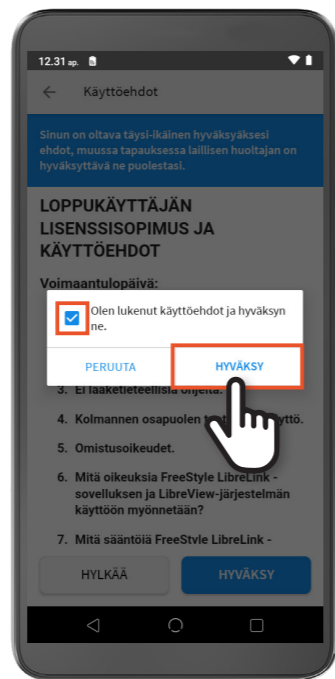

4. Valitse ruutu **NAPAUTTAMALLA** ja **NAPAUTA** sitten **HYVÄKSY**.

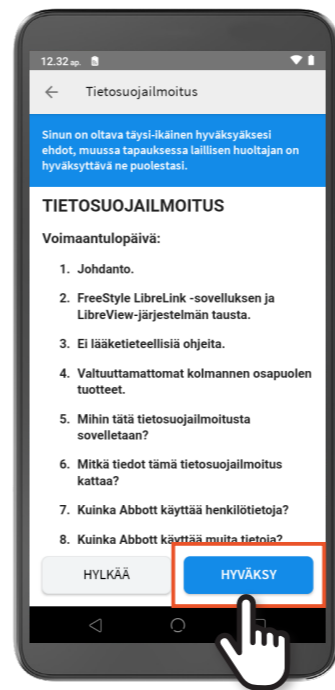


5. Lue tietosuojailmoitus ja hyväksy se **NAPAUTTAMALLA** HYVÄKSY.

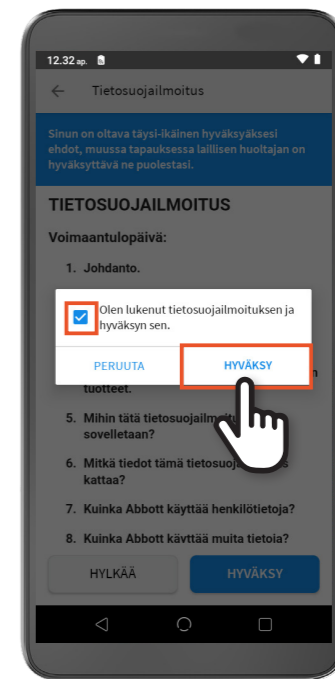

6. Valitse ruutu **NAPAUTTAMALLA** ja **NAPAUTA** sitten **HYVÄKSY**.

Vaihtoehto C: Käytä FreeStyle LibreLink Special Edition -sovellusta ilman tiliä, WiFi-yhteyttä ei vaadita (jatkuu)


Vaihtoehto C: Käytä FreeStyle LibreLink Special Edition -sovellusta ilman tiliä, WiFi-yhteyttä ei vaadita (jatkuu)

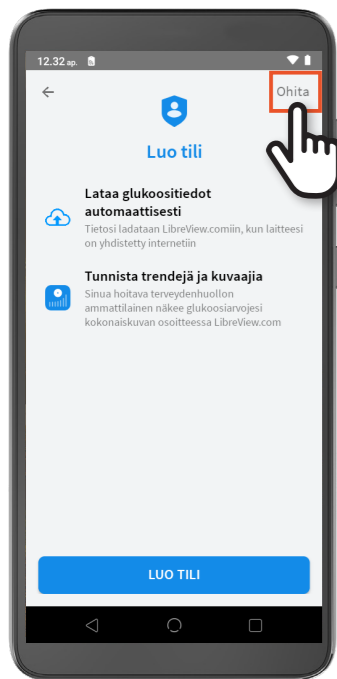

7. Jatka luomatta uutta LibreView-tiliä **NAPAUTTAMALLA** Ohita.




8. Vahvista **NAPAUTTAMALLA** JATKA.

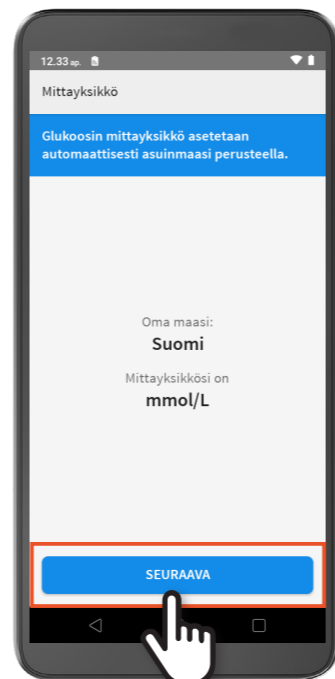


9. Vahvista maa ja mittayksikkö **NAPAUTTAMALLA** SEURAAVA.

Vaihtoehto C: Käytä FreeStyle LibreLink Special Edition -sovellusta ilman tiliä, WiFi-yhteyttä ei vaadita (jatkuu)

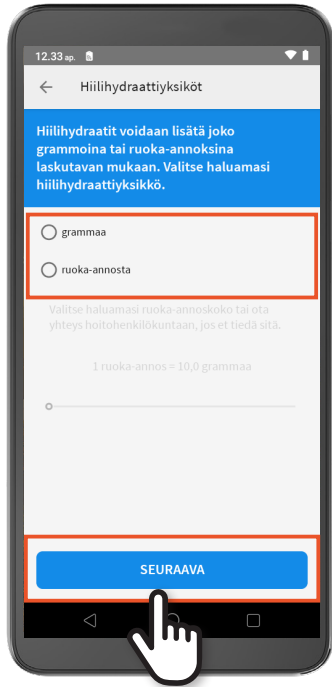

10. NAPAUTA haluamaasi hiilihydraattiyksikköä. **NAPAUTA SEURAAVA.**

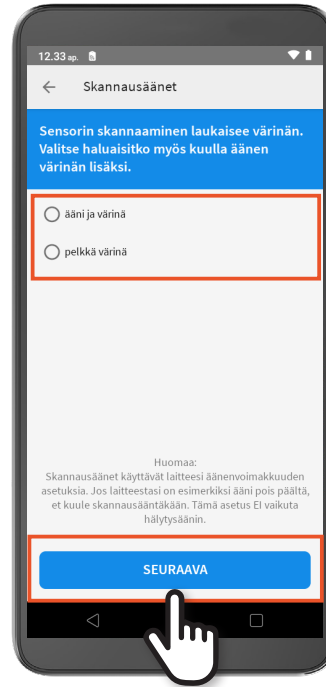

11. NAPAUTA haluamaasi skannausääntä. **NAPAUTA SEURAAVA.**