

FreeStyle
LibreLink

SPECIAL EDITION APP



KOM I GANG MED APPEN FREESTYLE LIBRELINK SPECIAL EDITION

 **Abbott**
life. to the fullest.®

Ingen riktige pasienter eller pasientdata. Bilder er kun ment for illustrasjon.

© 2022 Abbott. FreeStyle, Libre, og relaterte merkevarer eies av Abbott. Andre varemerker tilhører deres respektive eiere. ADC-50890 v 1.0 01/22

FreeStyle LibreLink Special Edition Appen er kompatibel med **A5X** enheten



Hva er **A5X** enheten?

A5X er en enhet produsert av NUU Mobile og distribuert av Abbott, som er kompatibel med FreeStyle Special Edition Appen.



Hvem er **A5X** for?


A5X med FreeStyle LibreLink Special Edition Appen er for brukere med FreeStyle Libre/FreeStyle Libre 2 som ikke har en avleser eller en smarttelefon som er kompatibel med FreeStyle LibreLink Appen.



Esken med **A5X** enheten inneholder alt som trengs til oppstart



A5X enhet

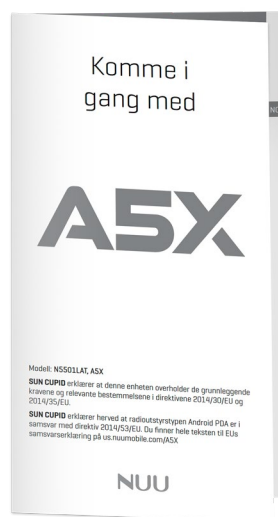

Komme i gang med A5X veiledning



Komme i gang Instruksjonskort (slik kobler du til Wi-Fi for å laste ned en app)



Ladekabel og stikkontakt




Trinn 1: Konfigurering av **A5X** enheten og nedlasting av FreeStyle LibreLink Special Edition Appen

TIPS

1. Batteriet i A5X enheten er allerede ladet og klart til bruk
2. Gå til et område med Wi-Fi
3. Ha e-post adressen klar for å opprette en konto (valgfritt)





1. Slå på enheten ved å trykke på «på»-knappen til skjermen lyser opp.

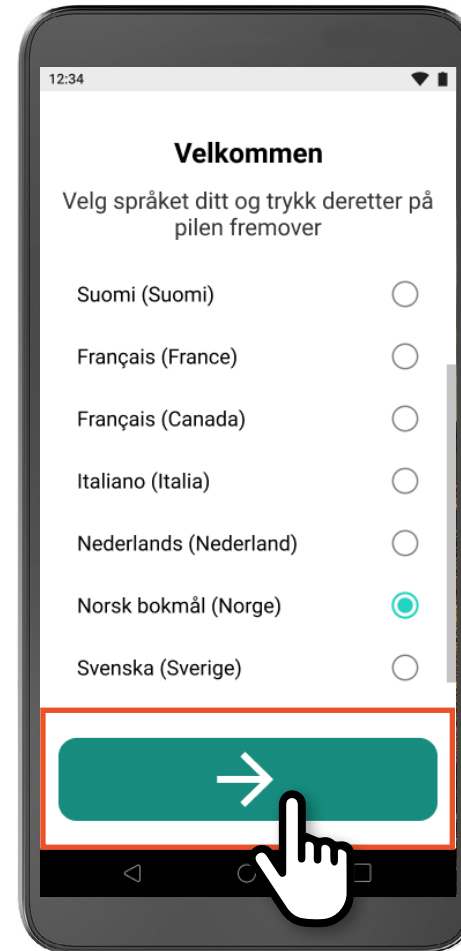


2. **BLA** ned og **TRYKK** på det språk du ønsker. **TRYKK** deretter på **FREMOVER-PILEN**

Trinn 1: Konfigurering av **A5X** enheten og nedlasting av FreeStyle LibreLink Special Edition Appen (forts.)

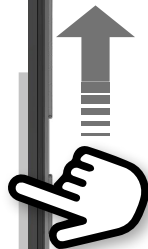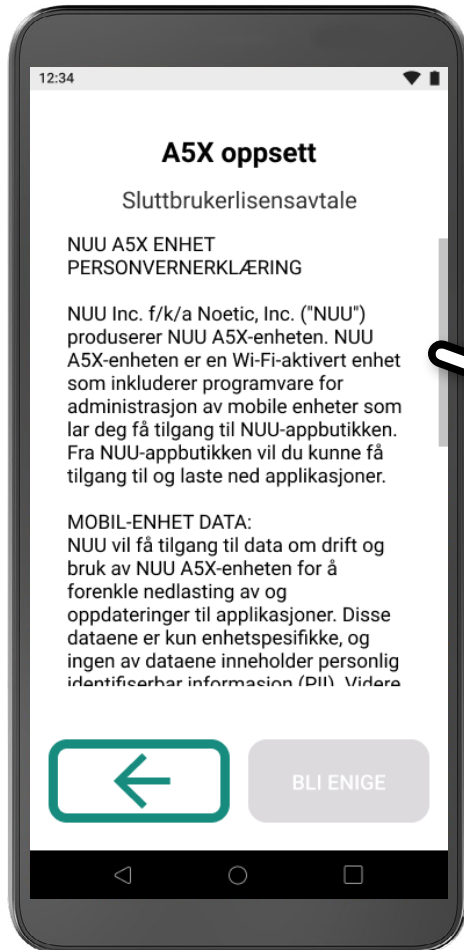


3. SVEIP opp for å gå gjennom det juridiske dokumentet.

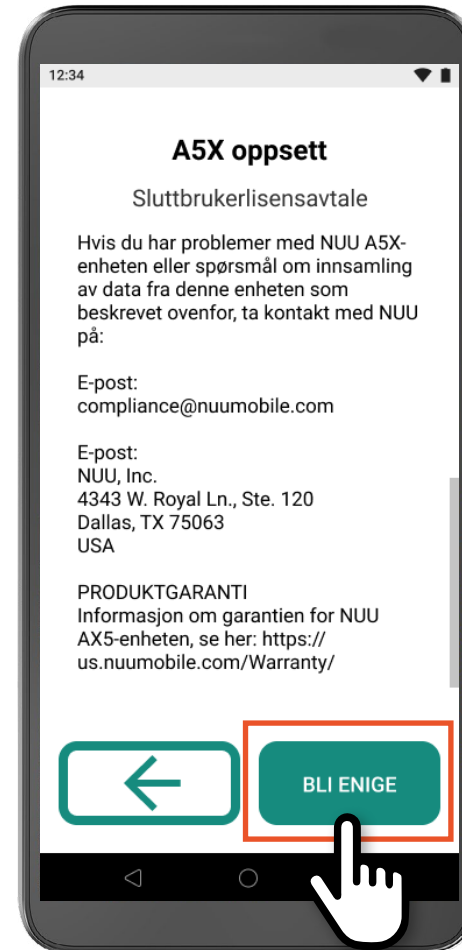


4. TRYKK på BLI ENIGE for å godta de juridiske dokumentene.

Trinn 1: Konfigurering av **A5X** enheten og nedlasting av FreeStyle LibreLink Special Edition Appen (forts.)

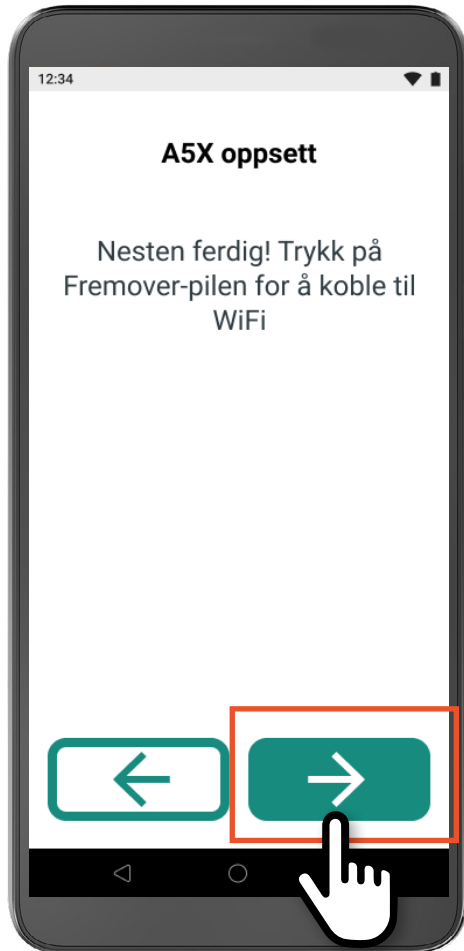


5. **TRYKK** på FREMVER-PILEN.

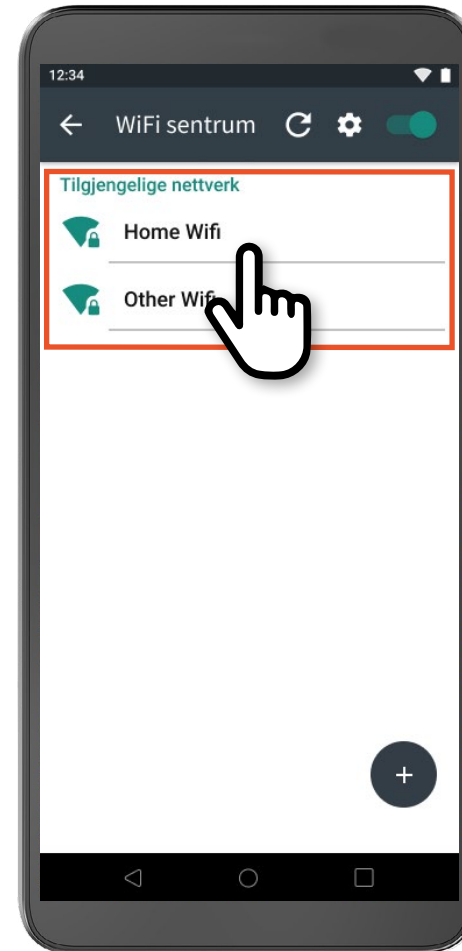


6. **TRYKK** på det Wi-Fi nettverk du ønsker å bruke for å koble til enheten.

Trinn 1: Konfigurering av **ASX** enheten og nedlasting av FreeStyle LibreLink Special Edition Appen (forts.)

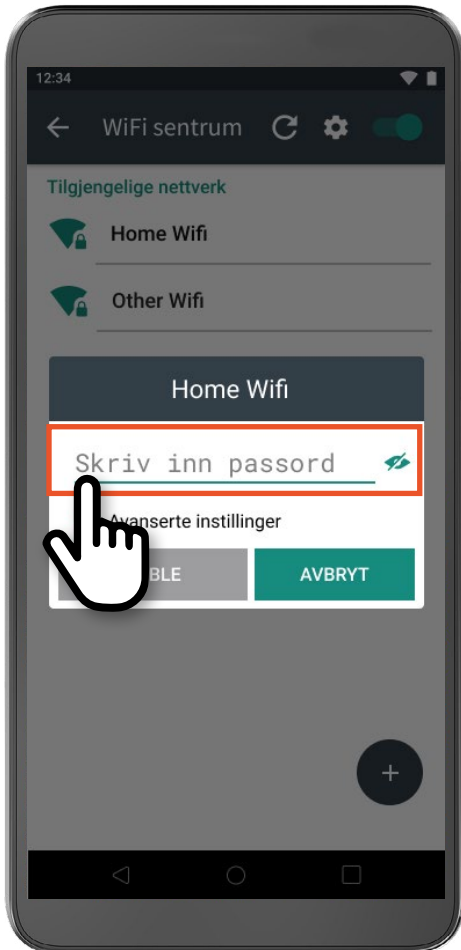


7. TRYKK på
Angi passord om
nødvendig. Skriv
deretter Wi-Fi-
passordet.

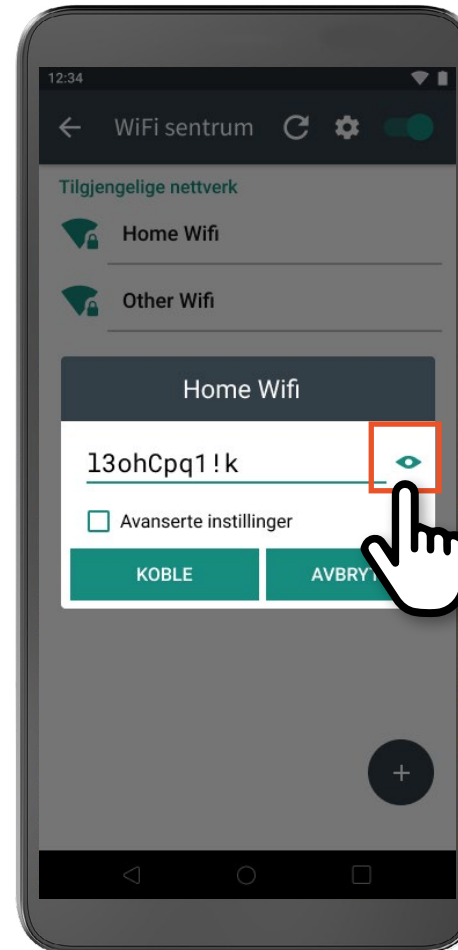


8. TRYKK på
øyeikonet for å se
passordet når det
skrives.

Trinn 1: Konfigurering av **A5X** enheten og nedlasting av FreeStyle LibreLink Special Edition Appen (forts.)

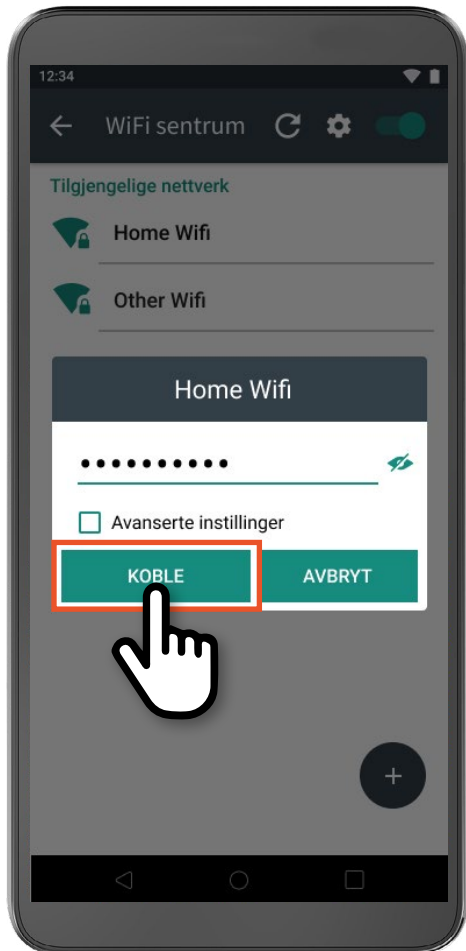


9. TRYKK på KOBLE TIL. Mens enheten fortsatt er koblet til WiFi, vent opptil 2 minutter for at NUU App Store skal fullføre oppsettet. Vi anbefaler å ikke trykke på noen av app-ikonene under disse 2 minutter.

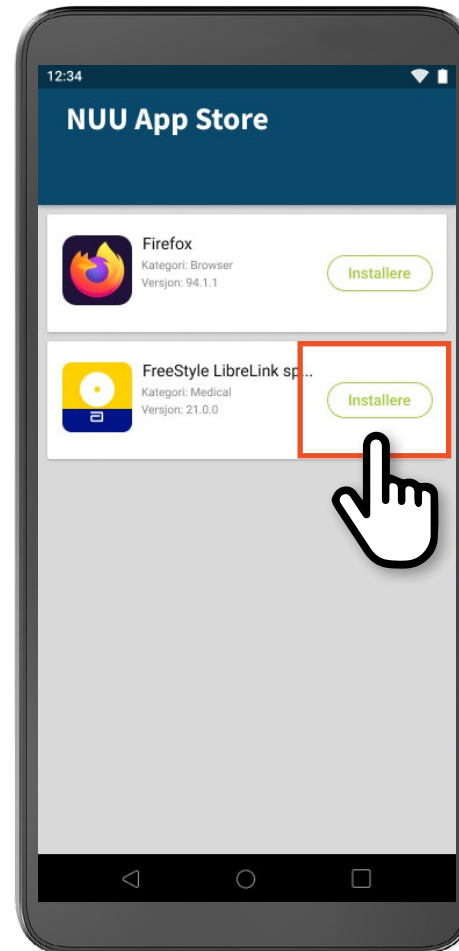

10. NUU App Store starter opp automatisk, når den er ferdig med å sette opp. Mens du er koblet til Wi-Fi, **TRYKK** på knappen INSTALLERE ved siden av appikonet for FreeStyle LibreLink Special Edition Appen i NUU App Store og vent på at appen lastes ned. Brukeren må **TRYKKE** på knappen INSTALLERE, ikke på ikonet eller et annet sted, for å laste ned appen.

Trinn 1: Konfigurering av **A5X** enheten og nedlasting av FreeStyle LibreLink Special Edition Appen (forts.)

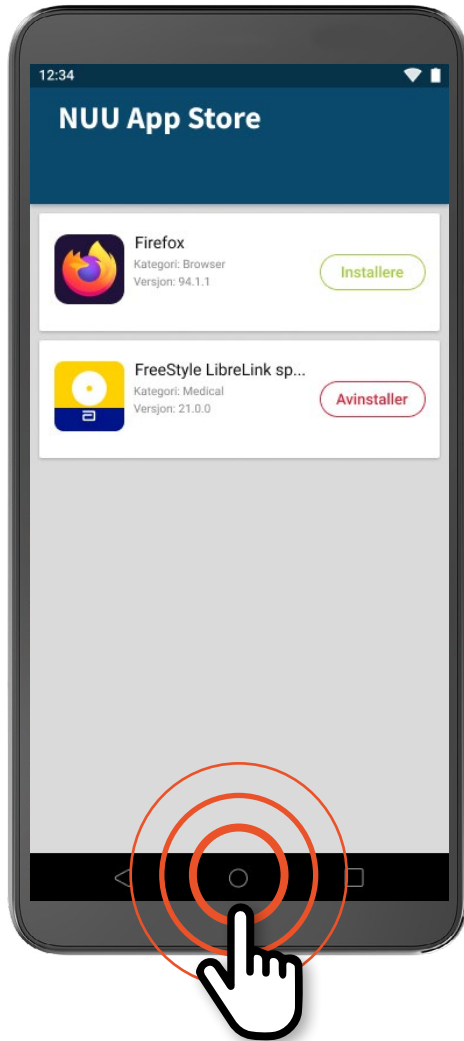


11. Når nedlasting av appen er fullført, **TRYKK** på sirkelknappen i Android.

Merk: Når installeringen av appen er fullført, forsvinner den grønne linjen, og den grønne Installer-knappen blir rød med teksten «Avinstaller».

Deretter vises appikonet for FreeStyle LibreLink Special Edition Appen på startskjermen for enheten.


Trinn 2: Konfigurering av FreeStyle LibreLink Special Edition Appen

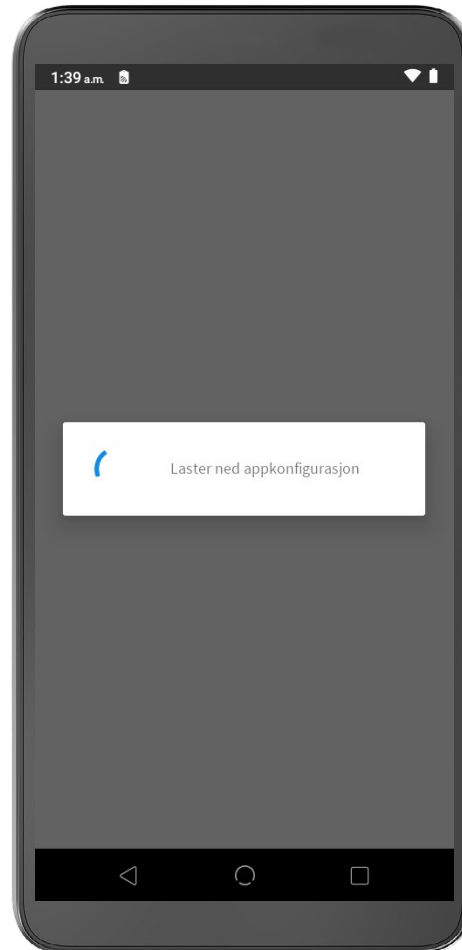

- 1. TRYKK** på appikonet for FreeStyle LibreLink Special Edition Appen.
Vent på at appen lastes inn.
Vær oppmerksom på at Wi-Fi fortsatt er påkrevd.
Dette kan ta noe tid, avhengig av hastigheten på internettilkoblingen.

Trinn 2: Konfigurering av FreeStyle LibreLink Special Edition Appen (forts.)

2. For å starte appen finnes det tre alternativer:

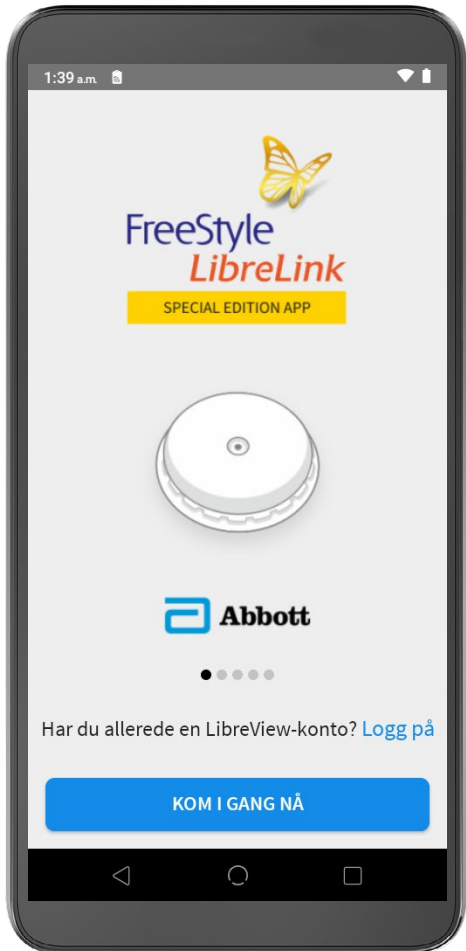

A. Opprette en konto i LibreView¹ for å dele glukoseinformasjon med helsepersonalet, slik at informasjonen automatisk er tilgjengelig² før besøk på kontoret (anbefalt alternativ). Hvis brukeren ikke har en e-postadresse eller ikke vil opprette en LibreView konto, kan brukeren komme i gang uten en LibreView konto. Se **Alternativ C** i tillegget.

B. **LOGGE INN** med e-postadressen for en eksisterende LibreView konto. (Se siden i tillegget.)

C. Bruke appen uten en LibreView konto. (Se siden i tillegget.)


Fortsett å følge instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurering av appen. Når appen er konfigurert, er det ikke påkrevd med en internettilkobling for å sjekke glukoseavlesinger.

1. Nettstedet til LibreView er kun kompatibelt med enkelte operativsystemer og nettleisere. Se www.libreview.com for ytterligere informasjon. 2. Automatisk opplasting av glukoseinformasjon fra appen FreeStyle LibreLink Special Edition krever registrering i LibreView og en trådløs internettilkobling.

Alternativ A: Opprette en ny LibreView¹ konto




1. TRYKK på KOM I GANG NÅ for å komme i gang.

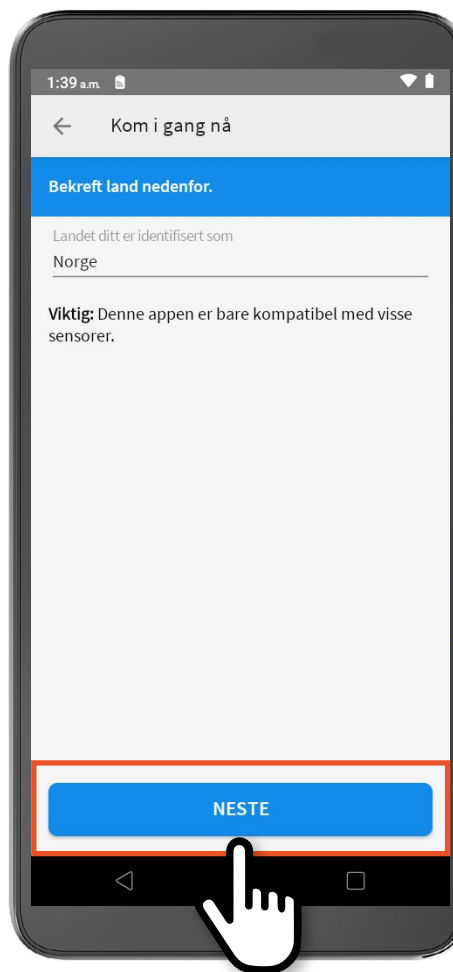


2. TRYKK på NESTE for å bekrefte land.

Alternativ A: Opprette en ny LibreView¹ konto (forts.)

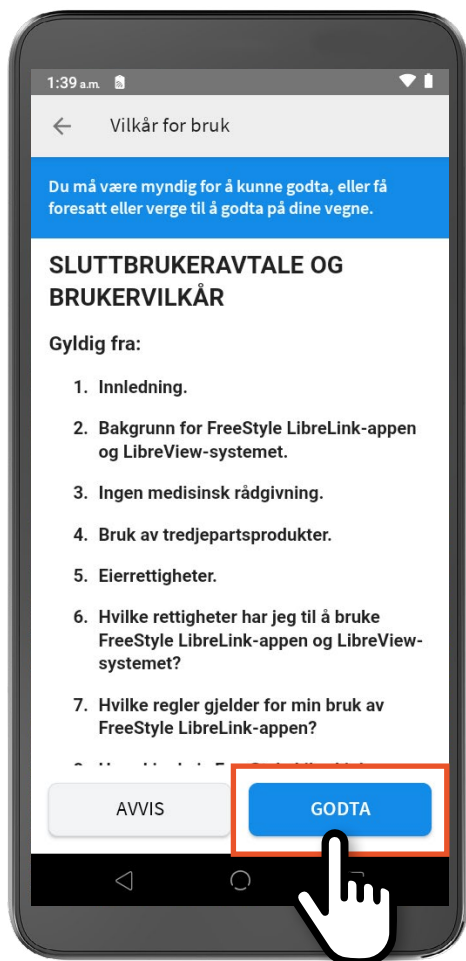


3. Les Vilkår for bruk og **TRYKK** på GODTA for å godta Vilkår for bruk.

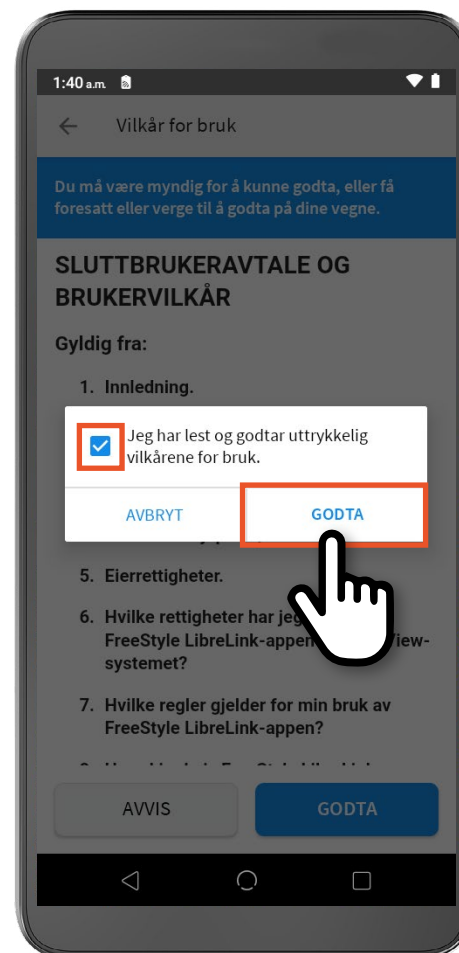


4. **TRYKK** på boksen for å krysse av, og **TRYKK** på GODTA.

Alternativ A: Opprette en ny LibreView¹ konto (forts.)

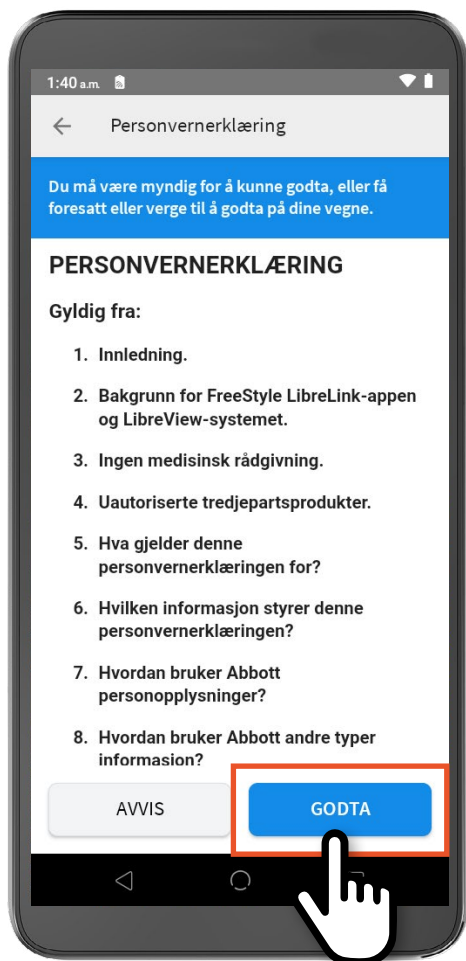


5. Les Personvernerklæring og **TRYKK** på **GODTA** for å godta personvernerklæringen.

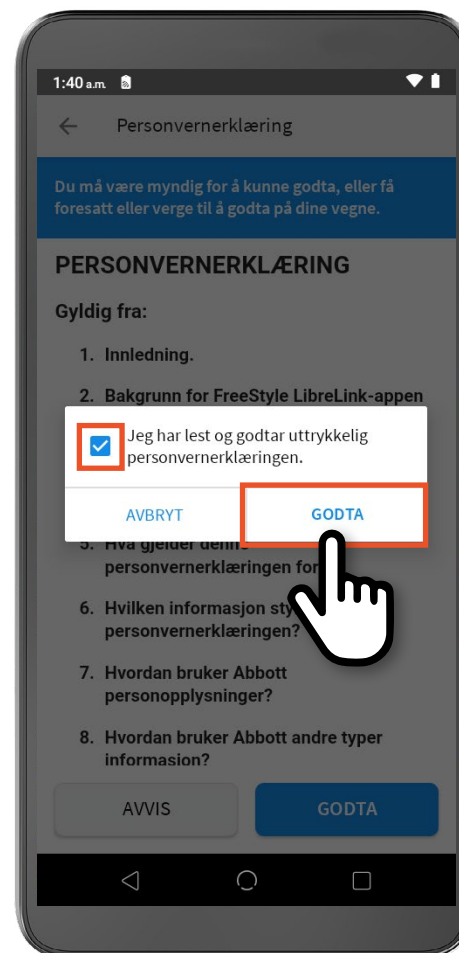

6. **TRYKK** på boksen for å krysse av, og **TRYKK** på **GODTA**.

Alternativ A: Opprette en ny LibreView¹ konto (forts.)

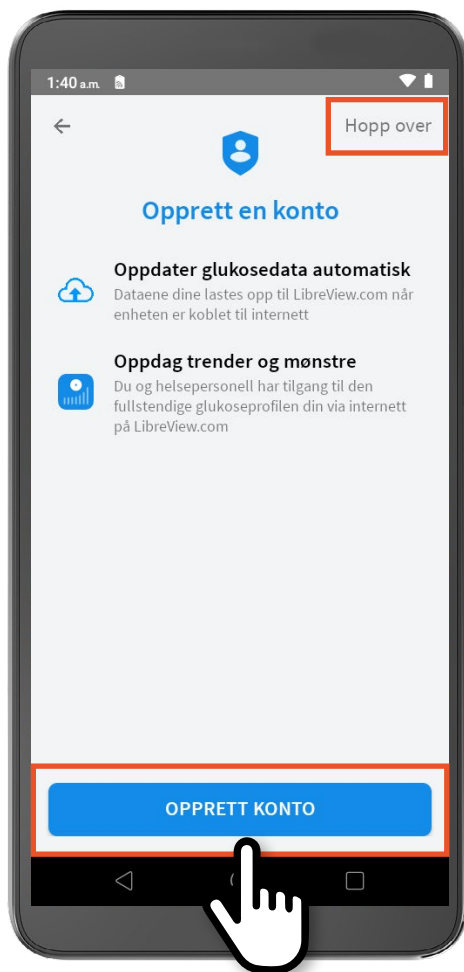

7. TRYKK på **OPPRETT KONTO** for å konfigurere en ny konto og gå videre til trinn 8. Eller, **TRYKK** på Hopp over for å bruke appen uten en LibreView¹ konto.

Hvis brukeren ikke har en e-postadresse eller ikke vil opprette en LibreView konto, kan brukeren komme i gang uten en LibreView¹ konto ved å trykke på Hopp over. Se **Alternativ C** i tillegg.




8. TRYKK på Fornavn og angi fornavn.


TRYKK på Etternavn og angi etternavn.

TRYKK på fødselsdato eller **TRYKK** på pilen.

Alternativ A: Opprette en ny LibreView¹ konto (forts.)

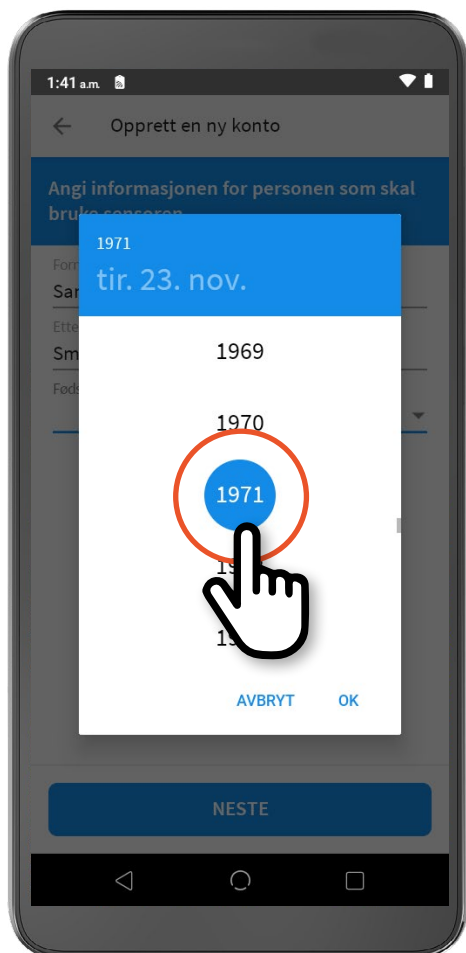


9. Sveip opp eller ned for å finne fødselsåret, **TRYKK** på fødselsåret.

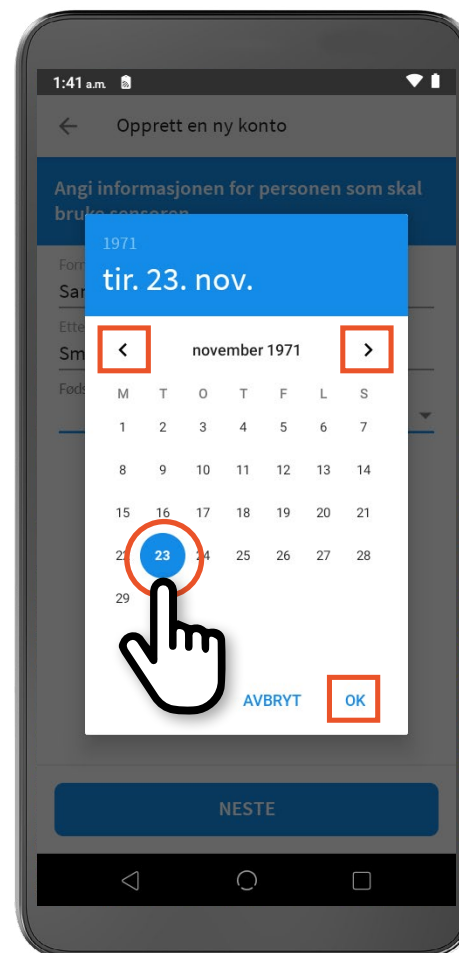


10. **TRYKK** på pilene for måneden og **TRYKK** på datoen. **TRYKK** på OK.

Alternativ A: Opprette en ny LibreView¹ konto (forts.)

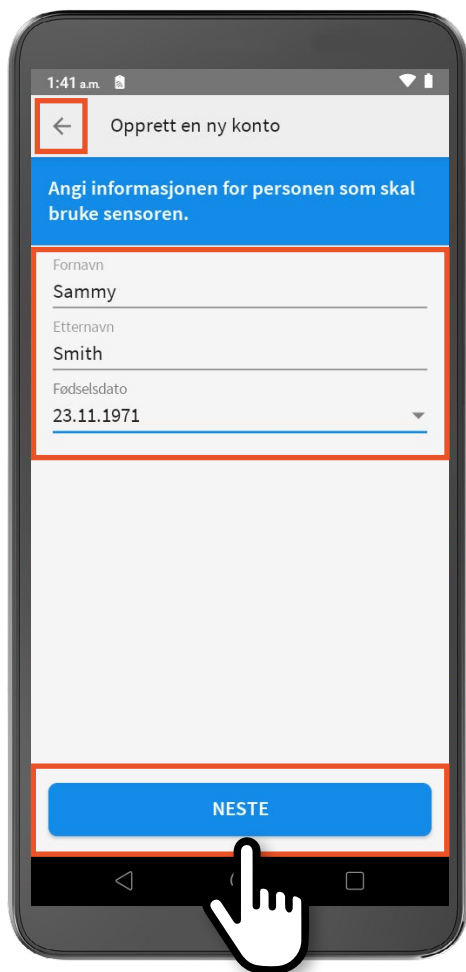

11. Hvis brukeren gjør en feil, kan brukeren **TRYKKE** på nytt eller **TRYKKE** på tilbake-pilen. **TRYKKE** på NESTE for å fortsette.

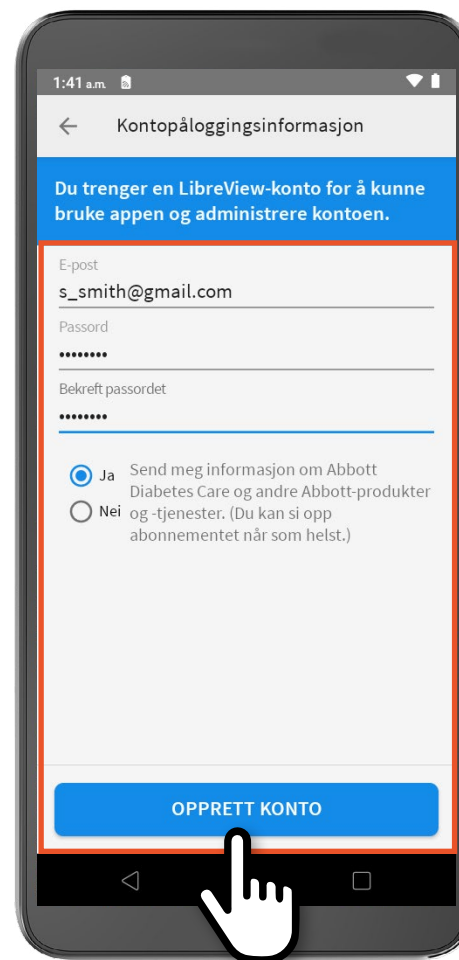


12. **TRYKK** på E-post og angi e-postadresse. **TRYKK** på Passord og angi passord. **TRYKK** på Bekreft passord og angi passord på nytt. **TRYKK** på alternativet for om brukeren ønsker å motta informasjon fra Abbott. **TRYKK** på OPPRETT KONTO.

Alternativ A: Opprette en ny LibreView¹ konto (forts.)




13. TRYKK på NESTE for å bekrefte land og måleenhet.

Trinn 3: Start av en ny sensor med appen

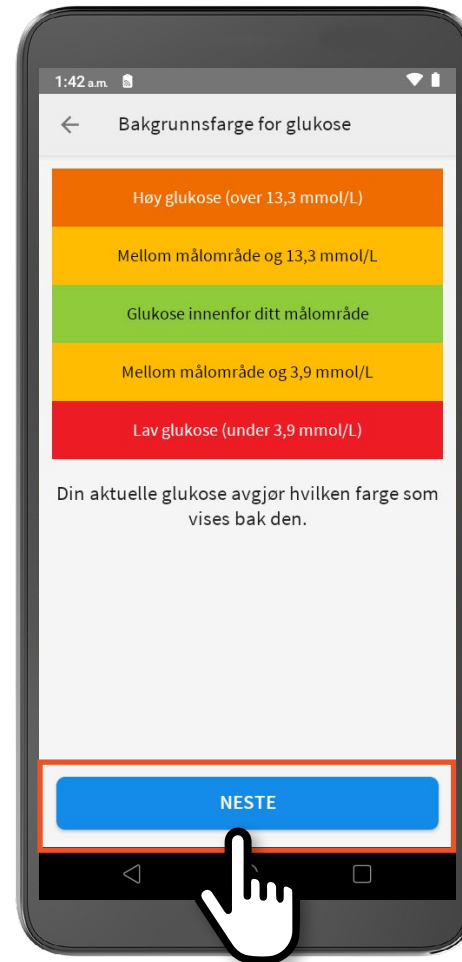

TRYKK på NESTE for å starte veiledningen for appen, slik at brukerne kan forstå glukoseavlesingene. Les gjennom veiledningen ved å trykke på NESTE. **TRYKK** deretter på FULLFØRT for å fullføre veiledningen.

Trinn 3: Start av en ny sensor med appen (forts.)

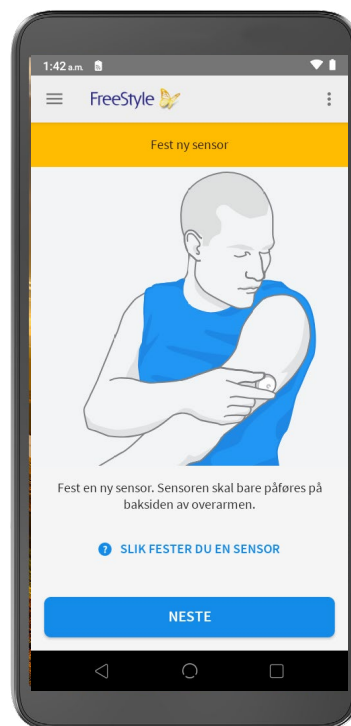

Følg de samme trinnene hver gang du skanner sensoren med appen.


1. Etter å ha festet en ny sensor på baksiden av overarmen,
 - A. Hold midten av baksiden av A5X for å begynne å **SKANNE** sensoren. Brukeren må kanskje flytte midten av enheten over sensoren noen ganger for å finne riktig posisjon.
 - B. Når brukeren hører den første tonen eller vibrasjonen, fortsett å holde enheten på samme sted (ikke flytt den rundt) til brukeren hører den andre tonen eller vibrasjonen, som indikerer at sensoren har startet og enheten er klar til bruk.
 - C. Flytt enheten vekk fra sensoren etter den andre tonen eller vibrasjonen.

Trinn 3: Start av en ny sensor med appen (forts.)



2. Sensoren kan brukes til å kontrollere glukosen etter 60 minutter.

En nedtelling i appen indikerer hvor mye tid som gjenstår av de 60 minuttene.

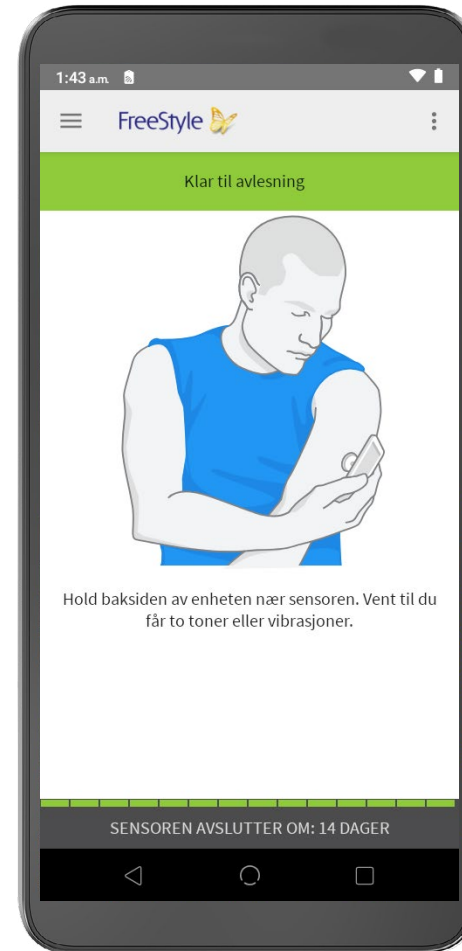


3. Etter at 60 minutter har gått, **SKANN** sensoren for å vite nåværende glukose. Det må skannes én gang hver 8. time for full glukosehistorikk.

Slik stiller du inn glukosealarmer og endrer målglukoseområdet




1. TRYKK på MENY-ikonet.

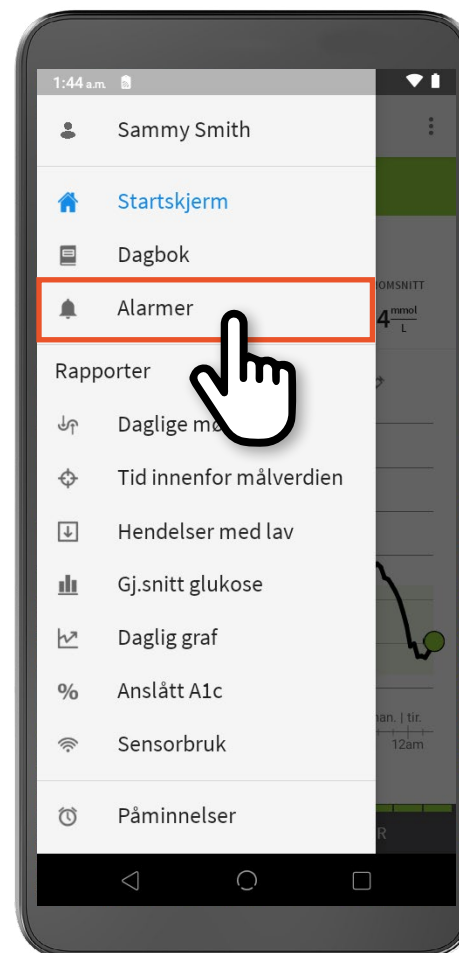


2. TRYKK deretter på ALARMER.

Slik stiller du inn glukosealarmer og endrer målglukoseområdet (forts.)

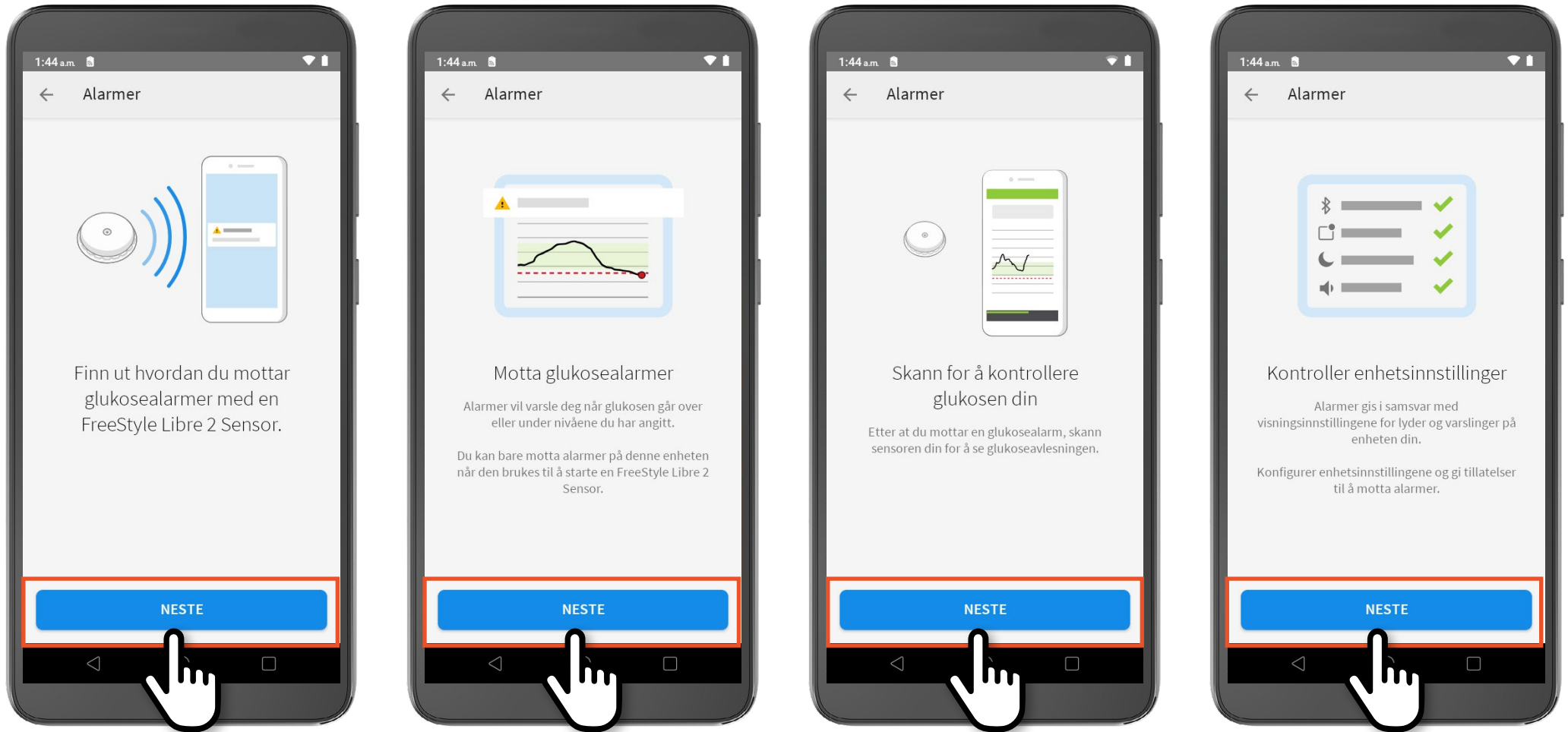

3. Les skjermbildene med veiledning for glukosealarmer og **TRYKK** på NESTE.

Slik stiller du inn glukosealarmer og endrer målglukoseområdet (forts.)

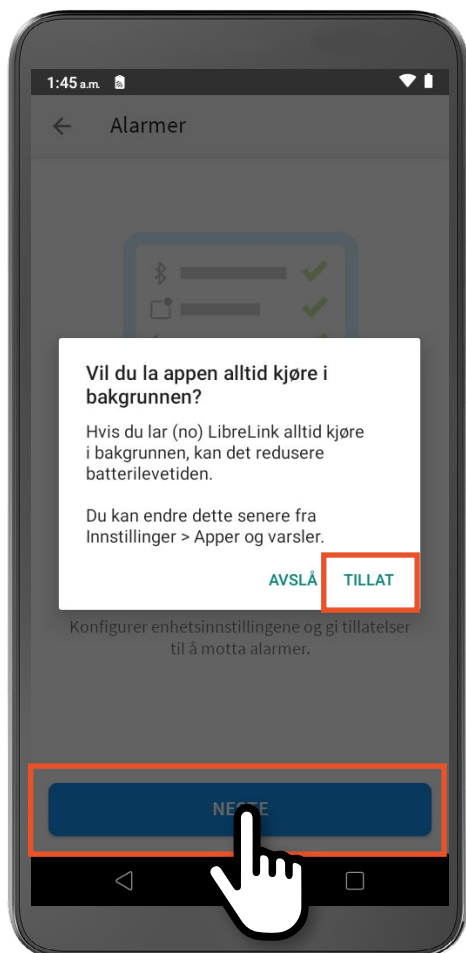

4. Bekreft at du godtar at appen kan kjøre i bakgrunnen ved å **TRYKKE** på TILLAT, og deretter **TRYKK** på NESTE.




5. Les veiledningen for Ikke forstyr og **TRYKK** på NESTE.

Slik stiller du inn glukosealarmer og endrer målglukoseområdet (forts.)



6. Bekreft innstillingen for Ikke forstyr ved å **TRYKKE** på NESTE.

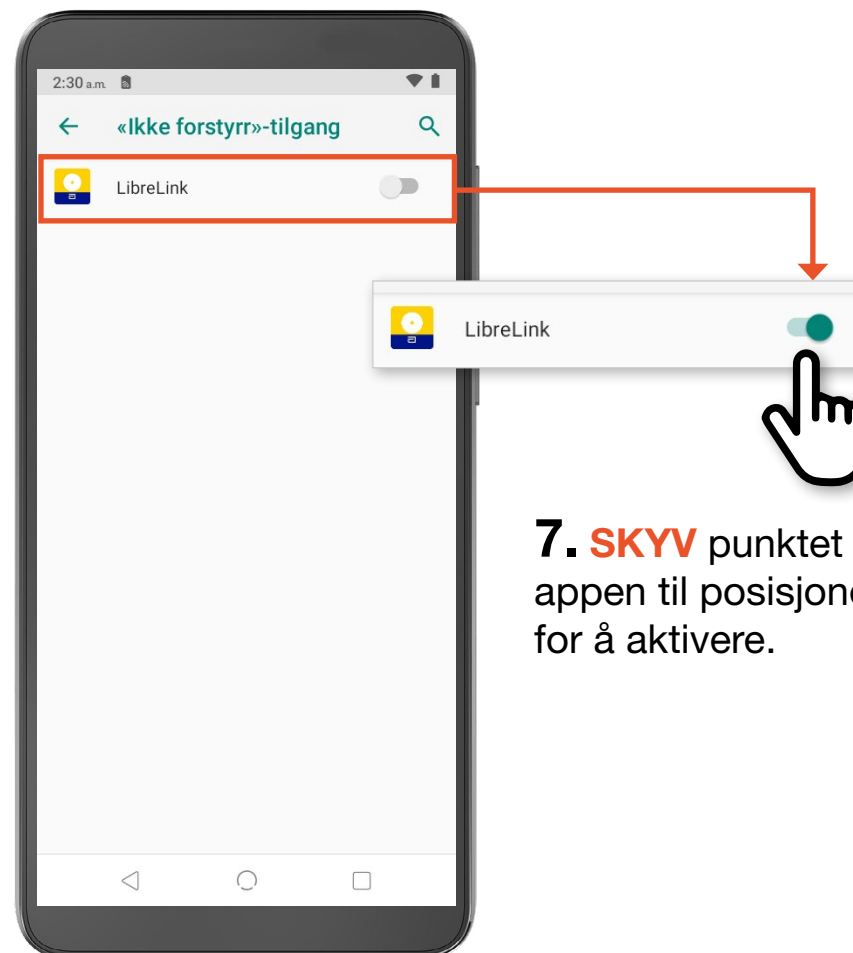

7. **SKYV** punktet for appen til posisjonen PÅ for å aktivere.

Slik stiller du inn glukosealarmer og endrer målglukoseområdet (forts.)




8. TRYKK deretter på TILLAT for å overstyre Ikke forstyrr.

Modusen «Ikke forstyrr» hindrer brukere i å få glukosealarmer hvis Ikke forstyrr er slått på. Godta overstyring av Ikke forstyrr for å få alarmer.

Trykk deretter på tilbake-knappen.

Slik stiller du inn glukosealarmer og endrer målglukoseområdet (forts.)

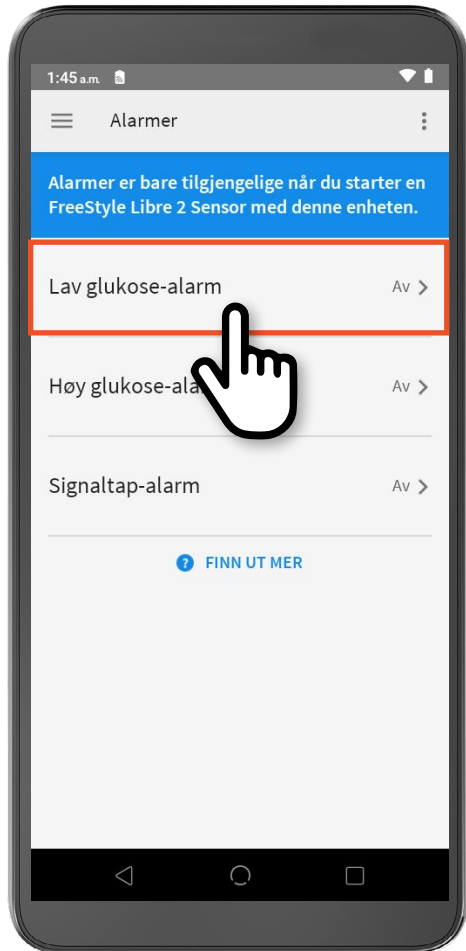

1. TRYKK på lav glukose-alarm.




2. SKYV punktet for å slå på lav glukose-alarm.

Slik stiller du inn glukosealarmer og endrer målglukoseområdet (forts.)




3. TRYKK på OK for å bekrefte at Signaltap-alarmer automatisk er slått på.

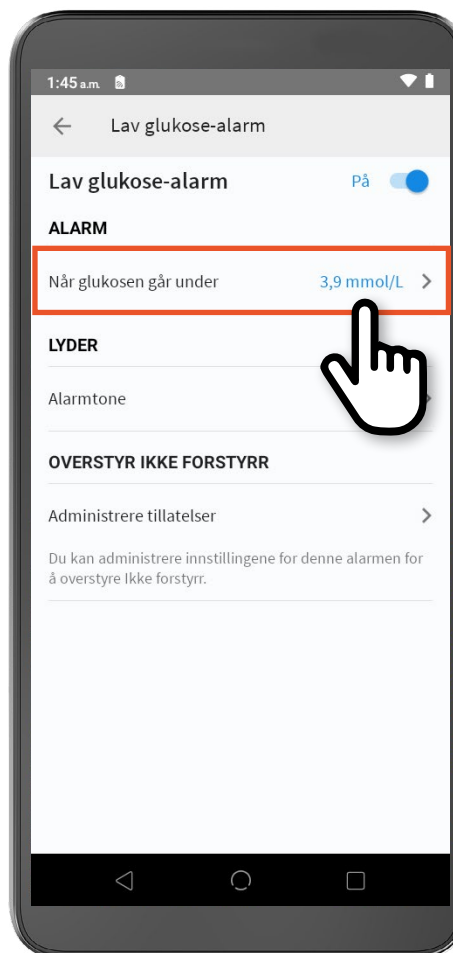

4. TRYKK på glukosegrensen for å bytte til en annen glukoseverdi.

Slik stiller du inn glukosealarmer og endrer målglukoseområdet (forts.)

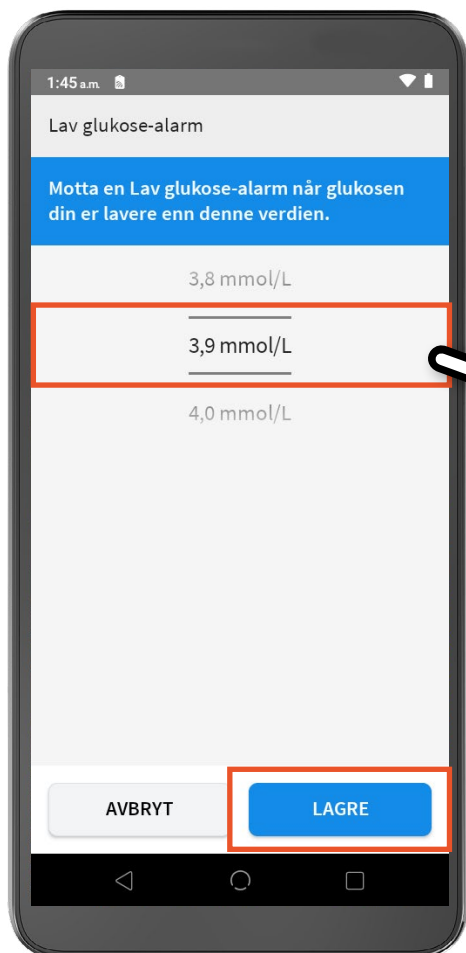

5. Sveip opp eller ned for å velge glukosegrense og **TRYKK** på LAGRE.

Slik stiller du inn glukosealarmer og endrer målglukoseområdet (forts.)


TIPS

Målglukoseområdet er satt mellom 3,9–10,0 mmol/L som standard.

Brukere kan endre dette ved behov.




1. På startskjermen, **TRYKK** på overflytmenyikonet (øverste høyre hjørne).

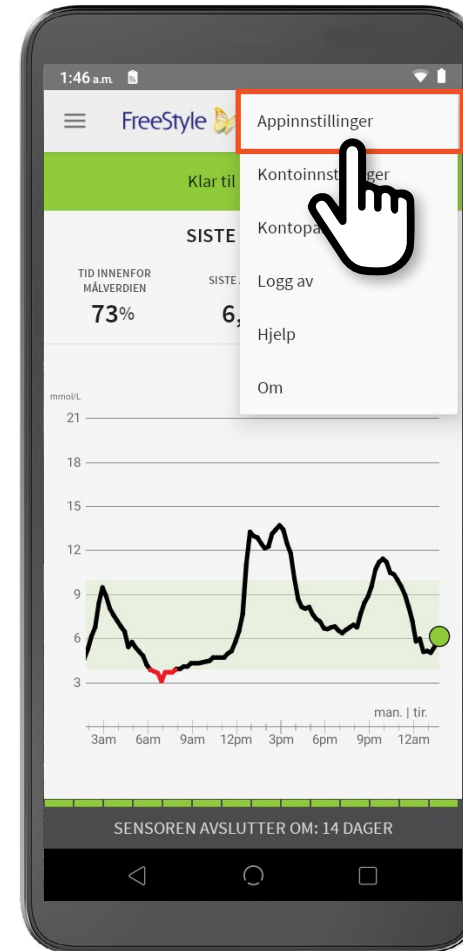

TRYKK på Appinnstillinger

Slik stiller du inn glukosealarmer og endrer målglukoseområdet (forts.)

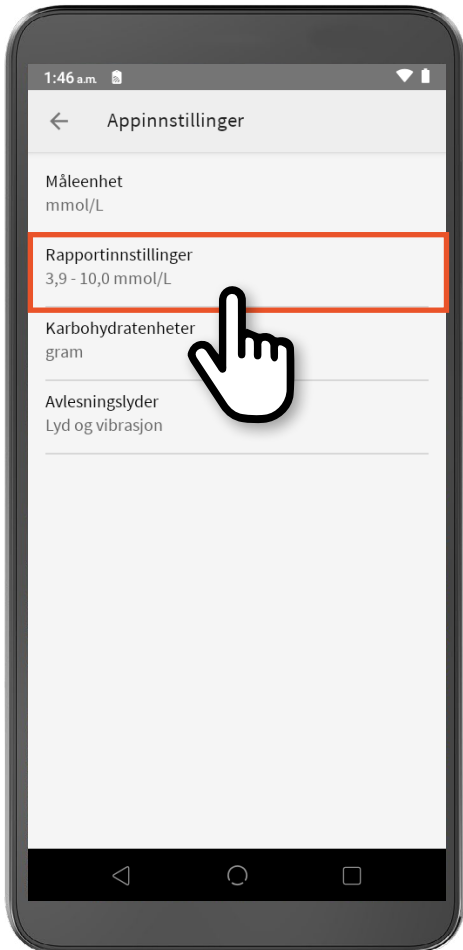


2. **TRYKK** på Rapportinnstillinger.



3. Målglukoseområdet er satt mellom 3,9–10,0 mmol/L som standard. Hvis brukeren vil endre det, sveip opp eller ned for å endre målglukoseområdet for glukoseverdier og **TRYKK** på LAGRE.

Bruk av A5X med FreeStyle LibreLink Special Edition Appen¹ i stedet for en avleser

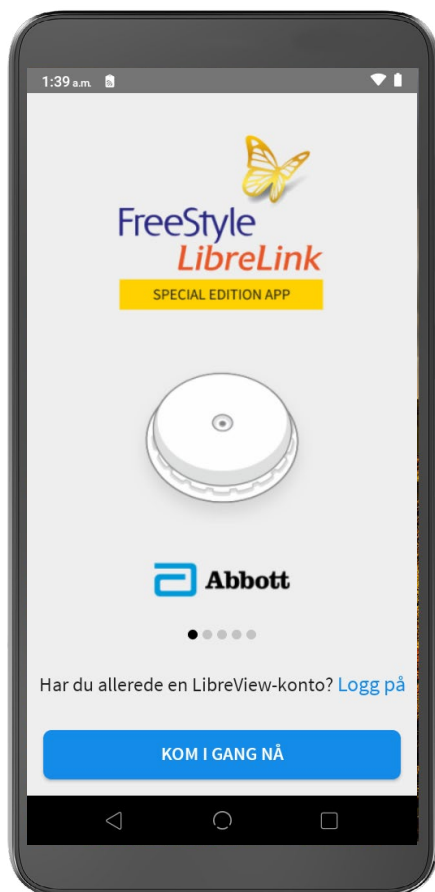

FreeStyle LibreLink Special Edition Appen er kompatibel med A5X enheten produsert av NUU Mobile og distribuert av Abbott.

FreeStyle LibreLink Special Edition Appen er for brukere med FreeStyle Libre/FreeStyle Libre 2 som ikke har en avleser eller en smarttelefon som er kompatibel med appen FreeStyle LibreLink.

FreeStyle LibreLink Special Edition Appen kan sammenlignes med en avleser, med muligheten for å skanne sensorer og få glukoseavlesinger, og kan brukes uten en internettilkobling etter at appen er konfigurert.

Ring kundeservice på **+47 800 87 100** hvis du har spørsmål. Åpningstiden er kl. 09:00 til kl. 15:00 på alle hverdager.



Hvorfor stikke² når du kan skanne?

1. Appen FreeStyle LibreLink Special Edition er for øyeblikket bare kompatibel med A5X enheten. **2.** Fingerstikk er nødvendig dersom glukoseavlesinger [og -alarmer] ikke samsvarer med symptomer eller forventninger. FreeStyle, Libre og relaterte varemerker eies av Abbott. Andre varemerker tilhører de respektive eierne.



FreeStyle
LibreLink

SPECIAL EDITION APP


VEDLEGG



Alternativ B: Logg inn på en eksisterende LibreView¹ konto




1. TRYKK på Logg på for å komme i gang.

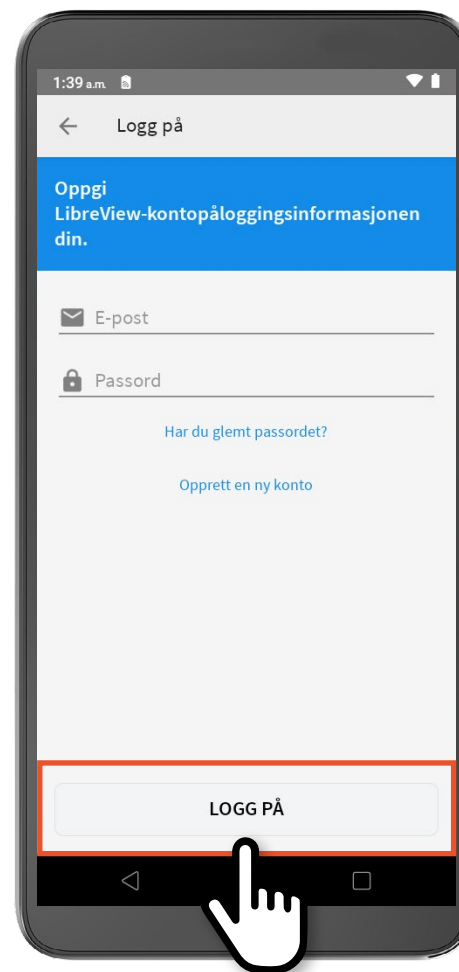


2. Angi e-postadresse og passord for LibreView. **TRYKK** på LOGG PÅ.

Alternativ B: Logg inn på en eksisterende LibreView¹ konto (forts.)

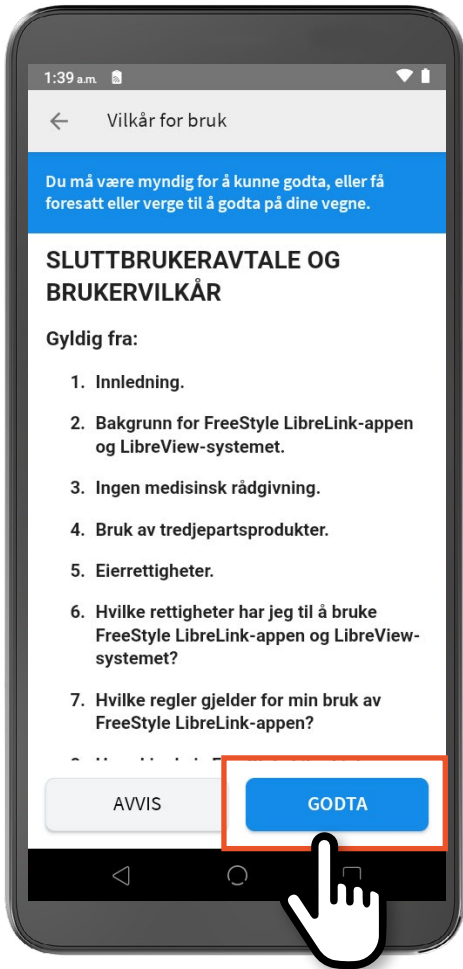


3. Les Vilkår for bruk og **TRYKK** på GODTA for å godta Vilkår for bruk.

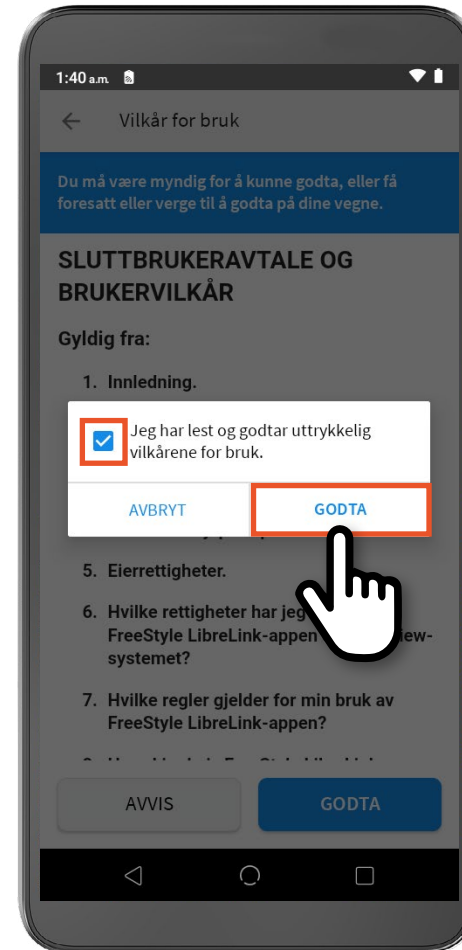


4. **TRYKK** på boksen for å krysse av, og **TRYKK** på GODTA.

Alternativ B: Logg inn på en eksisterende LibreView¹ konto (forts.)

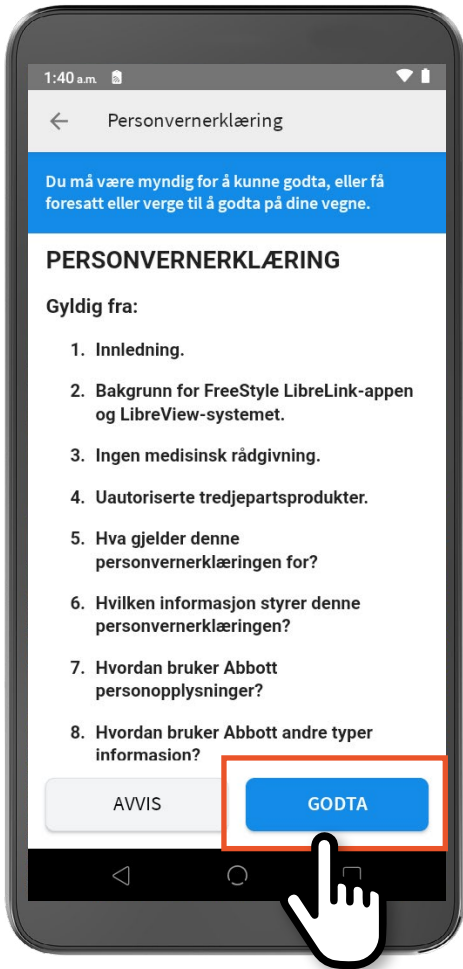

5. Les Personvernerklæring og **TRYKK** på **GODTA** for å godta personvernerklæringen.

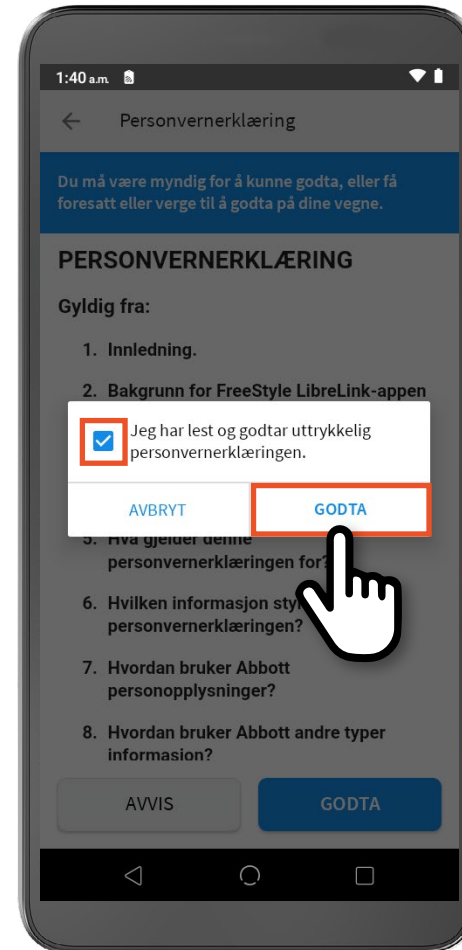


6. **TRYKK** på boksen for å krysse av, og **TRYKK** på **GODTA**.

Alternativ B: Logg inn på en eksisterende LibreView¹ konto (forts.)




7. TRYKK på NESTE for å bekrefte land og måleenhet.

Alternativ B: Logg inn på en eksisterende LibreView¹ konto (forts.)

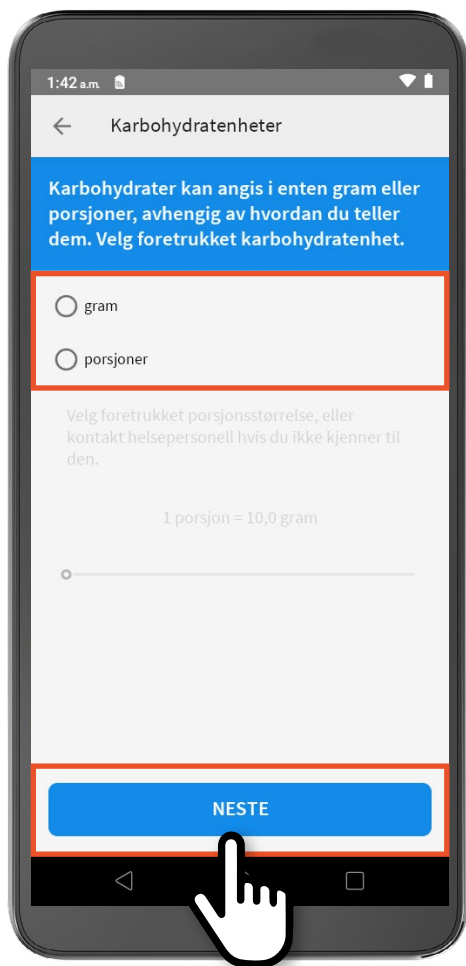

8. TRYKK på ønsket enhet for karbohydrater. **TRYKK** på NESTE.

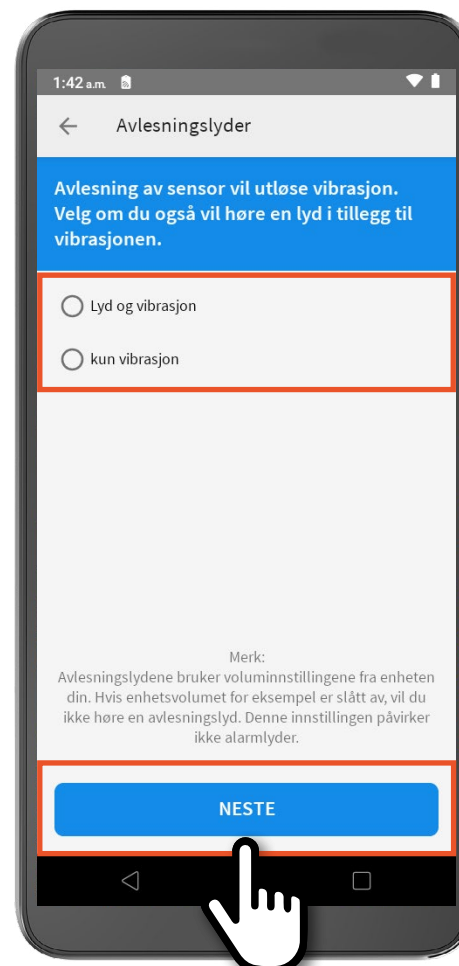


9. TRYKK på ønsket avlesningslyd. **TRYKK** på NESTE.

Alternativ C: Bruk FreeStyle LibreLink Special Edition Appen i kontoløs modus, Wi-Fi er ikke påkrevd




1. TRYKK på KOM I GANG NÅ for å komme i gang.

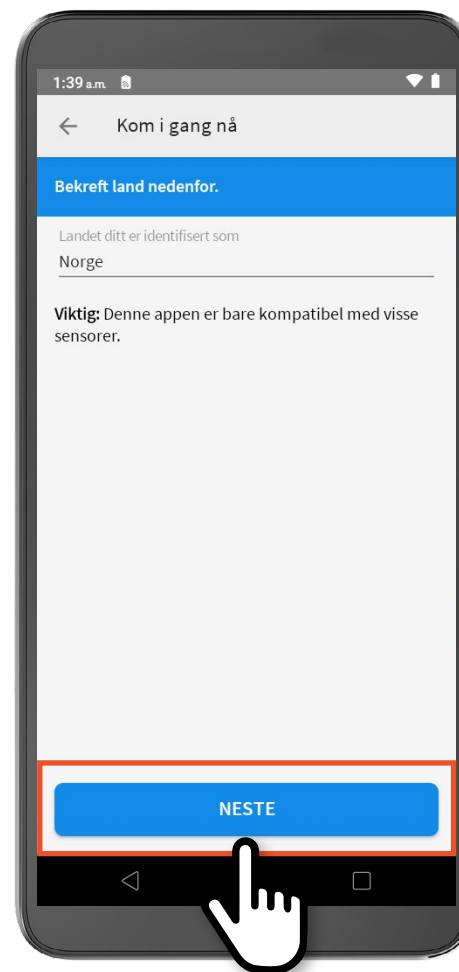


2. TRYKK på NESTE for å bekrefte land.

Alternativ C: Bruk FreeStyle LibreLink Special Edition Appen i kontoløs modus, Wi-Fi er ikke påkrevd (forts.)

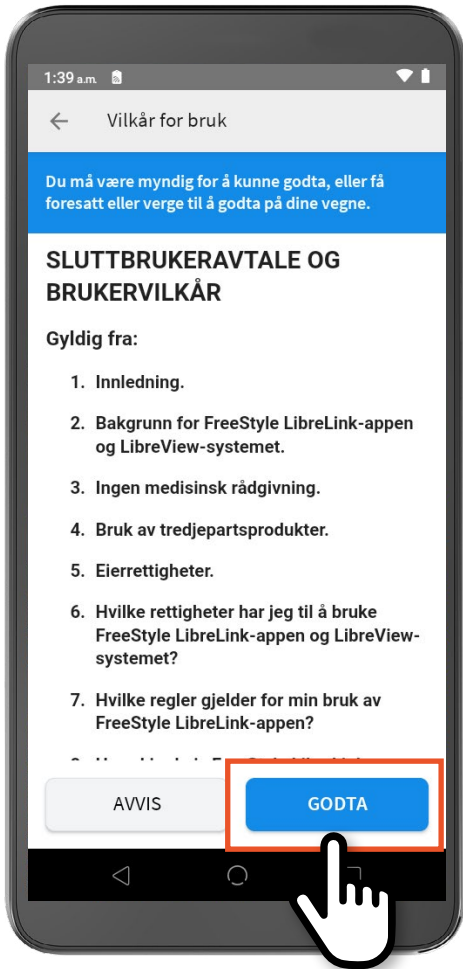


3. Les Vilkår for bruk og **TRYKK** på GODTA for å godta Vilkår for bruk.

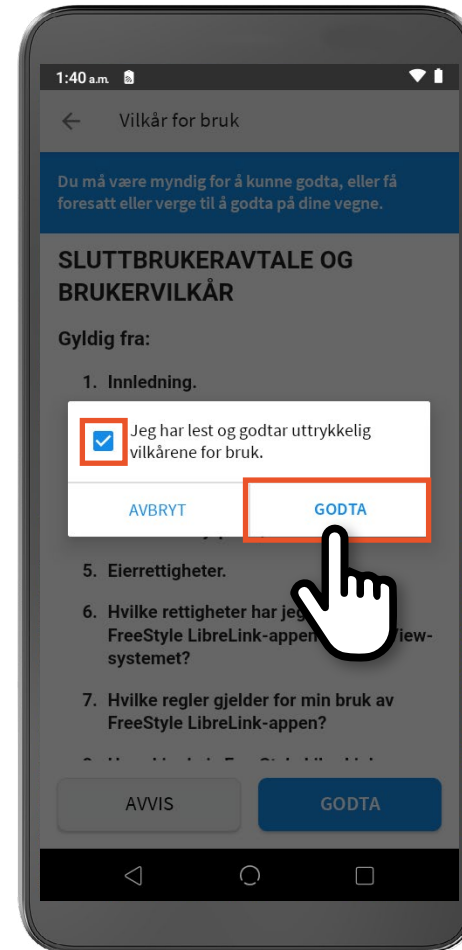


4. **TRYKK** på boksen for å krysse av, og **TRYKK** på GODTA.

Alternativ C: Bruk FreeStyle LibreLink Special Edition Appen i kontoløs modus, Wi-Fi er ikke påkrevd (forts.)

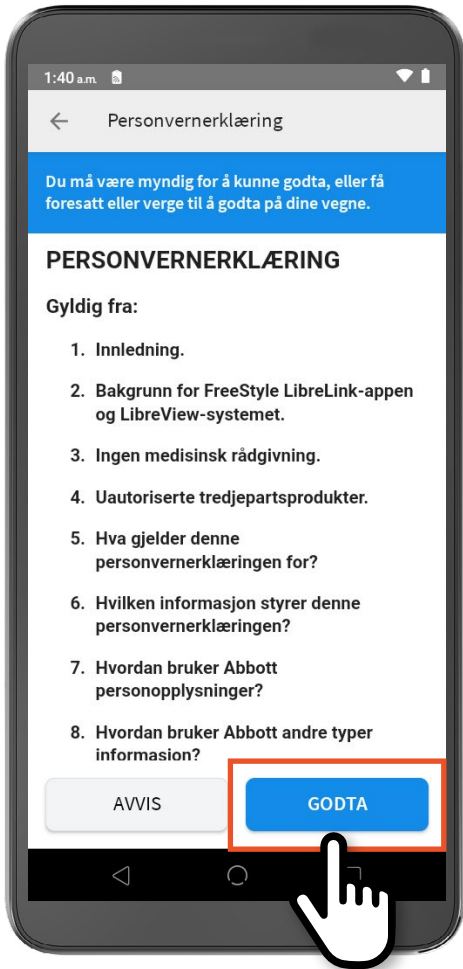


5. Les Personvernerklæring og **TRYKK** på **GODTA** for å godta personvernerklæringen.

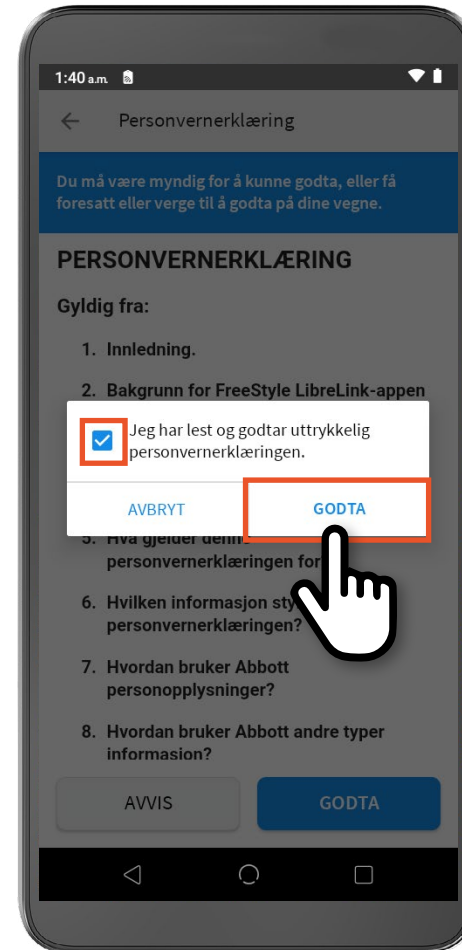


6. **TRYKK** på boksen for å krysse av, og **TRYKK** på **GODTA**.

Alternativ C: Bruk FreeStyle LibreLink Special Edition Appen i kontoløs modus, Wi-Fi er ikke påkrevd (forts.)

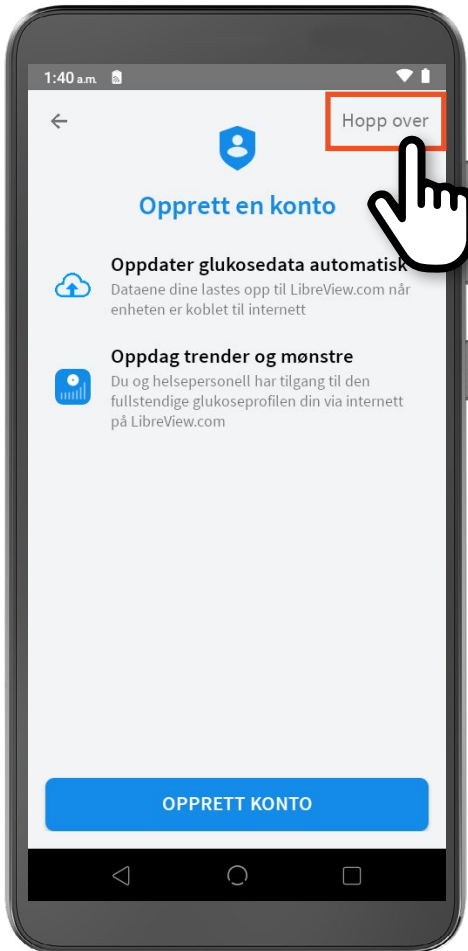

7. **TRYKK** på Hopp over for å fortsette uten å opprette en ny LibreView konto.

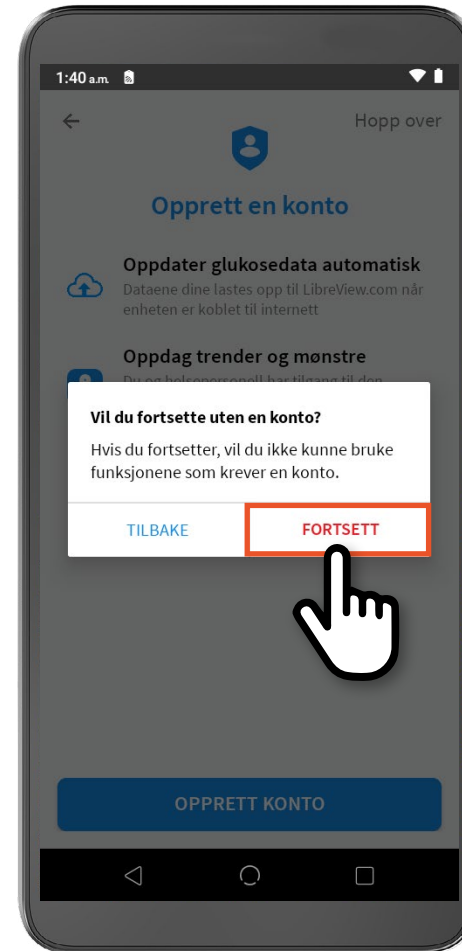


8. **TRYKK** på FORTSETT for å bekrefte.

Alternativ C: Bruk FreeStyle LibreLink Special Edition Appen i kontoløs modus, Wi-Fi er ikke påkrevd (forts.)




9 TRYKK på NESTE for å bekrefte land og måleenhet.

Alternativ C: Bruk FreeStyle LibreLink Special Edition Appen i kontoløs modus, Wi-Fi er ikke påkrevd (forts.)

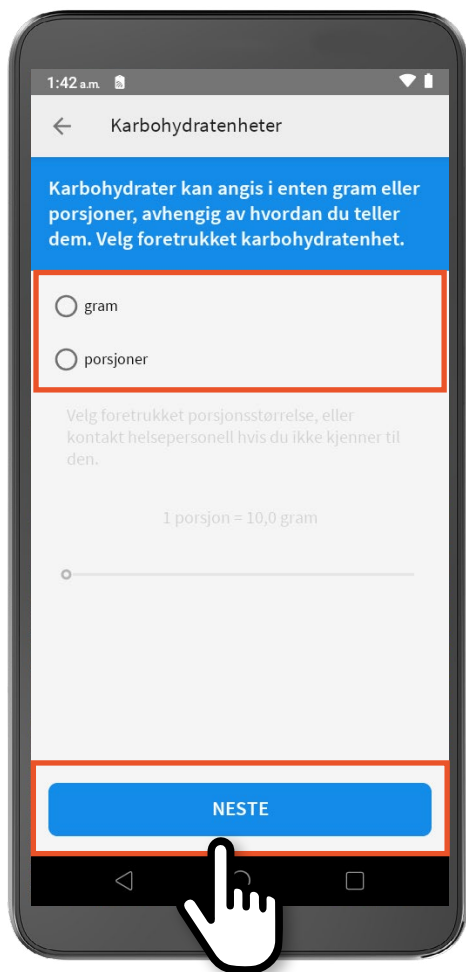

10. TRYKK på ønsket enhet for karbohydrater. **TRYKK** på NESTE.

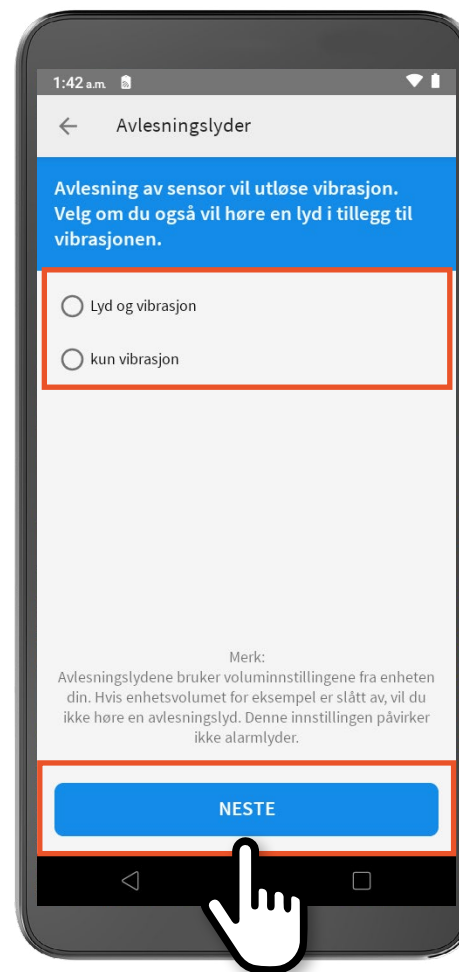

11. TRYKK på ønsket avlesningslyd. **TRYKK** på NESTE.