



القوة في التحكم

فري ستايل ليبري لينك¹ - تعرف على كيف يمكن لتطبيق واحد الاتصال بمنصة رقمية تساعدك على التحكم في مرض السكري بشكل أفضل


**فري ستايل
ليبري لينك**
نظام فلاش لمراقبة الجلوكوز


life. to the fullest.
Abbott

1. تطبيق فري ستايل ليبري لينك يتوافق مع أجهزة هواتف وأنظمة تشغيل معينة. الرجاء زيارة الموقع لمعلومات إضافية حول الأجهزة المتوافقة قبل الشروع بالاستخدام. يتطلب استخدام LibreLink FreeStyle LibreView التسجيل في LibreView. التحميل التلقائي يتطلب اتصال إنترنت لاسلكي أو اتصال بيانات محمول. البيانات المُحاكاة للأغراض التوضيحية فقط. ولا تعود إلى مريض حقيقي أو تُعد بيانات حقيقية. الصور للأغراض التوضيحية فقط. وليست لمريض أو أخصائي رعاية صحية حقيقي.

كل شيء يبدأ بمجس فري ستايل ليبري: ١٤ يوماً من المراقبة المستمرة للجلوكوز بدون وخز.^١

هذا المجس الدقيق^٢ الصغير والغير ملحوظ يخلصك من متاعب مراقبة الجلوكوز.



يسهل وضعه على الجسم ومريح اثناء ارتدائه^٣ ومقاوم للماء^٤ لمدة تصل إلى ١٤ يوماً.



يوضح لك تأثير الدواء والطعام والنشاط البدني على مستويات الجلوكوز.




فري ستايل
ليبري لينك
نظام فاش لمراقبة الجلوكوز

١. هناك حاجة لإجراء وخز الإصبع إذا كانت القراءات لا تتوافق مع الأعراض أو التوقعات. ٢. هذا المجس الدقيق الصغير والغير ملحوظ يخلصك من متاعب مراقبة الجلوكوز. ٣. Alva, S., Journal of Diabetes Science and Technology (2020): <https://doi.org/10.1177/1932296820958754>. ٤. المجس مقاوم للماء لما يصل إلى عمق ٣ أقدام (من الماء، لا تغمره لمدة أطول من ٣٠ دقيقة، لا يجوز استخدامه فوق ١٠٠٠ قدم، الصور للأغراض التوضيحية فقط، وليست لمرضى أو أخصائي رعاية صحية حقيقي.

مجس فري ستايل ليبري والحلول الصحية الرقمية تعمل معاً لدعمك

ليبري لنك آب



تطبيق يتيح لأحبائك متابعة قراءات الجلوكوز لديك بإذنا سمحت أنت بذلك^٤

ليبري ثيو



نظام سحابي^٣ يمكّن طبيبك من الوصول إلى التقارير إذا سمحت أنت بذلك

فري ستايل ليبري لينك



بدلاً من القاريء، يمكنك استخدام تطبيق فري ستايل ليبري لينك^٢ لفحص الجلوكوز عن طريق المسح

مجس فري ستايل ليبري



يقيس تلقائياً بيانات الجلوكوز لديك لمدة تصل إلى ١٤ يوماً^١



نظام فاش لمراقبة الجلوكوز

١. للحصول على صورة مكتملة لمستويات الجلوكوز، يجب فحص المحس مرة كل (٨) ساعات. ٢. تطبيق فري ستايل ليبري لينك يتوافق مع أجهزة هواتف وأنظمة تشغيل معينة. الرجاء زيارة الموقع لمعلومات إضافية حول الأجهزة المتوافقة قبل الشروع بالاستخدام. يتطلب استخدام FreeStyle LibreLink التسجيل في LibreView. ٣. إن موقع ليبري ثيو يتوافق مع أنظمة تشغيل ومتصفحات إنترنت معينة فقط. لأي معلومات إضافية، الرجاء زيارة الموقع: www.LibreView.com. ٤. تطبيق LibreLinkUp متوافق فقط مع بعض الأجهزة المحمولة وأنظمة التشغيل. يرجى مراجعة www.LibreLinkUp.com لمزيد من المعلومات حول توافق الجهاز قبل استخدام التطبيق. يتطلب استخدام LibreLinkUp و FreeStyle LibreLink التسجيل في LibreView. لا يُقصد بتطبيق LibreLinkUp المحمول أن يكون جهاز مراقبة الجلوكوز الأساسي؛ يجب على المستخدمين المنزليين استشارة أجهزتهم الأساسية واستشارة أخصائي الرعاية الصحية قبل إجراء أي تفسير طبي وتعديلات علاجية من المعلومات التي يوفرها التطبيق. البيانات المُحاكاة للأغراض التوضيحية فقط. ولا تعود إلى مريض حقيقي أو تُعد بيانات حقيقية. الصور للأغراض التوضيحية فقط. وليست لمريض أو أخصائي رعاية صحية حقيقي.

منصة رقمية متكاملة خاصة بفري ستايل ليبري يمكنك من إدارة أفضل لمرض السكري

ليبري فيو

شارك قراءات الجلوكوز لديك مع فريقك الطبي لاستشارات أكثر فعالية.^٤



فري ستايل
ليبري لينك
نظام فلاش لمراقبة الجلوكوز

تطبيق واحد يمكنك من متابعة ومشاركة قراءات الجلوكوز الخاصة بك!


ليبري لنك آب

شارك مستويات الجلوكوز لديك مع أحبائك لتتعم براحة البال.^{٦,٥}



١. تطبيق فري ستايل ليبري لينك يتوافق مع أجهزة هواتف وأنظمة تشغيل معينة. الرجاء زيارة الموقع لمعرفة معلومات إضافية حول الأجهزة المتوافقة قبل الشروع بالاستخدام. يتطلب استخدام LibreLink FreeStyle LibreLink التسجيل في LibreView. التحميل التلقائي يتطلب اتصال إنترنت لاسلكي أو اتصال بيانات محمول. ٢. www.LibreView.com
٣. Unger, J., Postgrad Med. (2020): <https://doi.org/00325481.2020.1744393/10.1080>.
٤. Haak, T., Diabetes Ther. (2017): <https://doi.org/10.1007/s6-0223-016-13300>.
٥. تطبيق LibreLinkUp متوافق فقط مع بعض الأجهزة المحمولة وأنظمة التشغيل. يرجى مراجعة www.LibreLinkUp.com لمزيد من المعلومات حول توافق الجهاز قبل استخدامه. يتطلب استخدام LibreLinkUp و LibreLink FreeStyle LibreLink التسجيل في LibreView. لا يُقصد بتطبيق LibreLinkUp المحمول أن يكون جهاز مراقبة الجلوكوز الأساسي. يجب على المستخدمين المنزليين استشارة أجهزتهم الأساسية واستشارة أخصائي الرعاية الصحية قبل إجراء أي تفسير طبي وتعديلات علاجية من المعلومات التي يوفرها التطبيق. ٦. Edge, J., Arch Dis Child. (2017): <https://doi.org/10.1136/archdischild311530-2016>.
البيانات المُحاكاة للأغراض التوضيحية فقط. ولا تعود إلى مريض حقيقي أو تُعد بيانات حقيقية. الصور للأغراض التوضيحية فقط. وليست لمريض أو أخصائي رعاية صحية حقيقي.

فري ستايل ليبري لينك^١ - تطبيق واحد لمراقبة ومشاركة سهولة

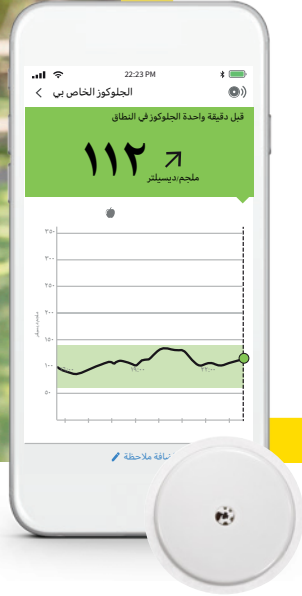

بعد الحصول على إذن منك، يمكن تحميل بيانات الجلوكوز تلقائيًا^٤ حتى يتمكن طبيبك من معاينته التقارير عن بُعد.



يمكنك مشاركة بيانات الجلوكوز بسهولة مع أحبائك وفريق الرعاية الصحية لاتخاذ قرارات أفضل معًا.



يمكنك فحص الجلوكوز في أي وقت^٢، في أي مكان^٣ - بعد تحميل التطبيق، لا يلزم الاتصال بالإنترنت.




تتبع أنماط الجلوكوز طوال الوقت، لإدارة أفضل لمرض السكري



فري ستايل
ليبري لينك
نظام فاش لمراقبة الجلوكوز

١. تطبيق فري ستايل ليبري لينك يتوافق مع أجهزة هواتف وأنظمة تشغيل معينة. الرجاء زيارة الموقع لمعلومات إضافية حول الأجهزة المتوافقة قبل الشروع بالاستخدام. يتطلب استخدام FreeStyle LibreLink التسجيل في LibreView. التحميل التلقائي يتطلب اتصال إنترنت لاسلكي أو اتصال بيانات محمول. ٢. يتطلب المحسّن فترة إجماع لمدة ٦-١٠ دقائق عند التطبيق. ٣. المحسّن مقاوم للماء لما يصل إلى عمق ١ متر (٣ أقدام) من الماء. لا تغمره لمدة أطول من ٣٠ دقيقة. لا يجوز استخدامه فوق ١٠٠٠ قدم. ٤. يتطلب استخدام FreeStyle LibreLink التسجيل في LibreView. التحميل التلقائي يتطلب اتصال إنترنت لاسلكي أو اتصال بيانات محمول. البيانات المحاكاة للأغراض التوضيحية فقط. ولا تعود إلى مريض حقيقي أو تُعد بيانات حقيقية. الصور للأغراض التوضيحية فقط. وليست لمريض أو أخصائي رعاية صحية حقيقي.

تعرف على تأثير الدواء والطعام والنشاط البدني على مستويات الجلوكوز لديك

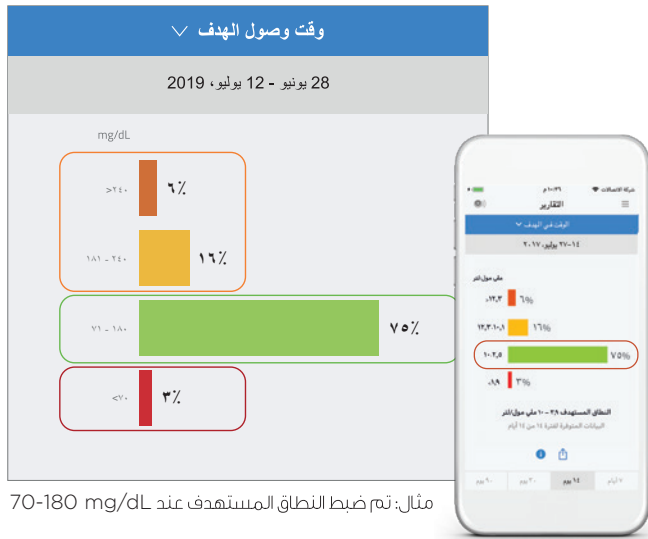

الوقت في النطاق المستهدف - تقرير يوضح النسبة المئوية للوقت الذي كانت فيه قراءات الجلوكوز أعلى أو ضمن أو أقل من نطاق الجلوكوز المستهدف.

• **يسهل** عملية فحص الجلوكوز في لحظة واحدة وبدون ألم، حتى من فوق الملابس.

• **تعرف على القراءة الحالية لمستوى الجلوكوز**، سهم الاتجاه يوضح ما إذا كان مستوى الجلوكوز في ارتفاع أو انخفاض أو يتغير ببطء، ورسم بياني لمستوى الجلوكوز **لل 8 ساعات السابقة**.


• **يسهل التعرف على اتجاهات وأنماط** الجلوكوز لتساعدك في اتخاذ قرارات تخص جرعات الانسولين.



كل ساعة إضافية في النطاق المستهدف لها تأثير إيجابي على التحكم في نسب الجلوكوز لديك!



بسهولة تستطيع مشاركة قراءات الجلوكوز مع طبيبك سواء في العيادة أو عن بعد

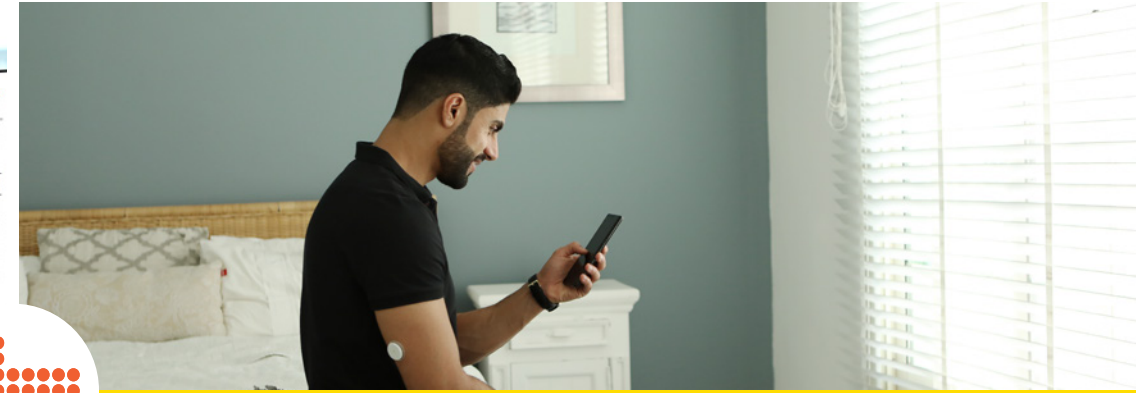

ساعد فريق الرعاية الطبية على
اكتشاف أنماط واتجاهات الجلوكوز
لديك.

يتم تحميل بيانات الجلوكوز الخاصة بك تلقائياً إلى
نظام ليبري فيو^٣، وهو نظام سحابي لإنشاء التقارير.


ليبري فيو



اتصل بعيادة طبيبك

باستخدام تطبيق فري ستايل ليبري لينك^٢

خاصية اختيارية للتطبيق تتيح لك مشاركة بيانات الجلوكوز لديك
مع فريق الرعاية الطبية الخاص بك.

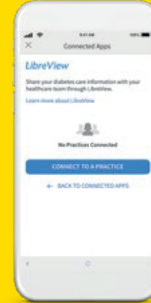

فري ستايل
ليبري لينك



فري ستايل
ليبري لينك

نظام فلاش لمراقبة الجلوكوز

١. تطبيق فري ستايل ليبري لينك يتوافق مع أجهزة هواتف وأنظمة تشغيل معينة. الرجاء زيارة الموقع لمعلومات إضافية حول الأجهزة المتوافقة قبل الشروع بالاستخدام. يتطلب استخدام FreeStyle LibreLink التسجيل في LibreView.
٢. يتطلب استخدام FreeStyle LibreLink التسجيل في LibreView. التحميل التلقائي يتطلب اتصال إنترنت لاسلكي أو اتصال بيانات محمول. ٣. إن موقع ليبري فيو يتوافق مع أنظمة تشغيل ومتصفحات إنترنت معينة فقط. لأي معلومات إضافية، الرجاء زيارة الموقع: www.LibriView.com.
البيانات المحاكاة للأغراض التوضيحية فقط. ولا تعود إلى مريض حقيقي أو تُعد بيانات حقيقية. الصور للأغراض التوضيحية فقط. وليست لمريض أو أخصائي رعاية صحية حقيقي.



من السهل بدء مشاركة بيانات الجلوكوز الخاصة بك باستخدام تطبيق فري ستايل ليبري لينك

الخيار رقم 1: تقوم أنت بالاتصال بطبيبك


اطلب من طبيبك أو موظفي المكتب تقديم معرف العيادة
الطبية الخاص بليبري فيو، وهو كود خاص بطبيبك.

ثم ببساطة أدخل الكود في تطبيق فري ستايل ليبري لينك

اذهب إلى:

القائمة > التطبيقات المتصلة > ليبري فيو > الاتصال
بالعيادة > إدخال رمز معرف العيادة الطبية

اضغط "التالي" ثم "اتصال" بعد مراجعة معلومات العيادة
الطبية الخاصة بطبيبك

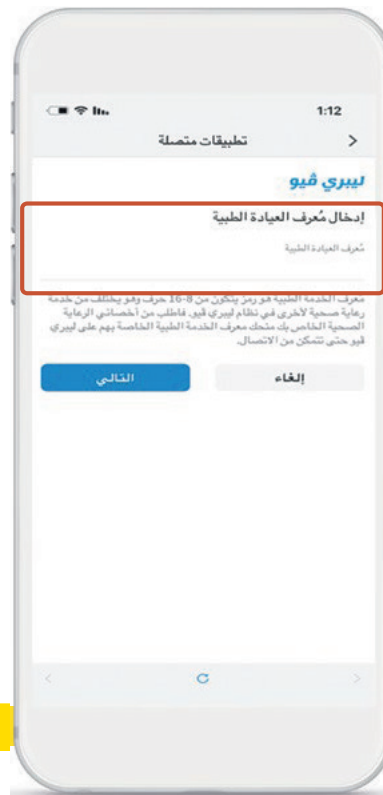

فري ستايل
ليبري لينك

نظام فلاش لمراقبة الجلوكوز

1. تطبيق فري ستايل ليبري لينك يتوافق مع أجهزة هواتف وأنظمة تشغيل معينة. الرجاء زيارة الموقع لمعلومات إضافية حول الأجهزة المتوافقة قبل الشروع بالاستخدام. يتطلب استخدام LibreLink FreeStyle LibreLink التسجيل في LibreView. البيانات المحاكاة للأغراض التوضيحية فقط. ولا تعود إلى مريض حقيقي أو تعد بيانات حقيقية. الصور للأغراض التوضيحية فقط. وليست لمريض أو أخصائي رعاية صحية حقيقي.



من السهل بدء مشاركة بيانات الجلوكوز الخاصة بك باستخدام تطبيق فري ستايل ليبري لينك

الخيار ٢: قبول دعوة العيادة من طبيبك


سيرسل مكتب طبيبك دعوة لمشاركة بيانات الجلوكوز الخاصة بك. يمكن قبول الدعوة بإحدى الطريقتين التاليتين:

١. اضغط على "قبول الدعوة" في البريد الإلكتروني

٢. اقبل الدعوة مباشرة في تطبيق فري ستايل ليبري لينك

اذهب إلى:

القائمة > التطبيقات المتصلة > ليبري فيو > الدعوات
المعلقة > قبول الدعوة

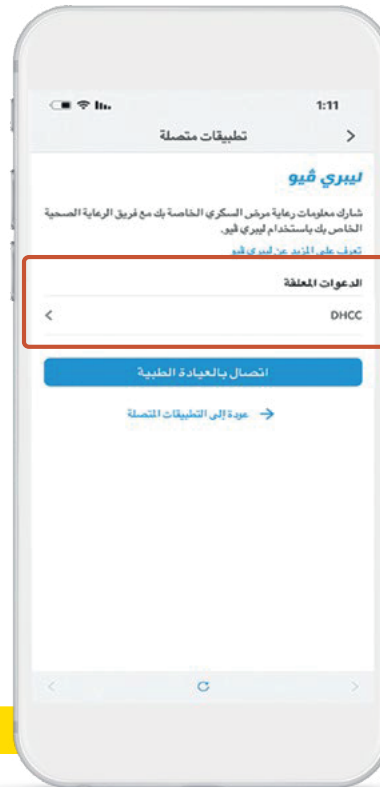

فري ستايل
ليبري لينك
نظام فلاش لمراقبة الجلوكوز

١. تطبيق فري ستايل ليبري لينك يتوافق مع أجهزة هواتف وأنظمة تشغيل معينة. الرجاء زيارة الموقع لمعلومات إضافية حول الأجهزة المتوافقة قبل الشروع بالاستخدام. يتطلب استخدام LibreLink FreeStyle LibreLink التسجيل في LibreView. البيانات المحاكاة للأغراض التوضيحية فقط. ولا تعود إلى مريض حقيقي أو تعد بيانات حقيقية. الصور للأغراض التوضيحية فقط. وليست لمريض أو أخصائي رعاية صحية حقيقي.



الاطمئنان وراحة البال لأفراد أسرتك^١

يمكنك مشاركة قراءات الجلوكوز الخاصة بك مع أشخاص آخرين إذا سمحت بذلك.



يمكن لأفراد الأسرة تحميل تطبيق ليبري لنك أب^٢ لمتابعة مستوى الجلوكوز لدى الطفل أو الوالد المسن أو الأحباء الآخرين.



عندما يكون أحيائك على دراية، يكون لديك دعم إضافي لمساعدتك.




ليبري لنك أب



GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

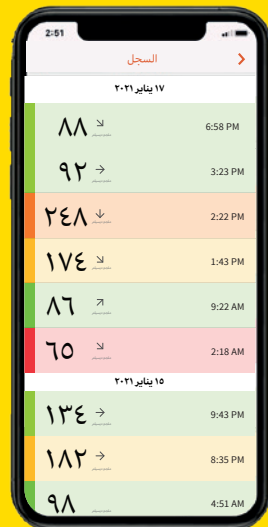

فري ستايل
ليبري لينك
نظام فانش لمراقبة الجلوكوز

Edge, J., Arch Dis Child. (2017): <https://doi.org/10.1136/archdischild-2016-311530> .1

٢. تطبيق LibreLinkUp متوافق فقط مع بعض الأجهزة المحمولة وأنظمة التشغيل. يرجى مراجعة www.LibreLinkUp.com لمزيد من المعلومات حول توافق الجهاز قبل استخدام التطبيق. يتطلب استخدام LibreLinkUp و Free و LibreLinkUp Style التسجيل في LibreView. لا يقصد بتطبيق LibreLinkUp المحمول أن يكون جهاز مراقبة الجلوكوز الأساسي: يجب على المستخدمين المنزليين استشارة أجهزتهم الأساسية واستشارة أخصائي الرعاية الصحية قبل إجراء أي تفسير طبي وتعديلات علاجية من المعلومات التي يوفرها التطبيق. البيانات المحاكاة للأغراض التوضيحية فقط. ولا تعود إلى مريض حقيقي أو تعد بيانات حقيقية. الصور للأغراض التوضيحية فقط. وليست لمريض أو أخصائي رعاية صحية حقيقي.

منصة فري ستايل ليبري - تمنحك القوة للتحكم في مرض السكري



اتصال
أسهل

الاطمئنان وراحة البال
لأفراد الأسرتك^٥



فهم
النتائج
أسهل^٤

احصل على استشارات مثمرة مع
طبيبك سواء في العيادة أو عن بعد



متابعة
أسهل^١

يمكنك فحص الجلوكوز
في أي وقت^٢، في أي مكان^٣

لما الوخز عندما يمكنك المسح؟^٦



فري ستايل
ليبري لينك
نظام فلاش لمراقبة الجلوكوز



قم بتنزيل تطبيق فري ستايل ليبري لينك^٢ اليوم



life. to the fullest.

Abbott

Haak, T., Diabetes Ther. (2017): <https://doi.org/10.1007/s13300-016-0223-6>.
٢. يتطلب المحس فترة إجماع لمدة ٦-٧ دقيقة عند التطبيق. ٣. المحس مقاوم للماء لما يصل إلى عمق ١ متر (٣ أقدام) من الماء. لا تغمره لمدة أطول من ٣٠ دقيقة. لا يجوز استخدامه فوق ١٠٠٠ قدم. ٤. Unger, J., Postgrad Med. (2020): <https://doi.org/10.1080/00325481.2020.1744393>.
٥. Edge, J., Arch Dis Child. (2017): <https://doi.org/10.1136/archdischild-2016-311530>.
٦. هناك حاجة لإجراء وخز الإصبع إذا كانت القراءات لا تتوافق مع الأعراض أو التوقعات. ٧. تطبيق فري ستايل ليبري لينك يتوافق مع أجهزة هواتف وأنظمة تشغيل معينة. الرجاء زيارة الموقع لمعلومات إضافية حول الأجهزة المتوافقة قبل الشروع بالاستخدام. يتطلب استخدام FreeStyle LibreLink التسجيل في LibreView. إن البيانات الواردة ببيانات صورية لأغراض توضيحية فقط. ولا تمثل مريضاً حقيقياً أو بيانات حقيقية. إن الصور الواردة لأغراض توضيحية فقط. ولا تمثل مريضاً أو أخصائي رعاية صحية حقيقياً.
©Abbott 2021

فري ستايل، وليبري، والعلامات التجارية ذات الصلة هي علامات لشركة آبوت.

ADC-44268 v1.0

MDAD11210007