



FreeStyle
Libre
FLAŞ GLUKOZ TAKIP SİSTEMİ



FREESTYLE LIBRELINK VE LIBRELINKUP

FREESTYLE LIBRE EĞİTİM PROGRAMI

FreeStyle LibreLink ve LibreLinkUp Glukoz ölçümü ve takibi için yeni nesil mobil uygulamalar

FreeStyle Libre, yeni nesil dijital sağlık çözümleri olan FreeStyle LibreLink* ve LibreLinkUp* ile artık daha da etkili ve kolay diyabet yönetimi sunuyor.

FreeStyle LibreLink, kullanıcıların akıllı telefonlarına Google Play ve Apple Store'dan ücretsiz indirebilecekleri bir mobil uygulamadır.

FreeStyle LibreLink ile kullanıcılar diledikleri yerde ve zamanda kolayca glukoz ölçümlerini yapabilirler.†



FreeStyle LibreLink ana ekranını inceleyelim:

Anlık Glukoz Ölçümü

8 saatlik Glukoz Geçmişi

Aktivitelerin, beslenmenin ve insülin alımının glukoz seviyesini gece ve gündüz boyunca nasıl etkilediğini gösterir.




Trend Oku

Glukoz değerinin seyir yönünü göstererek günlük hayatta daha bilinçli seçimler yapılmasını sağlar.

FreeStyle LibreLink'teki önemli yeniliklerden biri de glukoz düzeylerinde neler olup bittiğinin daha kolay anlaşılması için ölçüm sonuçlarının renklendirilmiş olmasıdır.

- Yeşil** Belirlenen hedef aralığında
- Turuncu** Yüksek glukoz (>240 mg/L)
- Kırmızı** Düşük glukoz (<70 mg/L)
- Sarı** Hedef glukoz aralığı ile yüksek ve düşük eşikler arasındaki ölçüm sonuçları

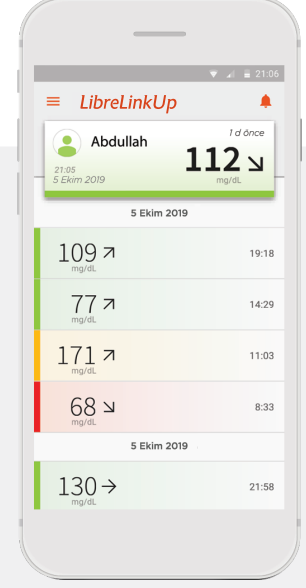

Kullanılan ekran ve veriler sadece gösterim amaçlı olup gerçek kullanıcı verisi içermemektedir.

FreeStyle LibreLink uygulamaları ile daha detaylı glukoz raporları!



- ✓ Günlük seyirler
- ✓ Hedefte geçirilen zaman
- ✓ Düşük glukoz olayları
- ✓ Ortalama glukoz
- ✓ Günlük grafikler
- ✓ Tahmini HbA1c
- ✓ Sensör kullanımı

Kullanılan ekran ve veriler sadece gösterim amaçlı olup gerçek kullanıcı verisi içermemektedir.



FreeStyle LibreLink, daha detaylı raporlar ve yorumlar sunarak glukoz seviyelerinin daha iyi yönetilmesiyle diyabet tedavi sürecini bir üst noktaya taşır.

FreeStyle LibreLink ile yapılan ölçümlerde glukoz verileri otomatik olarak LibreView'a yüklenir, tedavi süreci için gerekli olan detaylı raporlar otomatik oluşturulur ve güvenli bir şekilde bulut tabanlı bir sistemde depolanır. Böylece depolanan veriler otomatik olarak LibreView'a aktarılmış olur ve LibreView üzerinden sağlık uzmanınızla diyabet tedavinizi kolaylıkla yürütebilirsiniz.

LibreLinkUp ile sevdiklerinizle bağlantıda kalın!

FreeStyle LibreLink ile alınan glukoz verileri maksimum 20 farklı LibreLinkUp mobil uygulama kullanıcısı ile paylaşılabilir.



FreeStyle LibreLink

Glukoz ölçümü parmak delmeden istenilen an istenilen yerde telefon ile yapılabilir.

LibreLinkUp

Diyabetlilerin glukoz ölçüm sonuçlarını aileleri veya sevdikleri uzaktan, gece gündüz takip edebilir.



Sensör ve FreeStyle LibreLink ile her ölçüm yapıldığında, ilgili LibreLinkUp kullanıcısı ile de anlık sonuçlar paylaşılır.



LibreLinkUp, FreeStyle LibreLink uygulaması ve FreeStyle Libre sensörü ile ulaşılan glukoz verilerinin diyabetli yakını tarafından da görülmesini sağlar.

*FreeStyle LibreLink kullanımı Abbott ve Newyu Inc. tarafından sunulan LibreView sisteminin kullanımını gerektirir. FreeStyle Libre sensörler Abbott tarafından geliştirilmiş ve sunulmaktadır. FreeStyle LibreLink'i ve LibreLinkUp'ı telefonunuza indirirken herhangi bir ücret tabii değildir fakat indirme esnasında kullandığınız data sebebiyle data ücreti telefonunuza yansıtılabilir ya da mevcut data hakkınızdan düşülebilir. FreeStyle LibreLink mobil uygulaması NFC destekli Android 7.1 veya üzeri ve iPhone 7 iOS 13 veya üzeri telefonlarla uyumludur.

*LibreLinkUp kullanımı Abbott ve Newyu Inc. tarafından sunulan LibreView sisteminin kullanımını gerektirir. LibreLinkUp'ı telefonunuza indirirken herhangi bir ücret tabii değildir fakat indirme esnasında kullandığınız data sebebiyle data ücreti telefonunuza yansıtılabilir ya da mevcut data hakkınızdan düşülebilir. LibreLinkUp mobil uygulaması Android OS 6.0 ve yukarı ve iPhone iOS 11 ve yukarı telefonlarla uyumludur.

†Glukoz düzeylerinin hızla değiştiği durumlarda, interstisyel (hücreler arası) sıvı glukoz düzeyleri kan glukoz düzeylerini doğru olarak yansıtmadığında veya sistem hipoglisemi ya da yaklaşan hipoglisemi uyarısı verdiğinde veya belirtiler sistem okumalarıyla uyummadığında kan şekeri ölçüm cihazı ile parmaktan ölçüm yapılması gerekir.

Not: FreeStyle Libre sistemi 4 yaş ve üzeri diyabetlilerde hücreler arası sıvı glukoz düzeylerini ölçmek için endikedir. 4-17 yaş arasındaki çocukların ürün kullanımını en az 18 yaşında olan bir yakınının gözetimi altında olmasıyla sınırlanmıştır. En az 18 yaşında olan bu kişi çocuğun FreeStyle Libre sistemini kullanmakla, ölçümlerini okumakla ve ona yardımcı olmakla sorumludur.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN:

www.freestyle.abbott/tr-tr/



MÜŞTERİ HİZMETLERİ
0850 577 75 04

Abbott
life. to the fullest.™