

  
**FreeStyle  
Libre**  
FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM

**112**  
mg/dL



# LƯU Ý KHI THEO DÕI ĐƯỜNG HUYẾT LIÊN TỤC VỚI FREESTYLE LIBRE - CẢM BIẾN



Hình ảnh và chỉ số chỉ mang  
tính chất minh họa

Sản phẩm này của Abbott Diabetes Care Ltd, Anh gồm Đầu đọc cảm tay-FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring System Reader (72217-01) sản xuất tại Flextronics Medical Device Manufacturing (Shenzhen) Co., Ltd, Trung Quốc và Bộ cảm biến-FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring System Sensor (72216-01) sản xuất tại Sanmina Ireland UC, Ireland. Số hồ sơ lưu hành: 000.00.04.G18-210628-0012. Thông tin cảnh báo và điều kiện bảo quản xem trong cuốn hướng dẫn sử dụng tại [freestylelibre.vn](http://freestylelibre.vn).  
VPDD Abbott Laboratories GmbH: 02 Ngõ Đức Kê, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.  
ADC-82098 v1.0 09/2023.

 **Abbott**  
*life. to the fullest.®*

# LƯU Ý KHI GẮN CẢM BIẾN

Cảm biến FreeStyle Libre hoạt động hiệu quả nhất trên vùng da khô và sạch.



## ◆ CHỌN VỊ TRÍ GẮN CẢM BIẾN

Cảm biến được gắn cố định ở **mặt sau cánh tay**.

## ◆ CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI GẮN CẢM BIẾN

### 1. VỆ SINH

Làm sạch da với **xà phòng** và lau bằng khăn khô.

### 2. KHỬ KHUẨN

Khử khuẩn da với **bông cồn**.

### 3. ĐỂ KHÔ

**Dầu và độ ẩm** có thể khiến cảm biến không bám chặt trên da.



Quét mã QR để xem ngay hướng dẫn gắn cảm biến

# LƯU Ý KHI ĐEO CẢM BIẾN



## CHÚ Ý KHI DI CHUYỂN

Tránh va chạm cảm biến vào cạnh cửa phòng, cửa ô tô, dây an toàn, hay cạnh cửa của các vật dụng.




## KHI VẬN ĐỘNG

Đảm bảo cảm biến được gắn đúng vị trí ở mặt sau cánh tay để hạn chế va chạm khi vận động.



## CẨN THẬN KHI TẮM

Khi lau người với khăn tắm, tránh để khăn vướng và kéo rơi cảm biến.

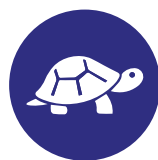

## NHỆ NHÀNG VỚI CẢM BIẾN

Khi thay quần áo, hãy nhẹ nhàng, tránh để quần áo kéo rơi cảm biến.




## CHỌN TRANG PHỤC PHÙ HỢP

Ưu tiên trang phục rộng rãi để cảm biến có thể hoạt động tốt nhất.



## NÂNG NIU CẢM BIẾN

Không kéo và đùa nghịch cảm biến, hạn chế chạm tay vào cảm biến.

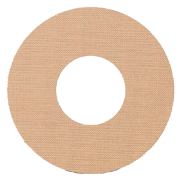

## DÁN CỐ ĐỊNH CẢM BIẾN

Nên kiểm tra cảm biến mỗi ngày, nếu cảm biến có dấu hiệu rơi, có thể dùng băng dán để cố định. Khi dán, bảo đảm lỗ tròn trên cảm biến không bị che phủ. Tháo băng dán có thể khiến cảm biến rơi, chỉ nên tháo khi đã đeo cảm biến đủ 14 ngày.



# LƯU Ý KHI GỖ CẢM BIẾN

## CÁCH GỖ CẢM BIẾN



Nhẹ nhàng kéo mép băng dính quanh cảm biến và từ từ gỡ khỏi da theo một chiều duy nhất.



Loại bỏ keo dính còn sót lại trên da bằng xà phòng và nước ấm.

Khách hàng có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ bảo hành sản phẩm, vui lòng gọi hotline hoặc gửi email đến đội ngũ CSKH tại:

 024 4458 2160

 [adc-cs.vn@abbott.com](mailto:adc-cs.vn@abbott.com)

 [freestylelibre.com.vn](http://freestylelibre.com.vn)

Vào thứ Hai đến thứ Sáu, 08:30 - 17:30 (ngoại trừ các ngày lễ, tết)

1120   
mg/dL

Quét mã QR để xem ngay  
thông tin về FreeStyle Libre

