

## ساعد السنسر على البقاء في مكانه

إحصل على أقصى إستفادة من مدة إرتداء السنسر في ثلاث خطوات سهلة:

### 1 الغسيل

استخدم صابونًا خاليًا من الترتيب وخاليًا من العطور لغسل موقع التطبيق وإزالة أي زيوت.

إحلق أي شعر متواجد على ظهر ذراعك العلوي (الموقع المعتمد) لمساعدة اللاصق على التماسك.



### 2 التحضير

بعد الغسيل، استخدم مسحة كحولية لتعقيم الموقع.

لا تضع مستحضرات ترطيب الجسم أو الكريمات حتى يتم وضع السنسر في مكانه.



### 3 التجفيف

دع الجلد يجف تمامًا مما يساعد على تماسك اللاصق.

قد يتطلب ذلك بعض الوقت، اعتمادًا على درجة الحرارة والرطوبة في بيئتك.




نصيحة محترف: أكمل هذه الخطوات بعد الاستحمام للحصول على نتائج أفضل.



## نصائح للحفاظ على السنسر في مكانه

تم تصميم السنسر لتحمل متطلبات الحياة اليومية. ومع ذلك يمكن تحقيق أقصى استفادة خلال فترة ارتداء السنسر من خلال الأخذ في الاعتبار الأمور التالية:


جفف الجلد بعد الاستحمام أو السباحة دائماً لتجنب أن يتعثر السنسر في منشفة.

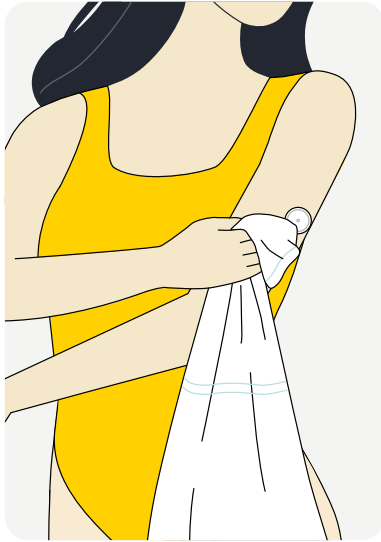


ارتداء الملابس فضفاضة وخذ وقتك في ارتداء الملابس حتى لا يتعثر السنسر أو ينسحب.



تجنب لمس السنسر وابتعد عن الأيدي الفضولية، سواء كانت صغيرة أو كبيرة في السن.

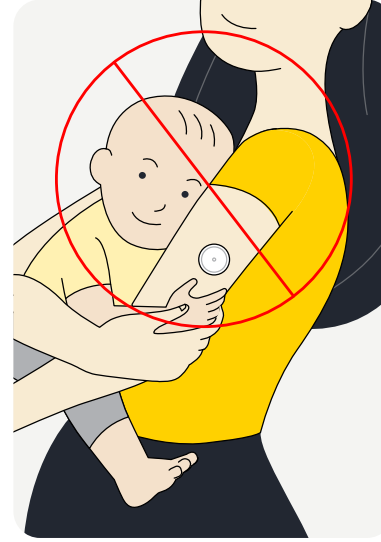

انتبه إلى العوائق اليومية مثل الأبواب، وأبواب السيارات، وأحزمة الأمان، وحواف الأثاث.

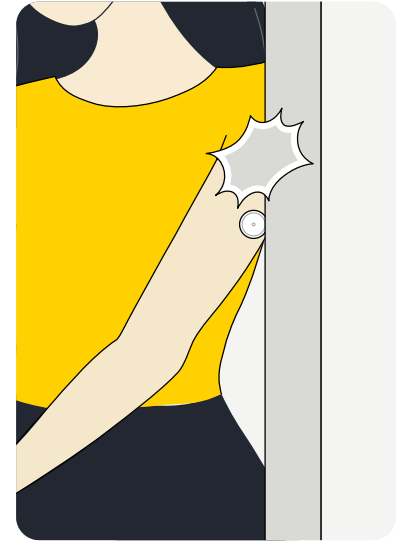

فكر في إضافة واحدة من اللاصقات الإضافية على الصفحة التالية واختيار موقعاً على ظهر ذراعك العلوي الأقل احتمالاً لتساقط السنسر.

هل أنت رياضي أو تمارس الرياضة بشكل مكثف؟



## هل تريد لاصق إضافي؟

يمكن للمنتجات المذكورة أدناه زيادة قوة تماسك السنسر<sup>1</sup>. تحقق من فريقك الطبي لمعرفة المنتج المناسب لك.

### ● سائل Torbot Skin Tac [turbot.com](http://turbot.com)

مسحة جلدية لاصقة خالية من الحساسية  
واللاتكس

### ● مسحة Skin-Prep Protective [smith-nephew.com](http://smith-nephew.com)

مسحة خالية من الكحول تساعد الشريط  
والأفلام على التماسك بالجلد

### ● Tegaderm I.V. [3m.com](http://3m.com)

فيلم شفاف يوفر قوة لاصقة

### ● Mastisol Liquid Adhesive [eloquesthealthcare.com](http://eloquesthealthcare.com)

الغراء السائل الشفاف غير المهيج  
الذي يؤمن الضمادات

### ● Over-bandage

يمكنك استخدام الضمادات الطبية أو الشريط الطبي<sup>2</sup> للحصول على أمان إضافي، ولكن يجب تطبيقها في وقت وضع السنسر فقط وإزالتها عند اكتمال وقت الارتداء، حيث قد يتساقط السنسر عند تقشيرها. تأكد من ترك الفتحة/الثقب في وسط السنسر غير مغطاة حتى يتمكن من التنفس.

1. لا تشمل هذه القائمة كل المنتجات ولا تشكل تأييداً للشركة المصنعة أو جودة المنتج. لا تتحمل شركة أبوت للرعاية الصحية مسؤولية اكتمال أو دقة معلومات المنتج. قد تختلف توافر المنتجات حسب البلد والمنطقة. يجب اتباع تعليمات استخدام كل منتج من قبل الشركة المصنعة.

2. يمكن تطبيق الضمادات الطبية/الشريط الطبي الإضافي، ولكن لا تقم بإزالتها بمجرد وضعها حتى يكون جاهزاً للإزالة.

غلاف المجس، فري ستايل، وليبري، والعلامات التجارية ذات الصلة هي علامات لشركة أبوت. العلامات التجارية الأخرى مُلك لأصحابها المعنيين.

©2024 Abbott. ADC-90741 v1.0