



Installation de l'application FreeStyle Libre 3

Pour les utilisateur(-trice)s FreeStyle Libre 2 au Luxembourg

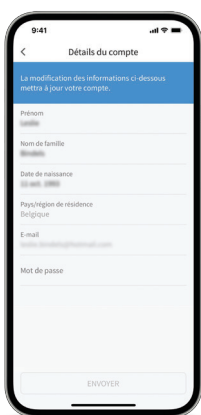

ÉTAPE 1 – Vérification préalable

1. **Vérifiez l'adresse e-mail utilisée sur votre application FreeStyle LibreLink actuelle.**
 - Accédez à : Paramètres > Détails du compte
2. **Vérifiez votre connexion LibreView au cabinet de votre convention**
 - Accédez à : Paramètres > Applications connectées > LibreView
 - Vous voyez le nom de votre convention ? > Tout est en ordre
 - Si ce n'est pas le cas > Veuillez contacter votre convention

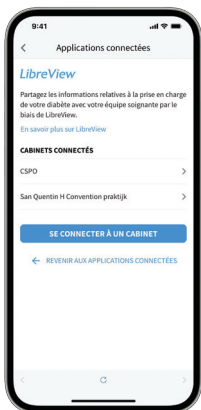

ÉTAPE 2 – Désinstallation

Attention : veuillez à appliquer cette procédure lorsque votre capteur FreeStyle Libre 2 actuel est en fin de vie. L'application FreeStyle Libre 3 prend uniquement en charge le capteur FreeStyle Libre 3 Plus.

1. **Désinstallez votre application FreeStyle LibreLink actuelle**
Désinstaller signifie que vous devez effacer complètement l'application de votre téléphone. Pas seulement effacer l'icône (ou le raccourci).

ÉTAPE 3 – Installation

1. Accédez à l'Apple Store/Google Play Store sur votre smartphone
2. Recherchez : FreeStyle Libre 3
3. Installez l'application **FreeStyle Libre 3 - LU**



ÉTAPE 4 – Connexion

1. Ouvrez l'app FreeStyle Libre 3 - LU
2. Lors de la première utilisation:
 - Autorisez les notifications (Android)
 - Autorisez l'utilisation de Bluetooth (iOS)
3. **NE CRÉEZ PAS UN NOUVEAU COMPTE**
4. Cliquez sur **Se connecter**
5. Utilisez la même adresse e-mail que celle utilisée dans l'app FreeStyle LibreLink
6. Saisissez le mot de passe associé à cette adresse e-mail
 - Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur « Mot de passe oublié » et suivez les étapes.



ÉTAPE 5 – Étapes d'intégration de l'application

1. Attention :

- Veillez à accepter l'ensemble des politiques.
- Veillez à accepter tous les messages de notification.

Vous êtes prêt à commencer à utiliser un capteur FreeStyle Libre 3 Plus !

Point d'attention :



1. Vérifiez votre connexion LibreView au cabinet de votre convention.
Accédez à : Paramètres > Applications connectées > LibreView
2. Vous voyez le nom de votre convention ? > Tout est en ordre
Si ce n'est pas le cas > Veuillez contacter votre convention

IMPORTANT !

Ces fonctionnalités de votre téléphone peuvent impacter les alarmes :



Android

- Cette application doit fonctionner en **arrière-plan**. Si vous redémarrez votre téléphone, ouvrez votre application à nouveau.
- N'utilisez pas la minuterie de l'application "**Bien-être numérique**". Si vous utilisez un "**Mode de Concentration**", veillez à ne pas limiter l'application FreeStyle Libre 3.
- N'utilisez pas "**les modes d'économie d'énergie**" qui limitent l'activité de l'application en arrière-plan.
- Ne désactivez pas l'autorisation "**Dispositifs à proximité**" pour l'application.



iOS - iPhone

- Cette application doit fonctionner en **arrière-plan**. Si vous redémarrez votre téléphone, ouvrez votre application à nouveau.
- Si vous utilisez la fonctionnalité "**Temps d'écran**", ajoutez Libre 3 à la liste des applications "**Toujours autorisées**".
- Si vous utilisez "**Résumé programmé**" :
 - N'ajoutez PAS FreeStyle Libre 3 à la liste « **Applications dans le résumé** ».
 - Réglez la livraison des notifications de FreeStyle Libre 3 sur « **Livraison immédiate** » dans les paramètres de votre système d'exploitation.
- Si vous utilisez "**Concentration**", ajoutez Libre 3 à la liste des applications dans "**Notifications autorisées**".



Mises à jour du système d'exploitation:

- Il est recommandé de désactiver les mises à jour automatiques.
- Après une mise à jour, ouvrez votre application pour vérifier si elle fonctionne correctement.

Le progrès continue.

L'application FreeStyle LibreLink n'est compatible qu'avec certains appareils mobiles et systèmes d'exploitation. Veuillez consulter myFreeStyle.lu pour plus d'informations sur la compatibilité des appareils avant d'utiliser l'application. L'utilisation de l'app FreeStyle LibreLink peut nécessiter une inscription à LibreView. L'utilisation de l'app FreeStyle Libre 3 peut nécessiter une inscription à LibreView. Le site Web LibreView n'est compatible qu'avec certains systèmes d'exploitation et navigateurs. Veuillez consulter www.LibreView.com pour plus d'informations. Les données et les images sont données à titre d'illustration. Il ne s'agit pas de vrais données, patients ou professionnels de la santé. © 2025 Abbott. Le boîtier du capteur, FreeStyle, Libre, et les marques commerciales associées sont des marques d'Abbott. Les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. iPhone et App Store sont des marques commerciales d'Apple Inc. Android et Google Play sont des marques commerciales de Google LLC. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Abbott se fait sous licence. ADC-108709 v1.0

