

TOUT SAVOIR SUR MON DIABÈTE


Différence entre autosurveillance de la glycémie traditionnelle et le système de surveillance Flash

-  Glycémie sanguine
-  Glucose du capteur = Glucose du liquide interstitiel
-  Taux de sucre

ALLES WETEN OVER MIJN DIABETES

Het verschil tussen de klassieke zelftests en het Flash-monitorsysteem

-  Bloedglucosespiegel
-  Glucose van de sensor = glucose in de interstitiële vloeistof
-  Suikergehalte

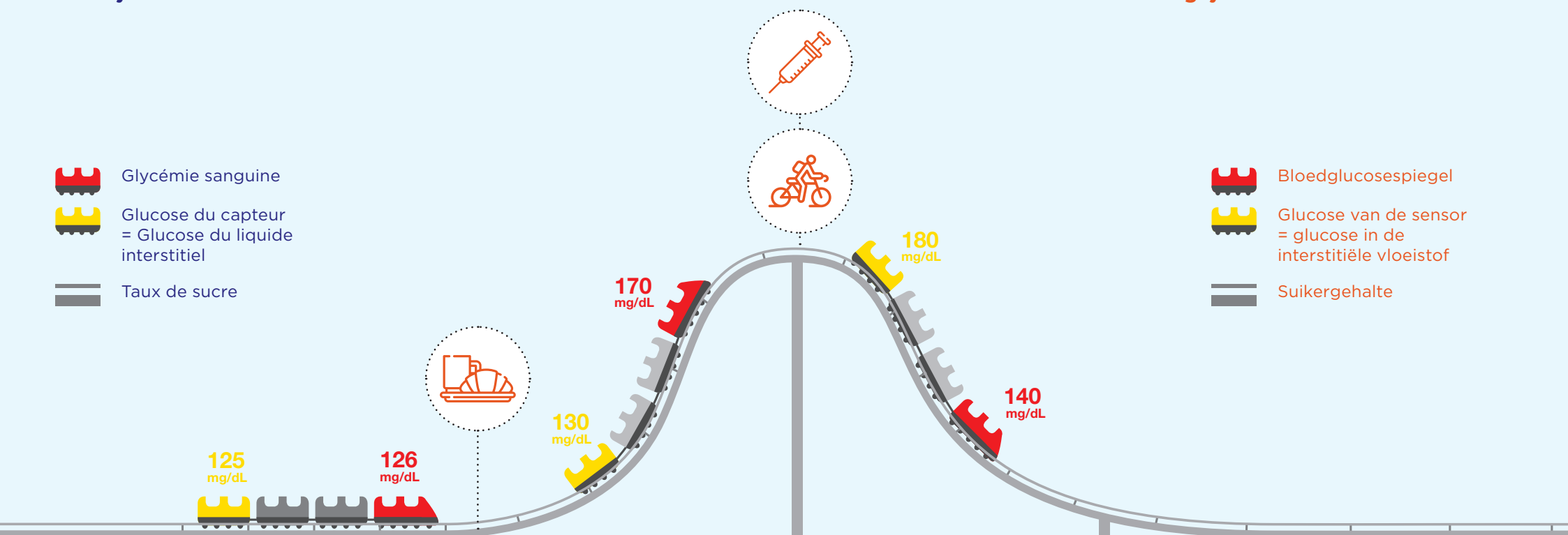

Taux de glucose stable. Quand il y a peu de fluctuations dans les taux de glucose, les mesures de glycémie sanguine et les taux de glucose du capteur ont des niveaux très proches bien que rarement similaires.

Stabiël glucosegehalte. Wanneer er weinig schommelingen zijn in de glucosegehalten, leveren de metingen van de bloedsuikerspiegel en de glucosegehalten van de sensor een sterk vergelijkbaar, maar zelden identiek resultaat op.



Lors d'une augmentation rapide du taux de sucre, le taux de glucose du capteur peut être inférieur à la glycémie sanguine.

Bij een snelle stijging van het suikergehalte kan het glucosegehalte van de sensor lager zijn dan de bloedglucosespiegel.



Lors d'une diminution rapide du taux de sucre, le taux de glucose du capteur peut être supérieur à la glycémie sanguine.


Bij een snelle daling van het suikergehalte kan het glucosegehalte van de sensor hoger zijn dan de bloedglucosespiegel.

TOUT SAVOIR SUR MON DIABÈTE

Différence entre l'autosurveillance de la glycémie traditionnelle et le système de surveillance Flash.

ALLES WETEN OVER MIJN DIABETES

Het verschil tussen de klassieke zelftests en het Flash-monitorsysteem.

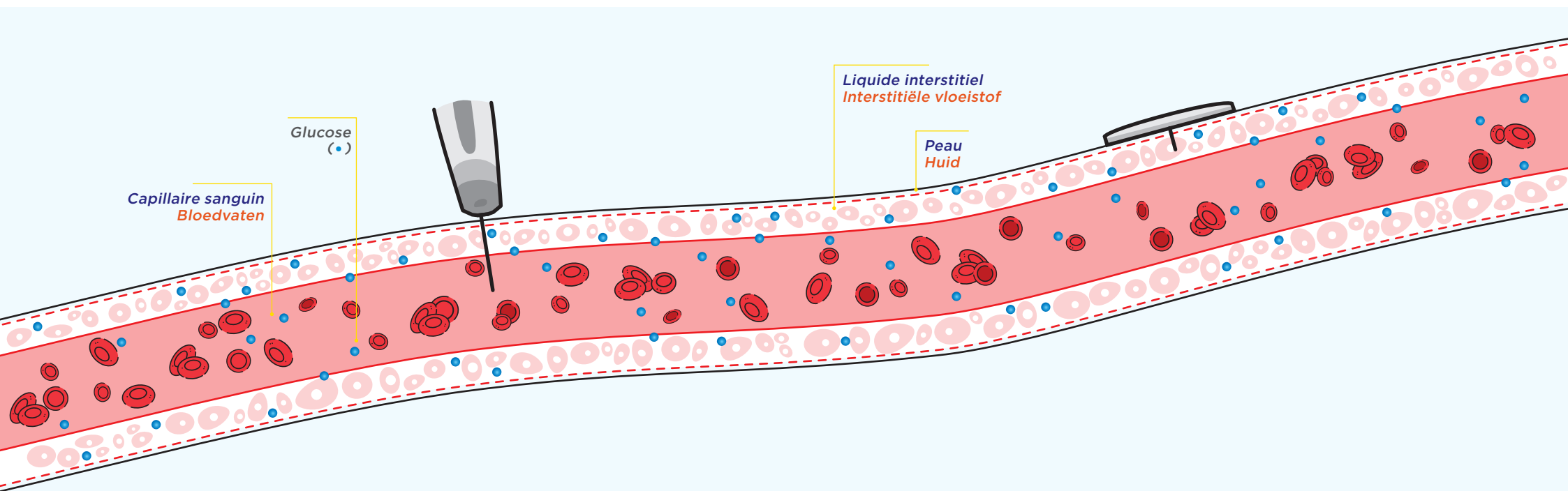

AUTOSURVEILLANCE DE LA GLYCÉMIE TRADITIONNELLE

Une glycémie classique fournit des informations sur votre taux de glucose dans le sang.



KLASSIEKE ZELFTESTS

De klassieke glucosetests verstrekken informatie over uw bloedsuikerspiegel.



LE SYSTÈME FREESTYLE LIBRE

Il mesure le taux de glucose dans le liquide interstitiel (c'est le liquide qui se trouve entre les cellules sous la peau) et non dans le sang. Il existe souvent une différence entre ces deux informations.



HET FREESTYLE LIBRE-SYSTEEM

Dit systeem meet het glucosegehalte in de interstitiële vloeistof (de vloeistof die zich tussen de onderhuidse cellen bevindt) en niet in het bloed. Deze twee gegevens verschillen vaak van elkaar.