



Hoe de FreeStyle Libre 2 Plus sensor te gebruiken.

Voor Omnipod® 5 geautomatiseerd
insulinetoevoersysteem-gebruikers.



1 BEREID UW HUID VOOR



REINIGEN

Gebruik alleen een niet hydraterende, parfumvrije zeep om het aanbrengplaats van de sensor te wassen en dep het vervolgens droog.



ONTVETTEN

Gebruik een watje met alcohol of ether (geen hydroalcoholische gel) om olieachtige resten te verwijderen.



DROGEN

Laat uw huid volledig drogen voordat u de sensor aanbrengt. Dit is vooral belangrijk als u van plan bent de sensor aan te brengen na een douche of zwemmen¹.

Tips voor alle huidtypes



Haar kan de hechting van de sensor verstoren.


Scheer het aanbrengplaats van de sensor indien nodig voordat u de sensor aanbrengt.



Vermijd hydraterende producten, crèmes en lotions op het gebied van de sensor. Ze kunnen een **olieachtig residu** achterlaten.

Reinig, ontvet en droog het gebied voordat u de sensor aanbrengt.

Achteraanzicht

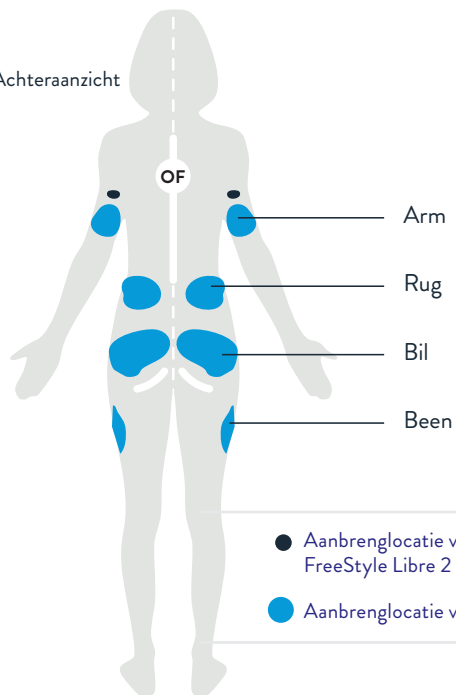

- Aanbrenglocatie voor de FreeStyle Libre 2 Plus-sensor
- Aanbrenglocatie voor de Omnipod® 5-Pod



Opmerking: Er zijn andere mogelijke plaatsen om de Omnipod® 5-Pod op te plaatsen die hier niet worden getoond.

Zorg ervoor dat u uw FreeStyle Libre 2 Plus-sensor en uw Omnipod® 5-Pod aan dezelfde kant van het lichaam plaatst: ze moeten elkaar kunnen "zien" zodat het lichaam de verbinding tussen de twee apparaten niet blokkeert. Als ze op dezelfde arm worden gedragen, moeten ze minstens 2,5 cm uit elkaar worden geplaatst.

2 BEREID DE SENSOR VOOR



- Verwijder het deksel van de verpakking.
- Draai het dopje van de sensorapplicator los.



- **Zet het zwarte streepje** van de sensorapplicator in lijn met dat van de verpakking.
- Druk de applicator stevig naar beneden.



- Haal de sensorapplicator uit de sensorverpakking.

3 BRENG DE SENSOR AAN



- Plaats de applicator op de voorbereide zone.
- **Druk om de sensor** aan te brengen.



- U zult een **klik** horen.
- **Verwijder** de applicator voorzichtig van uw arm.



- Controleer of de sensor goed vastzit.
- **Strijk de randen plat om een optimale vasthechting te verzekeren².**



Denk eraan een nieuwe sensor te activeren voor u gaat slapen. Uw lichaam kan dan aan de sensor wennen terwijl u slaapt.

4 ACTIVEER DE SENSOR

- Gebruik de App op de Omnipod® 5-Controller^{3,4} om de FreeStyle Libre 2 Plus-sensor te starten. Hiermee maakt de sensor verbinding met het Omnipod® 5-systeem, zodat het klaar is om te beginnen met de automatische insulinetoediening⁵.
- Uw **glucosewaarde**, meldingen (bijvoorbeeld dat uw **sensor bijna verloopt**) en **glucosealarmen** (laag, hoog en signaalverlies) worden **alleen** verzonden naar de Omnipod®5-Controller.
- Zodra de sensor en het geautomatiseerde insulinetoevoersysteem Omnipod® 5 zijn gestart, kan de sensor, indien gewenst, ook gescand worden met de **LibreLink⁶-app** om een actuele glucosewaarde te verkrijgen. Dit kan helpen om te controleren of de **sensor goed werkt**. Alarmen en meldingen worden niet ontvangen via de LibreLink-app.
- Familieleden, vrienden en zorgverleners kunnen de glucosegegevens van de patiënt bekijken en alarmen^{7,8} en meldingen instellen en ontvangen via de LibreLinkUp⁹-app.



- Het scannen van de FreeStyle Libre 2 Plus sensor met de LibreLink app schakelt glucosealarmen en meldingen uit voor zowel de gebruiker als de verzorger in respectievelijk de LibreLink-app en LibreLinkUp. Om deze reden wordt aanbevolen om de LibreLink-app niet te gebruiken als u LibreLinkUp gebruikt.
- Voor de verzorger zijn de alarminstellingen van LibreLinkUp⁹ volledig onafhankelijk van de instellingen van de LibreLink-gebruiker.

5 VERVANG DE SENSOR

De Omnipod® 5 Controller zal u na 15 dagen laten weten om uw sensor te vervangen.



Trek aan het zelfklevende randje waarmee de sensor op uw huid geplakt is. Verwijder de sensor in één langzame beweging.



- Gebruik eventueel een watje met wat babyolie (bijvoorbeeld zoete amandelolie) op de randen, zodat de sensor gemakkelijker loskomt. Eventuele lijmresten die op de huid achterblijven, kunt u verwijderen met warm water en zeep of met isopropylalcohol (zoals dissolvant of ether).
- Hydrateer uw huid nadat u de sensor verwijderd hebt.

Samen creëren de
FreeStyle Libre 2 Plus-sensor
en het Omnipod® 5-systeem
één eenvoudige¹⁰ ervaring.



FreeStyle

Libre 2 PLUS

Meer info op myFreeStyle.be

Gegevens en afbeeldingen zijn enkel ter illustratie. Het betreft geen echte gegevens, patiënt of professionele zorgverlener. De FreeStyle Libre 2 Plus-sensor is geautoriseerd om te werken met het Omnipod® 5 geautomatiseerd insulinetoedieningssysteem. De Pod heeft een IP28-specificatie voor waterdichtheid tot een diepte van 7,6 meter gedurende 60 minuten. De Omnipod® 5-Controller is niet waterdicht. **1.** De FreeStyle Libre sensor is waterbestendig tot 1 meter diepte. Niet langer dan 30 minuten onderdompelen. **2.** Rebrin K, Sheppard NF Jr, Steil, GM. Use of subcutaneous interstitial fluid glucose to estimate blood glucose: Revisiting delay and sensor offset. J Diabetes Sci Technol. 2010;4(5): 1087-1098. **3.** De Omnipod® 5-app is beschikbaar in de speciale Controller **4.** U hebt een actieve Pod en een daaraan gekoppelde FreeStyle Libre 2 Plus-sensor nodig om over te schakelen naar de Automatische Modus. Tijdens het opwarmen van de sensor staat het Omnipod® 5-systeem op Automatisch: Beperkte Status. Wanneer het opwarmen is voltooid en de sensorglucosewaarden beschikbaar zijn, schakelt het Omnipod® 5-systeem over naar de Automatische Modus. In deze modus gebruikt de pod om de 5 minuten de sensorglucosewaarden om automatische beslissingen te nemen over de insulinedosering. **5.** Meer informatie op <https://www.omnipod.com/nl-be>. **6.** De FreeStyle LibreLink-app is alleen compatibel met bepaalde mobiele apparaten en besturingssystemen. Raadpleeg myFreeStyle.be voor meer informatie over apparaatcompatibiliteit voordat u de app gebruikt. Het gebruik van FreeStyle LibreLink kan registratie bij LibreView vereisen. **7.** Om alarmen te kunnen ontvangen, moet de FreeStyle Libre 2 Plus-sensor zijn aangesloten op het Omnipod 5-systeem. **8.** Het apparaat van de gebruiker dient een internetverbinding hebben zodat de glucosegegevens automatisch naar LibreView worden geüpload en worden verzonden naar gekoppelde gebruikers van de LibreLinkUp-app. **9.** De LibreLinkUp-app is alleen compatibel met bepaalde mobiele apparaten en besturingssystemen. Raadpleeg de website www.LibreLinkUp.com voor meer informatie over apparaatcompatibiliteit voordat u de app gebruikt. Het gebruik van LibreLinkUp vereist registratie bij LibreView. **10.** Gebaseerd op productkenmerken zoals een draagperiode tot 15 dagen, nauwkeurigheidsgegevens en een automatische insulinetoediening met een enkele app.

© 2025 Abbott. De sensorbehuizing, FreeStyle, Libre, en gerelateerde merkaanduidingen zijn eigendom van Abbott. Andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Omnipod en het Omnipod-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Insulet Corporation en worden met toestemming gebruikt. ADC-109748 v3.0



Abbott