

De FreeStyle Libre 3 reader

SIGNAALVERLIES HERSTELLEN

Eerste methode



U krijgt een alarm “signaalverlies”

- Druk op de knop “Bevestig alarm” ①

Uw glucosewaarden verschijnen niet op het scherm en u ziet: Signaalverlies.

- De gele knop kort indrukken ③ en duw “Bekijk glucose” ④.
- Wacht enkele ogenblikken; het signaal zal zich herstellen en de glucosewaarden zullen getoond worden. ⑤
- Indien nodig, herhaalt u dit een aantal keren na elkaar.

Gesimuleerde gegevens dienen uitsluitend ter illustratie. Het betreft geen echte gegevens.

© 2024 Abbott. De sensorbehuizing, FreeStyle, Libre, en gerelateerde merkaanduidingen zijn eigendom van Abbott. ADC-90609 V1.0 04-24

Tweede methode



U krijgt een alarm “signaalverlies”

- Druk op de knop “Bevestig alarm” ①

Uw glucosewaarden verschijnen niet op het scherm en u ziet: Signaalverlies.

- De gele knop lang indrukken ③ tot de reader is uitgezet.
- Start de reader door op de gele knop te drukken. Duw “Bekijk glucose” ④
- Wacht enkele ogenblikken; het signaal zal zich herstellen en de glucosewaarden zullen getoond worden. ⑤
- Indien nodig, herhaalt u dit een paar keren na elkaar.

Indien permanent signaal verlies: gelieve contact te nemen met de klantendienst FreeStyle.



Wij raden u aan de FreeStyle Libre-reader om de 2 tot 3 dagen op te laden. Zorg dat de reader voldoende batterijvermogen heeft, dat u altijd uw glucoseniveau kan controleren en dat u de glucose- en signaalverliesalarmen krijgt, als ze geactiveerd zijn.

Als de glucosewaarden en alarmen niet overeenkomen met de symptomen of verwachtingen, dient er een vingerpriktest gedaan te worden of als u uw glucosewaarde niet kunt raadplegen op uw reader of uw app. Als het probleem langer dan twee uur aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice.

Aanvraagformulier
voor een
vervangende
sensor



KLANTENSERVICE

Elke werkdag van 8u30 tot 17 uur

B 0800 167 72