




FreeStyle
Libre 3
SYSTEEM VOOR CONTINUE GLUCOSEMONITORING

Installatie van de FreeStyle Libre 3 applicatie

Voor de gebruikers van de FreeStyle Libre 2

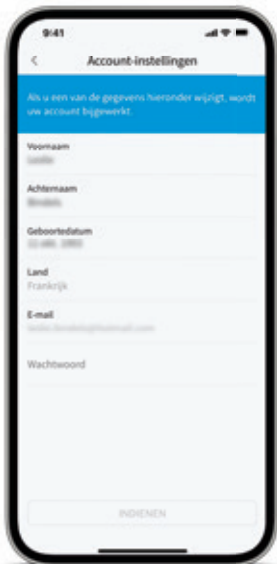


STEP - 1 Voorafgaande controle

1. Controleer het e-mailadres dat op uw huidige FreeStyle LibreLink-app wordt gebruikt.
 - a. Ga naar: Instellingen > Accountgegevens
2. Controleer uw LibreView-verbinding met de praktijk van uw zorgverlener
 - a. Ga naar: Instellingen > Verbonden apps > LibreView
 - b. Ziet u de naam van uw zorgverlener? > Alles ok
 - c. Zo niet > Neem contact op met uw zorgverlener

STEP - 2 Verwijderen

Wees voorzichtig: zorg ervoor dat u dit proces uitvoert aan het einde van de levensduur van uw huidige FreeStyle Libre 2-sensor. De FreeStyle Libre 3-app ondersteunt alleen de FreeStyle Libre 3-sensor

1. Verwijder uw huidige FreeStyle LibreLink-app
 - a. Verwijderen betekent dat u de app volledig van uw telefoon moet wissen. Wees niet alleen het pictogram (of de snelkoppeling)

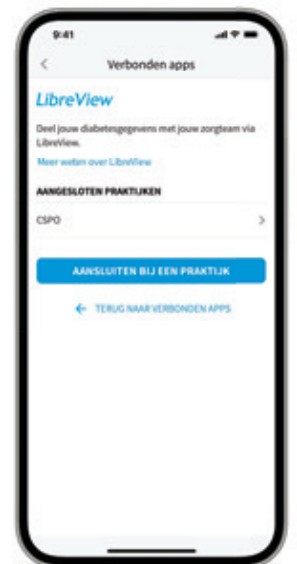


STEP - 3 Installeren

1. Ga naar de Apple Store / Google Play Store van uw smartphone
2. Zoek naar: FreeStyle Libre 3
3. Installeer de FreeStyle Libre 3 - BE-app
4. De applicatie die met uw FreeStyle Libre 3-app werkt ziet er als volgt uit:



STEP - 4 Koppelen

1. Open de FreeStyle Libre 3 - BE-app
2. Bij eerste gebruik:
 - a. Meldingen toestaan (Android)
 - b. Bluetooth toestaan (iOS)
3. **MAAK GEEN NIEUWE ACCOUNT AAN**
4. Klik op **Aanmelden**
5. Gebruik hetzelfde e-mailadres als in de vorige app
6. Voer het wachtwoord in dat aan dit e-mailadres is gekoppeld
 - a. Als u uw wachtwoord kwijt bent, klik dan op Wachtwoord vergeten en volg de stappen.

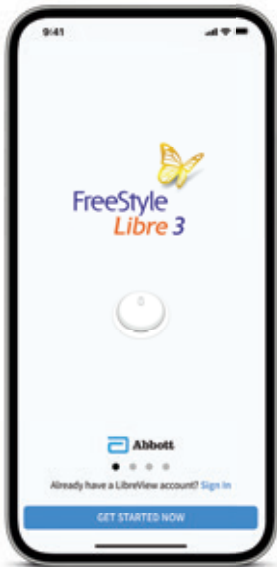

STEP - 5 Volg alle activeringsstappen van de app

1. Wees voorzichtig:
 - a. Zorg ervoor dat u alle overeenkomsten aanvaardt.
 - b. Zorg ervoor dat u alle pushberichten toestaat.

U bent klaar om uw FreeStyle Libre 3-sensor te starten!
Veel plezier met uw nieuwe FreeStyle Libre-systeem.

Aandachtspunt:

1. Controleer uw LibreView-verbinding met de praktijk van uw zorgverlener
 - a. Ga naar: Instellingen > Verbonden apps > LibreView
2. Ziet u de naam van uw zorgverlener? > Alles ok
 - a. Zo niet > Neem contact op met uw zorgverlener



BELANGRIJK! Deze telefoonfuncties kunnen EEN INVLOED HEBBEN OP ALARMEN:

Android



- Deze app moet op de achtergrond draaien. Als u uw telefoon opnieuw opstart, open dan uw app om te controleren of hij goed werkt.
- Gebruik de timer van de Digitaal Welzijn-app niet. Als u de Focusmodus gebruikt, beperk deze app dan niet (alleen Android).
- Pauzeer deze app niet.
- Gebruik geen energiebesparingsmodussen die de achtergrondactiviteit van apps beperken.
- Schakel de toestemming voor Apparaten in de buurt niet uit voor de applicatie.

iOS - iPhone



- Als u de functie Schermtijd gebruikt, voeg dan FreeStyle Libre 3 toe aan de lijst met Altijd toegestane apps.
- Als u Gepland overzicht gebruikt:
 - Voeg FreeStyle Libre 3 dan NIET toe aan de lijst "Apps in samenvatting".
 - Stel de meldingen van de FreeStyle Libre 3 in op "Onmiddellijke aflevering" in uw OS-instellingen.
- Als u Focus gebruikt, voeg dan FreeStyle Libre 3 toe aan de lijst met apps in Toegestane meldingen.
- Uw app moet op de achtergrond draaien. Als u uw telefoon opnieuw opstart, open dan de app om te controleren of hij goed werkt.

Updates voor het besturingssysteem (OS):

- We raden u aan om automatische OS-updates uit te schakelen.
- Open na een OS-update uw applicatie om te controleren of deze goed werkt.



FreeStyle Libre 3-systeem, continue glucose monitoring.

Abbott
life. to the fullest.®

1. Operating System, betekent besturingssysteem

© 2023 Abbott. De behuizing van de sensor, FreeStyle, Libre en gerelateerde merken zijn merken van Abbott. De andere merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. iPhone en App Store zijn commerciële merken van Apple Inc. ADC-77244 v1.0 06-23