



Recomendaciones para la aplicación del sensor

Información para usuarios de FreeStyle Libre

Preparación de la piel

ANTES DE LA APLICACIÓN:



LAVA

Usa solo productos no hidratantes, jabones sin perfume para lavar la zona donde vas a aplicar el sensor, y deja que se seque al aire.



LIMPIA

Usa una toallita con alcohol (no viene en el kit del sensor) para eliminar residuos aceitosos en tu piel.



SECA

Deja que tu piel se seque completamente antes de aplicar el sensor. Esto es especialmente importante si planeas aplicar el sensor después de la ducha o de nadar*.

Consejos para diferentes tipos de piel



El **vello** puede interferir en la adhesión del sensor.

Afeita el exceso de vello en la zona elegida antes de aplicar el sensor.



La piel y las cremas corporales pueden dejar **residuos aceitosos**.

Lava, Limpia y Seca la zona elegida antes de aplicar el sensor.

Consejos para mantener el sensor en su lugar



Recuerda

Sigue los pasos de preparación y aplicación del sensor cuidadosamente.



Manos fuera

Intenta no jugar, tirar o tocar el sensor mientras lo llevas puesto.



Vestimenta

Intenta darle espacio a tu sensor para que respire, usando ropa holgada† y material ligero. Al vestirme o desvestirme, ten cuidado de no enganchar tu ropa con el sensor.



Deportes de contacto

Considera usar un vendaje†† para asegurar que el sensor se mantiene en su lugar durante los deportes de contacto. Si al sudar se despegar el sensor, considera usar adhesivo para la piel.



Secar

Después de ducharte o de nadar*, toma medidas extra al secarte, para evitar enganchar o arrancar tu sensor.



Ten Cuidado

Ten cuidado de no enganchar tu sensor con una puerta, puerta del coche, cinturón de seguridad o bordes de los muebles.

Ayuda extra para pegar el sensor con estos productos**



Banda protectora

Un adhesivo de calidad médica; vendaje o apósito††

Skin-Prep® protector cutáneo

Crea una película protectora que prepara la piel para una mejor adherencia (smith-nephew.com)

Torbot Skin Tac™ Barrera protectora

Una barrera de la piel hipoalérgico y libre de látex (torbot.com)

Mastisol® Adhesivo Líquido

Adhesivo líquido transparente, no irritante y no soluble que asegura la adhesión (eloquesthealthcare.com)

Tegaderm I.V.

Apósito transparente de fijación avanzada (3m.com)

* El sensor es resistente al agua hasta 1 metro de profundidad y durante no más de 30 minutos.

† El lector captura los datos del sensor entre 1 y 4 cm del sensor

** La información mostrada no constituye una aprobación del fabricante o la calidad del producto. La disponibilidad del producto puede variar según el país y la región.

†† Se puede aplicar una banda protectora sobre el sensor sin cubrir el agujero central del mismo. Se puede considerar aplicar adhesivo de calidad médica como fijación extra, pero no debe quitarse hasta que se vaya a retirar el sensor tras el periodo de vida útil del sensor.

¿Necesitas ayuda? Dinos qué necesitas

Teléfono de contacto
900 300 119 / 910 478 901

El servicio de atención al cliente está disponible de
lunes a viernes, de 08:30 a 19:00h y los sábados de
9:00 a 18:00h



La cubierta del sensor, FreeStyle, Libre, y las marcas relacionadas son marcas de Abbott. Otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños y se utilizan con permiso. Para cualquier duda sobre diabetes, consulte siempre con su profesional sanitario. Para mayor información lea atentamente el Manual de Usuario.