



FreeStyle

Libre 2



**Χρήσιμες
συμβουλές
για την εφαρμογή
του αισθητήρα**



Abbott

Προετοιμάστε την επιδερμίδα σας

Πριν την τοποθέτηση:



Πλύνετε

Χρησιμοποιήστε σαπούνι χωρίς άρωμα και ενυδατικούς παράγοντες για να πλύνετε την περιοχή όπου θα τοποθετήσετε τον αισθητήρα.



Απολυμάνετε

Χρησιμοποιήστε ένα μαντηλάκι αλκοόλης (όχι λοσιόν ή τζελ αλκοόλης) για να απολυμάνετε το σημείο και να αφαιρέσετε τα κατάλοιπα λιπαρότητας.



Στεγνώστε

Αφήστε την επιδερμίδα να **στεγνώσει πλήρως** πριν εφαρμόσετε τον αισθητήρα. Αυτό είναι ιδιαίτερος σημαντικό εάν σκοπεύετε να εφαρμόσετε τον αισθητήρα αφού κάνετε ντους ή κολυπήσετε*.

Συμβουλές για διαφορετικούς τύπους επιδερμίδας



Η **τριχοφυΐα** μπορεί να επηρεάσει την καλή επικόλληση του αισθητήρα.

Ευρίστε το σημείο εφαρμογής πριν τοποθετήσετε τον αισθητήρα σας.



Τα προϊόντα περιποίησης σώματος (π.χ. ενυδατική κρέμα) μπορεί να αφήσουν **κατάλοιπα λιπαρότητας**.

Πλύνετε, απολυμάνετε και στεγνώστε το σημείο εφαρμογής πριν εφαρμόσετε τον αισθητήρα σας.

Προϊόντα για καλύτερη επικόλληση**



Αυτοκόλλητος Επίδεσμος

Ιατρικό αυτοκόλλητο επίθεμα σε επίδεσμο ή ταινία††

Skin-Prep® Protective Barrier Wipes

Συμβάλλει στην καλύτερη επικόλληση των επιθεμάτων στην επιδερμίδα
smith-nephew.com

Χρήσιμες συμβουλές για καλύτερη επικόλληση



Θυμηθείτε

Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες προετοιμασίας και εφαρμογής του αισθητήρα.



Μην Ακουμπάτε τον Αισθητήρα

Προσπαθήστε να μην τραβάτε, να μην αγγίζετε και να μην παίζετε με τον αισθητήρα ενώ τον φοράτε.



Ντύσιμο

Φορέστε ελαφριά ρούχα με χαλαρή εφαρμογή†. Όταν βάζετε ή βγάζετε τα ρούχα σας, προσέξτε να μην ξεκολλήσετε τον αισθητήρα.



Αθλητισμός & Σωματικές Δραστηριότητες

Ένα επίθεμα†† μπορεί να σας βοηθήσει να διατηρήσετε τον αισθητήρα σας πιο ασφαλή κατά τη διάρκεια έντονης σωματικής δραστηριότητας. Εάν ο αισθητήρας χαλαρώσει λόγω εφίδρωσης, χρησιμοποιήστε κάποιο από τα προτεινόμενα προϊόντα παρακάτω.



Ντους & Μπάνιο

Μετά το ντους ή το μπάνιο, προσέξτε πώς θα σκουπιστείτε με την πετσέτα σας για να αποφύγετε να αποκολλήσετε τον αισθητήρα.



Καθημερινές Μετακινήσεις

Προσέξτε να μη «χτυπήσετε» τον αισθητήρα σας σε πόρτες, σε έπιπλα ή στη ζώνη ασφαλείας του αυτοκινήτου.

Mastisol® Liquid Adhesive

Διαυγής, μη ερεθιστική, μη υδατοδιαλυτή υγρή κόλλα, για καλύτερη επικόλληση των επιθεμάτων eloquesthealthcare.com

Torbot Skin Tac™

Υποαλλεργικό, κολλώδες προστατευτικό φιλμ χωρίς latex torbot.com

Tegaderm I.V.

Διαφανές φιλμ που βοηθάει στην επικόλληση 3m.com

Γραμμή Υποστήριξης FreeStyle

800 11 222 68

(Δευτέρα - Παρασκευή 09.00 - 20:00,
χωρίς χρέωση από σταθερό και κινητό)

Για θέματα **τεχνικής υποστήριξης**, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την **online φόρμα** μας!

Είναι διαθέσιμη **24 ώρες το 24ωρο**, χωρίς να χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο!

Απλά σαρώστε το **QR code** ή μπείτε στην **ιστοσελίδα** μας στην ενότητα «**Υποστήριξη**» και υποβάλετε το αίτημά σας.

www.FreeStyleLibre.gr



Οι εικόνες είναι ενδεικτικές. Δεν απεικονίζονται πραγματικοί ασθενείς.

* Ο αισθητήρας είναι ανθεκτικός στο νερό σε βάθος 1 μέτρου για έως 30 λεπτά.

† Η συσκευή ανάγνωσης μπορεί να συλλέξει δεδομένα από τον αισθητήρα όταν βρίσκεται σε απόσταση 1 έως 4 εκ. από τον αισθητήρα.

** Η λίστα δεν είναι διεξοδική και δε συνιστά εγγύηση για τον κατασκευαστή ή για την ποιότητα των προϊόντων. Το τμήμα διαβήτη της Abbott δεν είναι υπεύθυνο για την εγκυρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών σχετικά με αυτά τα προϊόντα. Η διαθεσιμότητά τους μπορεί να είναι διαφορετική σε κάθε χώρα. Πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης των κατασκευαστών για κάθε προϊόν.

†† Η εφαρμογή του επιθέματος πρέπει να γίνεται κατά την τοποθέτηση του αισθητήρα και η σπλή στο κέντρο του αισθητήρα δεν πρέπει να καλύπτεται. Μπορείτε να τοποθετείτε και επιπλέον ιατρικά επιθέματα, αλλά είναι σημαντικό να τα αφαιρείτε μόνο αφού λήξει ο ενεργός αισθητήρας.

© 2026 Abbott. Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος. Το Libre, το λογότυπο με την πεταλούδα, το σχήμα του αισθητήρα και η εμφάνιση, το κίτρινο χρώμα και τα σχετιζόμενα εμπορικά σήματα ή/και σχέδια αποτελούν διανοητική ιδιοκτησία του ομίλου εταιριών Abbott σε διάφορες εδαφικές επικράτειες. Άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων δικαιούχων τους. ADC-112591 v2.0.