

Korisni savjeti za nošenje FreeStyle Libre senzora

ZAŠTO BOCKATI KAD MOŽETE SKENIRATI?!

Senzori bolje prijanjaju ako prije aplikacije operete, očistite i osušite kožu na mjestu postavljanja senzora

1. OPERITE



Koristite isključivo **nehidratizirajuće sapune bez mirisa** za pranje područja na koje ćete postaviti senzor

2. OČISTITE

Upotrijebite alkoholnu maramicu **kako biste s kože uklonili ostatke masnoće**



3. OSUŠITE



Pustite da se koža potpuno osuši na zraku prije postavljanja senzora. Ovo je posebno važno ako senzor planirate postavljati nakon tuširanja ili plivanja



PRIJE POSTAVLJANJA SENZORA:

- Budite sigurni da ste odabrali preporučeno mjesto za aplikaciju, odnosno, stražnju stranu nadlaktice
- Ne koristite losione za tijelo ili kreme na mjestu na kojemu ćete aplicirati senzor jer ta sredstva ostavljaju masne tragove na koži
- Obrijte dlačice na mjestu aplikacije senzora jer se one mogu prepriječiti između prijanjajućeg sloja na senzoru i kože

Savjeti kako zadržati senzor na mjestu aplikacije



POLAKO I PAŽLJIVO

Pazite da sa senzorom ne zapnete u uskim prolazima, na vrata od automobila ili uz rubove namještaja te da ga ne pomaknete sigurnosnim pojasom u automobilu



SUŠITE SENZOR TAPKANJEM

Nakon tuširanja ili plivanja, budite posebno oprezni prilikom brisanja ručnikom kako biste izbjegli slučajno zapinjanje i povlačenje senzora



PRIPAZITE NA ODABIR ODJEĆE

Odaberite odjeću koja je dovoljno široka i od laganih materijala kako bi vaš senzor mogao "disati"



KONTAKTNI SPORTOVI I INTENZIVNO VJEŽBANJE

Pažljivo odaberite mjesto aplikacije na stražnjoj strani vaše nadlaktice kako biste umanjili rizik od slučajnog udara u senzor i razmislite o korištenju zavoja ili bilo kojeg drugog sredstva za bolje prijanjanje senzora



USPORITE

Budite oprezni prilikom odijevanja i svlačenja kako ne biste slučajno donjim rubljem zapeli za senzor



NE DIRATI

Pokušajte izbjegavati diranje, povlačenje ili igranje sa senzorom dok ga nosite

Saznajte više na www.FreeStyleLibre.hr

ili nas nazovite na besplatni info telefon **0800 33 33 44**



FreeStyle Libre

FLASH SUSTAV ZA PRAĆENJE GLUKOZE



life. to the fullest.®

Abbott

1. Mjerenje vrijednosti glukoze u uzorku krvi iz jagodice prsta potrebno je ako dobiveno očitavanje ne odgovara simptomima ili očekivanjima. Slike služe u ilustrativne svrhe. Nisu prikaz stvarnog pacijenta. Ovaj materijal nije zamjena za stručnu medicinsku preporuku. FreeStyle, Libre i srodne trgovačke marke su zaštićene marke društva Abbott. © 2021 Abbott. ADC-22834 v 2.0