

FreeStyle
Libre 2
PLUS



Zo optimaliseert u
de verbinding tussen
beide apparaten




Het plaatsen van de
FreeStyle Libre 2 Plus-sensor
en het Omnipod® 5-Systeem.


Zichtlijn

De Pod en sensor moeten zich binnen de “zichtlijn” bevinden **voor optimale verbinding**. Dit betekent dat ze **aan dezelfde kant van het lichaam** moeten worden gedragen en zo moeten worden geplaatst dat ze elkaar kunnen ‘zien’.

De **FreeStyle Libre 2 Plus-sensor** wordt op de achterkant van de bovenarm gedragen, dan betekent dit dat de Omnipod® 5-Pod op dezelfde arm met een tussenafstand van ten minste 2,5 cm, de onderrug (alleen voor volwassenen) of bovenbil, aan dezelfde kant kan worden geplaatst.

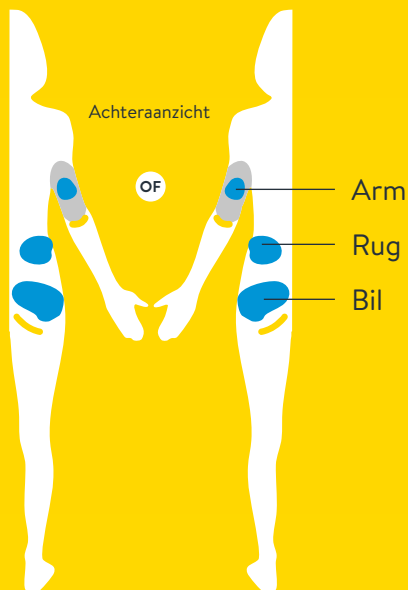

- Aanbrenglocatie voor de FreeStyle Libre 2 Plus-sensor
- Aanbrenglocatie voor de Omnipod® 5-Pod

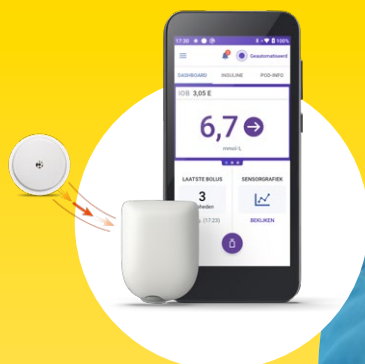

De Pod wordt getoond zonder benodigde pleister



Aandachtspunten

ZICHTLIJN



- Zorg ervoor dat de twee apparaten zich **aan dezelfde kant** van het lichaam bevinden en dat ze elkaar kunnen 'zien'.
- Zorg ervoor dat ze zo geplaatst worden dat het lichaam de verbinding niet blokkeert.
- Als ze **op dezelfde arm** worden gedragen, moeten ze minstens 2,5 cm van elkaar verwijderd zijn.

OPTIONELE, AANPASBARE ALARMEN*



- Het optionele hoge en/of lage glucose alarm wordt om de 5 minuten herhaald, totdat de glucosewaarden weer onder/boven de ingestelde waarde is of de melding bevestigd is.
- **Ontbrekende sensorglucosewaarden**
Dit alarm geeft aan dat er gedurende 20 minuten geen sensorglucosewaarden zijn ontvangen. Het kan erop wijzen dat er een signaalverlies is opgetreden tussen de FreeStyle Libre 2 Plus-sensor en de Pod. Dit optionele alarm wordt om de 5 minuten herhaald tot 5 keer, totdat de sensorglucosewaarden hersteld zijn of de melding bevestigd is.

*De waarschuwing melding staat standaard aan. Merk op dat deze waarschuwing melding kan worden uitgeschakeld, wat resulteert in een alarmfrequentie van 60 minuten die overeenkomt met die bij andere systemen.

ACTIVEREN VAN SENSOR



- Start de FreeStyle Libre 2 Plus-sensor met de App op de Omnipod® 5-Controller^{1,2}. Hiermee maakt de sensor verbinding met het Omnipod® 5-systeem, zodat het klaar is om te beginnen met de automatische insulinetoediening^{3,4}.



- De glucosewaarden, meldingen (bijvoorbeeld dat uw sensor bijna verloopt) en glucosealarmen (laag, hoog en signaalverlies) worden alleen verzonden naar de Omnipod® 5-Controller.

**FreeStyle Libre 2
Plus en Omnipod® 5**
zijn ontworpen om
één eenvoudige⁴,
geïntegreerde
ervaring te creëren

FreeStyle
 **Libre 2**
PLUS



Meer informatie op www.FreeStyleLibre.nl


Abbott

Gesimuleerde gegevens alleen ter illustratie; geen echte patiënt of gegevens.

Referenties: 1. De Omnipod® 5-app is beschikbaar in de speciale Controller. 2. Om naar de automatische modus over te schakelen, zijn een actieve Pod en een gekoppelde FreeStyle Libre 2 Plus-sensor vereist. Tijdens het opwarmen van de sensor bevindt het Omnipod® 5-systeem zich in de modus Geautomatiseerd: Beperkte staat. Wanneer het opwarmen voltooid is en er sensorglucosewaarden beschikbaar zijn, gaat het Omnipod® 5-Systeem over naar Automatisch Modus, waarbij de Pod sensorglucosewaarden gebruikt om elke 5 minuten automatisch beslissingen te nemen over de insulinedosering. 3. Meer informatie op <https://www.omnipod.com/nl-nl> 4. Gebaseerd op productkenmerken zoals een draagperiode tot 15 dagen, nauwkeurigheidgegevens en een automatische insulinetoeiening met een enkele app.

© 2025 Abbott. De sensorbehuizing, FreeStyle Libre, en gerelateerde merkaanduidingen zijn eigendom van Abbott. iPhone en App Store zijn handelsmerken van Apple Inc. Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC. Omnipod en het Omnipod-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Insulet Corporation en worden met toestemming gebruikt. Andere handelsmerken zijn eigendom van de betreffende eigenaren. De FreeStyle Libre 2 Plus-sensor is geautoriseerd om te werken met het Omnipod® 5 geautomatiseerde insulinetoeieningssysteem. De sensor is waterbestendig tot 1 meter diep. Niet langer dan 30 minuten onderdompelen. De Pod heeft een IP28 specificatie voor waterdichtheid tot een diepte van 7,6 meter gedurende 60 minuten. De Omnipod® 5 Controller is niet waterdicht. De Pod wordt getoond zonder de benodigde pleister. Abbott B.V., Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp. ADC-114811 v1