

كيفية تحميل تطبيق فري ستايل ليبري
لينك من متجر تطبيقات Google play



يمكنك
الفحص

باستخدام هاتفك!

فري ستايل
ليبري لينك
نظام فلاش لمراقبة الجلوكوز

life. to the fullest.[®]
Abbott



رمز الإستجابة السريع لتطبيق
فري ستايل ليبري لينك!



لمزيد من المعلومات:
اتصل على:

00800100869 أو 66650741

www.FreeStyleDiabetesME.com

فري ستايل
ليبري لينك
نظام فلاش لمراقبة الجلوكوز

life. to the fullest.[®]
Abbott


1. تطبيق فري ستايل ليبري لينك يتوافق مع أجهزة هواتف وأنظمة تشغيل معينة. الرجاء زيارة الموقع لمعرفة معلومات إضافية حول الأجهزة المتوافقة قبل الشروع بالاستخدام. يتطلب استخدام فري ستايل ليبري لينك التسجيل في ليبري فيو. التحميل التلقائي يتطلب اتصال إنترنت لاسلكي أو اتصال بيانات محمول. 2. إن موقع ليبري فيو يتوافق مع أنظمة تشغيل ومصفحات إنترنت معينة فقط. لأي معلومات إضافية الرجاء زيارة الموقع: www.LibreView.com 3. تطبيق ليبري لينك أب متوافق فقط مع بعض الأجهزة المحمولة وأنظمة التشغيل. يرجى مراجعة www.LibreLinkUp.com لمزيد من المعلومات حول توافق الجهاز قبل استخدام التطبيق. يتطلب استخدام فري ستايل ليبري لينك وليبري لينك أب التسجيل في ليبري فيو. لا يُقصد بتطبيق ليبري لينك أب المحمول أن يكون جهاز مراقبة الجلوكوز الأساسي. يجب على المستخدمين المنزليين استشارة أخصائهم الأساسية واستشارة أخصائي الرعاية الصحية قبل إجراء أي تفسير طبي وتعديلات علاجية من المعلومات التي يوفرها التطبيق.

الصور للأغراض التوضيحية فقط. وليست لمرضى أو أخصائي رعاية صحية حقيقي. إن البيانات الواردة بيانات صورية للأغراض التوضيحية فقط. ولا تمثل مريضاً حقيقياً أو بيانات حقيقية. بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 13 عامًا، يكون مقدم الرعاية الذي لا يقل عمره عن 18 عامًا مسؤولاً عن الإشراف عليهم وإدخالهم ومساعدتهم في استخدام نظام فري ستايل ليبري وتفسير قراءاته.


© 2021 Abbott.
فري ستايل، وليبري، والعلامات التجارية ذات الصلة هي علامات لشركة آبوت.
ADC-41118 V1.0 7/21

قم بمشاركة قراءات الجلوكوز مع طبيبك

اطلب من طبيبك إعطائك معرف العيادة
الطبية الخاص بليبري فيو، وهو كود
خاص بطبيبك.
ثم ببساطة أدخل الكود في تطبيق
فري ستايل ليبري لينك!

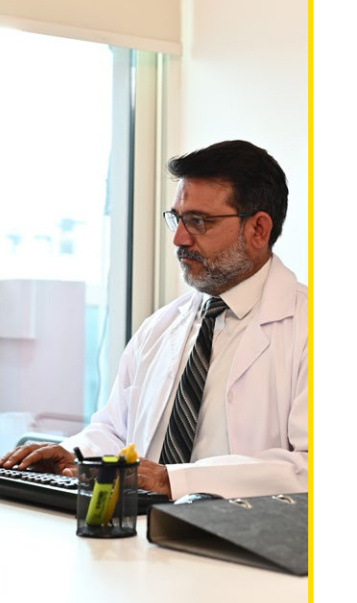


اذهب إلى:
القائمة > التطبيقات المتصلة
< ليبري فيو > الاتصال بالعيادة >
إدخال رمز معرف العيادة الطبية

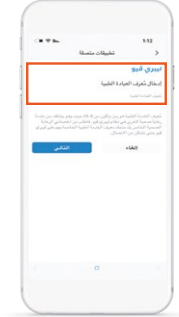

اضغط "التالي" ثم "اتصال" بعد
مراجعة معلومات العيادة
الطبية الخاصة بطبيبك.

كن على تواصل مع أحبائك عبر تطبيق ليبري لنك أب!

ليبري لنك أب هو تطبيق على الهاتف المحمول يتيح لأحبائك
تلقي قراءات الجلوكوز من تطبيق فري ستايل ليبري لينك في
الوقت الفعلي. يمكنك إضافة جهة تواصل ليبري لنك أب جديدة
من خيار "التطبيقات المتصلة" في القائمة الرئيسية لتطبيق
فري ستايل ليبري لينك!

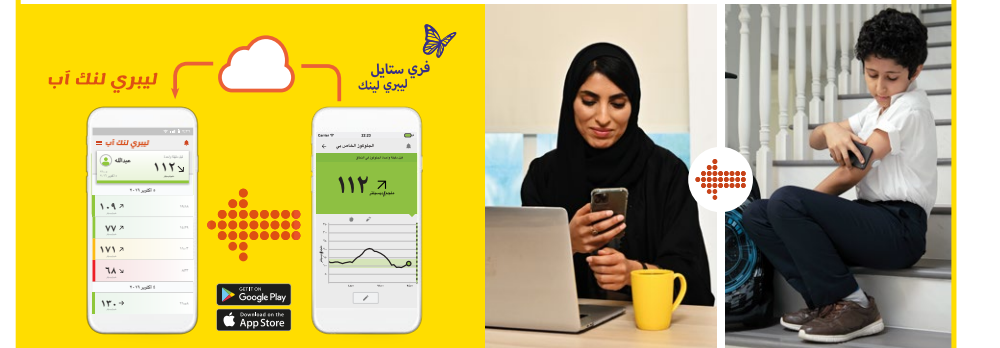

ملاحظة مهمة:
إذا كنت تنوي استخدام تطبيق فري ستايل ليبري لينك وقارئ فري ستايل ليبري ٢ مع نفس المجس، فامسح المجس بالقارئ أولاً ثم استخدم التطبيق لمسح المجس.*
*يتم استخدامه كل من القارئ والهاتف لمسح نفس المجس، فإن البيانات التي يتم تخزينها بواسطة كل منهما تكون غير متزامنة بين الجهازين.

الخيار ٢: البحث عن تطبيق فري ستايل ليبري لينك في متجر تطبيقات Google Store

الخيار ١: مسح رمز الاستجابة السريع للتطبيق




٤ انقر على أيقونة تطبيق فري ستايل ليبري لينك للتحميل مجاناً




١ بدء تشغيل متجر تطبيقات Google Play



١ افتح كاميرا هاتفك

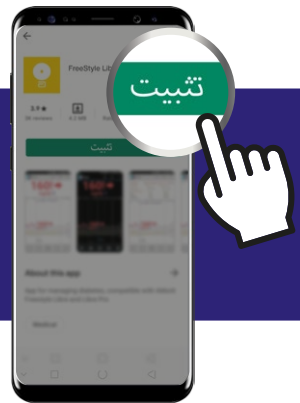


٥ انقر "تثبيت" للحصول عليه

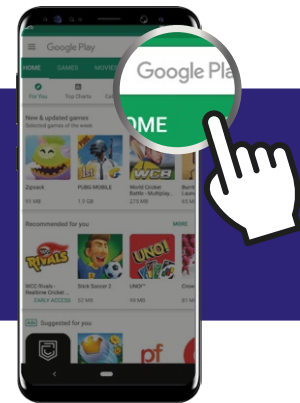


٢ انقر على مربع البحث في Google Play



٢ امسح رمز الاستجابة السريع

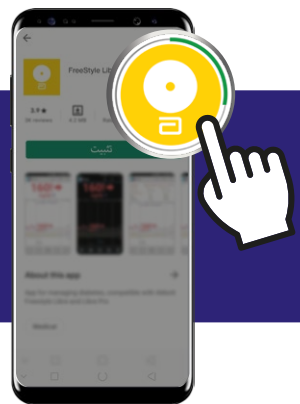

٦ انتظر اكتمال التطبيق ثم افتحه

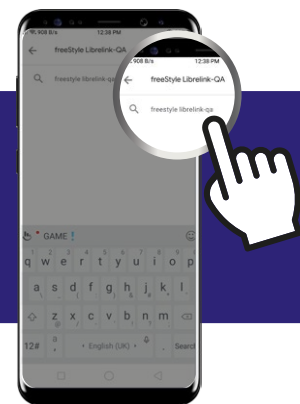

٣ اكتب FreeStyle LibreLink-QA ثم انقر على زر البحث



٣ انقر للعرض في Google play