

كيفية تحميل تطبيق فري ستايل ليبري لينك من متجر تطبيقات Apple



يمكنك الفحص باستخدام هاتفك!



رمز الإستجابة السريع لتطبيق فري ستايل ليبري لينك!



لمزيد من المعلومات:
اتصل على:

920003788

www.FreeStyleDiabetesME.com



١. تطبيق فري ستايل ليبري لينك يتوافق مع أجهزة هواتف وأنظمة تشغيل معينة، الرجاء زيارة الموقع لمعرفة معلومات إضافية حول الأجهزة المتوافقة قبل الشروع بالاستخدام. يتطلب استخدام فري ستايل ليبري لينك التسجيل في ليبري فيو. التحميل التلقائي يتطلب اتصال إنترنت لاسلكي أو اتصال بيانات محمول. ٢. إن موقع ليبري فيو يتوافق مع أنظمة تشغيل ومتصفحات إنترنت معينة فقط. لأي معلومات إضافية الرجاء زيارة الموقع: www.LibreView.com


٣. تطبيق ليبري لينك أب متوافق فقط مع بعض الأجهزة المحمولة وأنظمة التشغيل. يرجى مراجعة www.LibreLinkUp.com لمزيد من المعلومات حول توافق الجهاز قبل استخدام التطبيق. يتطلب استخدام فري ستايل ليبري لينك وليبري لينك أب التسجيل في ليبري فيو. لا يقصد بتطبيق ليبري لينك أب المحمول أن يكون جهاز مراقبة الجلوكوز الأساسي؛ يجب على المستخدمين المنزليين استشارة أجهزتهم الأساسية واستشارة أخصائي الرعاية الصحية قبل إجراء أي تفسير طبي وتعميمات علاجية من المعلومات التي يوفرها التطبيق.

الصور للأغراض التوضيحية فقط. وليست لمرضى أو أخصائيي رعاية صحية حقيقيين. إن البيانات الواردة بيانات صورية لأغراض توضيحية فقط. ولا تمثل مريضاً حقيقياً أو بيانات حقيقية. بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٤ و ١٢ عامًا يكون مقدم الرعاية الذي لا يقل عمره عن ١٨ عامًا مسؤولاً عن الإشراف عليهم وإدارتهم ومساعدتهم في استخدام نظام فري ستايل ليبري وتفسير قراءاته.

© 2022 Abbott. فري ستايل، وليبري، والعلامات التجارية ذات الصلة هي علامات لشركة Abbott Diabetes Care Ltd., Range Road, Witney, Oxon, OX29 0YL United Kingdom. ADC-50306 v1.0 MDAD01220018

قم بمشاركة قراءات الجلوكوز مع طبيبك

اطلب من طبيبك إعطائك معرف العيادة الطبية الخاص بليبري فيو، وهو كود خاص بطبيبك. ثم ببساطة أدخل الكود في تطبيق فري ستايل ليبري لينك!

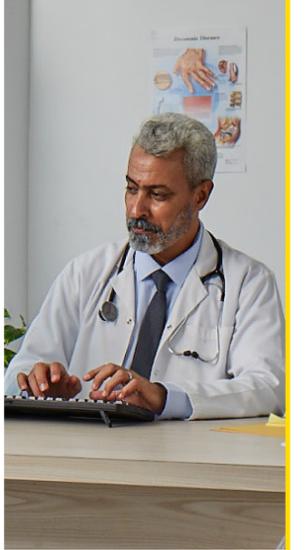

أذهب إلى:
القائمة، التطبيقات المتصلة
< ليبري فيو >، الاتصال بالعيادة،
إدخال رمز معرف العيادة الطبية



اضغط "التالي" ثم "اتصال" بعد
مراجعة معلومات العيادة
الطبية الخاصة بطبيبك.


كن على تواصل مع أحبائك عبر تطبيق ليبري لينك أب ٣

ليبري لينك أب هو تطبيق على الهاتف المحمول يتيح لأحبائك تلقي قراءات الجلوكوز من تطبيق فري ستايل ليبري لينك في الوقت الفعلي. يمكنك إضافة جهة تواصل ليبري لينك أب جديدة من خيار "التطبيقات المتصلة" في القائمة الرئيسية لتطبيق فري ستايل ليبري لينك!



ملاحظة مهمة:
إذا كنت تنوي استخدام تطبيق فري ستايل ليبري لينك وقارئ فري ستايل ليبري ٢ مع نفس المجس، فامسح المجس بالقارئ أولاً ثم استخدم التطبيق لمسح المجس.*
* يتم استخدام كل من القارئ والهاتف لمسح نفس المجس، فإن البيانات التي يتم تخزينها بواسطة كل منهما تكون غير متزامنة بين الجهازين.


الخيار ٢: البحث عن تطبيق فري ستايل ليبري لينك في متجر تطبيقات Apple

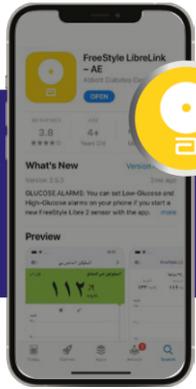

٤ انقر على أيقونة تطبيق فري ستايل ليبري لينك للتحميل مجاناً




٥ انقر "تحميل" للحصول عليه

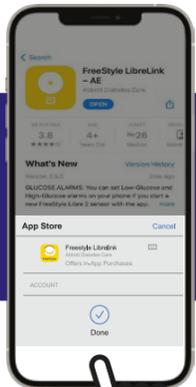


٦ ضع إصبعك على زر الصفحة الرئيسية لتنشيط معرف اللمس



١ بدء تشغيل متجر تطبيقات Apple

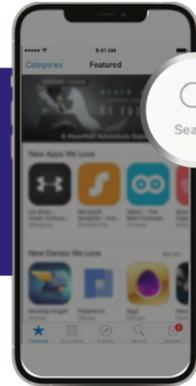

٢ انقر على العدسة المكبرة في أسفل يمين الشاشة

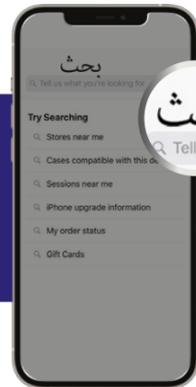

٣ اكتب FreeStyle LibreLink-QA ثم انقر على زر البحث

الخيار ١: مسح رمز الاستجابة السريع للتطبيق



١ افتح كاميرا هاتفك



٢ امسح رمز الاستجابة السريع



٣ انقر للعرض في متجر التطبيقات