

Sensörünüzü uygulamadan önce bilmeniz gerekenler.

Sensörünüzün 15 günlük kullanım süresi boyunca güvenle yerinde kalması için aşağıdaki adımları uygulayın.

1 Yıka

Sensör uygulayacağınız bölgeyi nemlendirici özelliği olmayan kokusuz bir sabun ile yıkayarak arındırın.

Sensörün daha iyi yapışmasına yardımcı olmak için üst kolunuzun arka bölgesinde (önerilen sensör uygulama bölgesi) kıl varsa traş edin.



2 Temizle

Sensör uygulama bölgesini tamamen temizleyebilmek için alkollü mendille silin.

Sensörü uygulayana kadar o bölgeye losyon ya da krem sürmeyin.



3 Kurula

Yapışkanlığı en üst düzeye çıkarmak için cildin tamamen kurumasını bekleyin.

Bulunduğunuz bölgedeki sıcaklığa ve neme bağlı olarak bu biraz zaman alabilir.



 **VIDEOLU ANLATIMI İZLEYİN**

QR kodu okutarak sensörünü adım adım nasıl uygulayacağını hemen izle.

İPUCU

Daha iyi sonuç almak için adımları duştan sonra tamamlayın.



Sensörünüzü kullanırken dikkat etmeniz gerekenler.

Sensörünüz günlük yaşamın koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak birkaç şeyi akılda tutmak kullanım süresini en üst düzeye çıkarabilir:

Duş ve yüzme sonrası¹ havluyla kurulanırken sensör bölgesine özen göstererek, yerinden oynatmadan nazikçe kurulayın.




Hafif kumaşlı, bol ve rahat giysiler² tercih edin. Üstünüzü değiştirirken sensörünüzün kıyafetlere takılmamasına özen gösterin.



Sensörünüze sürekli olarak dokunmaktan kaçının. Meraklı ellerden sensörünüzü koruyun.



Sensörünüzü kapı, araba kapısı, emniyet kemeri veya mobilya kenarlarına çarpmamaya dikkat edin.

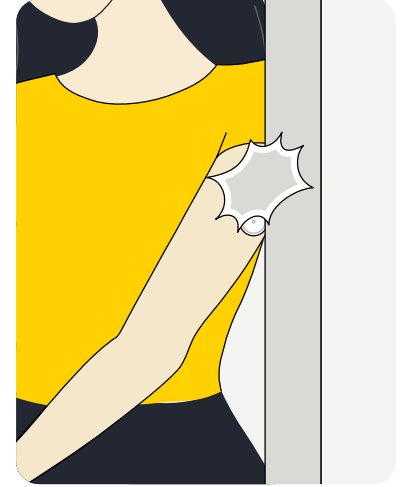

TEMAS SPORLARI VE AĞIR EĞZERSİZ

Üst kolun arkası sensör uygulaması için en ideal bölgedir. Bu bölgede dahi sensörünüze vurma riskini en aza indirecek bir yer seçtiğinizden emin olun.



**WEB SİTEMİZE
GÖZ ATIN**

1. Sensör 1 metre (3 ft) derinliğe kadar suya dayanıklıdır. 30 dakikadan fazla suya maruz bırakmayın.
2. Glukoz okumaları, sensöre 1-4 cm mesafesindeyken alınabilir.

Sensör muhafazası, FreeStyle, Libre ve ilgili markalar Abbott'un markaları olup izinle kullanılmaktadır.
©2025. Abbott. ADC-93960 v.3.0 09/25