

FreeStyle
Libre 2
PLUS



**Erken fark edin.
Hızlı harekete geçin.
Hipoglisemi riskine karşı
hazırlıklı olun.**

FreeStyle Libre 2 Plus ile glukoz trendinizin nereye doğru gittiğini kolayca bilin.

Hep Daha İleri.

Görseller ve simüle edilmiş veriler yalnızca örnekleme amaçlıdır. Gerçek hasta veya veri değildir. 2-12 yaş arası çocuklar için 18 yaş ve üzeri bakım veren biri, FreeStyle Libre 2 Plus sistemini kullanma ve ölçümleri yorumlama konusunda gözetim, yönetim ve yardım etmekten sorumludur.

Abbott

1	Hızlı Kurulum Rehberi	3
2	FreeStyle Libre 2 Sistemine Giriş	4
3	FreeStyle Libre Sensörü Nasıl Takılır?	6
4	FreeStyle LibreLink Uygulaması Nasıl İndirilir?	8
5	Kan Şekeri Ölçümlerinizi Doktorunuzla Nasıl Paylaşırsınız?	10
6	FreeStyle Libre 2 Plus Sensörünü Telefonunuzla Başlatma	12
7	Telefonunuzda Glukoz Alarmlarını Ayarlama	14
8	Şeker Değerlerini Anlama ve Yorumlama	16
9	Bakım Verenler ve Aile Üyeleri için LibreLinkUp Uygulaması	22
10	FreeStyle Libre Sensörünüzü Nasıl Değiştirirsiniz?	24

Videoları izlemek için QR kodları tarayın

FreeStyle LibreLink uygulamamın kurulumunu nasıl yaparım?



Sensörümü Nasıl Uygularım?



Glukoz verilerimi doktorumla kolayca nasıl paylaşabilirim?



Düşük ve yüksek glukoz alarmlarımı nasıl kişiselleştirebilirim?



FreeStyle Libre 2 sistemiyle tanışın

FreeStyle Libre 2 Plus ile şeker seviyenizi güvenle yönetin.

15



Her dakika otomatik glukoz ölçümü¹

Glukoz seviyenizi tek bir bakışta akıllı telefonunuzdan² kolayca öğrenin.

Parmak delme yok³

15 güne kadar kesintisiz glukoz takibi sunan FreeStyle Libre 2 Plus sensörlerle parmak delmeye veda edin.

İsteğe bağlı alarmlar⁴

Her dakika yenilenen ölçümler sayesinde, glukoz seviyeniz değiştiğinde alarm anında devreye girer.



FreeStyle Libre 2 Plus Sensör




Küçük ve göze çarpmaz, 1 TL'lik bir madeni paraya benzer.



FreeStyle Libre 2 Plus sensör banyo yaparken, yürürken¹ ve egzersiz yaparken takılabilir.

FreeStyle LibreLink Uygulaması²

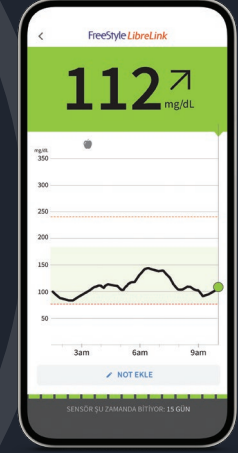

Her dakika otomatik yenilenen glukoz ölçümlerinizi anında akıllı telefonunuzdan³ görüntüleyin.



Glukoz trendini ve eğilimlerini kolayca görün; beslenmenin, fiziksel aktivitenin ve ilaçların glukozunuz üzerindeki etkisini anında öğrenin.

1. Glukoz ölçümleri yalnızca sensör akıllı telefona bağlandığında menzil dahilinde olduğunda uygulama üzerinden otomatik olarak görüntülenir. 2. FreeStyle LibreLink uygulaması yalnızca belirli mobil cihazlar ve işletim sistemleriyle uyumludur. Uygulamayı kullanmadan önce cihaz uyumluluğu hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi kontrol edin. Glukoz verilerinin paylaşılabilmesi için LibreView'a kaydolmak gerekir. 3. Glukoz ölçümleri ve alarmlar semptomlarla veya beklentilerle uyumsuzsa parmak delme işlemi gereklidir. 4. Bildirimler yalnızca alarmlar açık olduğunda ve sensör ile uygulamanın olduğu cihazınız engelsiz 6 metre mesafe içerisinde olduğunda alınacaktır. 2-12 yaş arası çocuklar için 18 yaş ve üzeri bakım veren biri, FreeStyle Libre 2 Plus sistemini kullanma ve ölçümleri yorumlama konusunda gözetim, yönetim ve yardım etmekten sorumludur.

1. Sensör 1 metreye kadar suya dayanıklıdır. 30 dakikadan uzun süre sensörün tamamı suda kalacak şekilde suda kalmayın. 2. FreeStyle LibreLink uygulaması yalnızca belirli mobil cihazlar ve işletim sistemleriyle uyumludur. Uygulamayı kullanmadan önce cihaz uyumluluğu hakkında daha fazla bilgi için web sitesini kontrol edin. FreeStyle LibreLink kullanımı, LibreView'e kayıt gerektirir. 3. Uygulama, sensörün yakın mesafede olduğu durumlarda sensörden veri alabilir.



Videoyu
izleyin

FreeStyle Libre 2 Plus Sensörünün Uygulanması

FreeStyle Libre 2 Plus sensörünü kullanmaya başlamak için izlenmesi gereken basit adımlar

Üst kolunuzun arka kısmında bir bölge seçin. Uygulama alanını hazırlayın ve sensörü doğru şekilde uygulayın.



- 1. “Üst kolun arka kısmında” sensörü uygulamak istediğiniz bölgeyi belirleyin.
- 2. Bölgeyi nemlendirici içermeyen, kokusuz bir sabun ve suyla yıkayın.
- 3. Sensörü uygulamadan önce¹ cildin kendi kendine kurumasını bekleyin.



- 4. Sensör paketini açın ve sensör aplikatörünü çevirerek çıkarın.
- 5. Düz bir zemin üzerinde, sensör aplikatörü ile sensör paketi üzerindeki **koyu gri** işaretleri hizalayın.
- 6. Bir tıklama sesi duyuncaya kadar^{2,3} sıkıca bastırın.



- 7. Sensörü uygulamak için sensör aplikatörünü “üst kolun arka kısmına” sıkıca bastırın^{4,5}.



- 8. Sensör artık cilde yapışmış olmalıdır.

Yıkayın, Temizleyin ve Kurulayın: Uygulama öncesinde cildi yıkayarak temizleyip kuruladığında sensörler daha iyi yapışır.

Uygulama ile ilgili tüm talimatlar için sensör kitinin içindeki ürün kullanım kılavuzuna bakınız.

1. İnsülin enjeksiyon bölgesinden en az 2,5 cm uzak bir bölge seçin. Rahatsızlık veya cilt tahrişini önlemek için en son kullanılan bölgeden farklı bir alan seçmelisiniz. 2. **Dikkat:** Sensör paketi veya sensör uygulayıcısı hasarlı veya önceden açılmış görünüyorsa kullanmayın. Son kullanma tarihi geçmişse kullanmayın. 3. **Dikkat:** Sensör uygulayıcısında artık bir iğne bulunmaktadır. Sensör uygulayıcısının iç kısmına dokunmayın veya sensör paketini geri koymayın. 4. **Dikkat:** İstenmeyen sonuçları önlemek veya yaralanmaları önlemek için sensör uygulayıcısını hazırlanan bölge üzerine yerleştirilmeden önce aşağıya doğru bastırın. 5. Sensörün uygulanması morarma veya kanamaya neden olabilir. Kanama durmazsa sensörü çıkarın ve farklı bir bölgeye yeni bir sensör uygulayın. Uygulama sonrası sensörün sağlam olduğundan emin olun.



Videoyu
izleyin



FreeStyle LibreLink
Uygulamasını İndirin


Daha iyi bir diyabet yönetimi için FreeStyle LibreLink uygulamasını indirin¹




FreeStyle LibreLink uygulamasını indirmek işte bu kadar kolay:

- 1 Akıllı telefonunuzun kamerasını açın
- 2 Aşağıdaki QR kodlardan akıllı telefonunuza ait olanı okutun ve bağlantıyı açın
- 3 FreeStyle LibreLink uygulamasını indirin ve yükleyin


Veya: Apple App Store veya Google Play Store'u açın ve arama çubuğuna "FreeStyle LibreLink" yazın. Ardından uygulamayı indirin ve yükleyin.

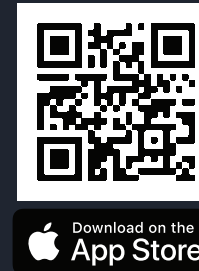

Download on the
App Store

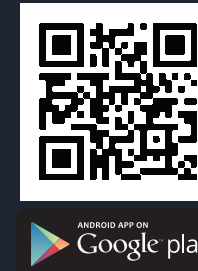

ANDROID APP ON
Google play

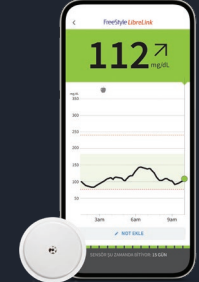

Akıllı telefonunuzun FreeStyle LibreLink uygulamasını indirmek ve kullanmak için uyumlu olup olmadığını mutlaka kontrol edin!
QR kodu okutarak websitemizin ilgili sayfasını ziyaret ediniz.

¹ FreeStyle LibreLink uygulaması yalnızca belirli mobil cihazlar ve işletim sistemleriyle uyumludur. Uygulamayı kullanmadan önce cihaz uyumluluğu hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitesini kontrol edin (<https://www.freestyle.abbott/tr-tr/detek/mobil-uyumluluk-kilavuzu.html>). FreeStyle LibreLink kullanımı, LibreView'e kayıt olmayı gerektirir.




Videoyu
izleyin



Glukoz verilerinizi
doktorunuzla paylaşın

Glukoz verilerinizi doktorunuzla nasıl paylaşırsınız?


FreeStyle LibreLink uygulamasında¹ aşağıdaki adımları izleyin ve doktorunuzun LibreView² Sağlık Uzmanı Kimliği'ni girin.

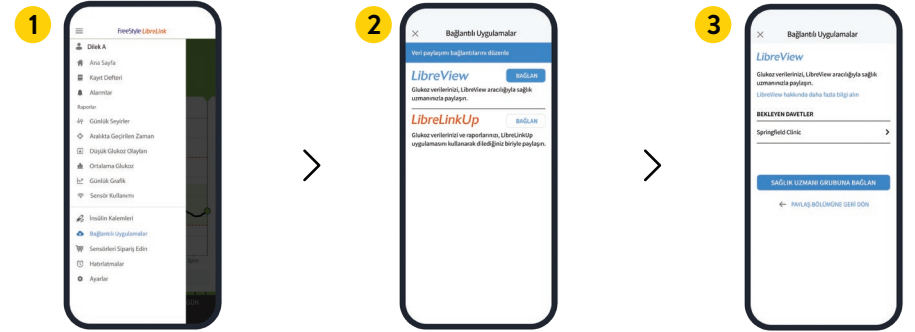

Menüden “**Bağlantılı Uygulamalar**” seçeneğine tıklayın

Veri paylaşım seçenekleri arasında “**LibreView**”’i seçin.

“**Sağlık Uzmanı Grubuna Bağlan**” butonuna tıklayın

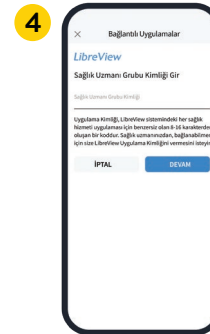



Doktorunuzdan veya klinik personelinden, doktorunuzun kliniğine özel bir kod olan LibreView **Sağlık Uzman Grubu Kimliği**'ni isteyin.

Doktorunuzun “**Sağlık Uzmanı Kimliği**”ni girin, “**Devam**”a tıklayın ve doktorunuzun kliniğine ait iletişim bilgilerinizi görüntüledikten sonra **Bağlan**'a basın.

1. FreeStyle LibreLink uygulaması yalnızca belirli mobil cihazlar ve işletim sistemleriyle uyumludur. Uygulamayı kullanmadan önce cihaz uyumluluğu hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitesini kontrol edin. FreeStyle LibreLink kullanımı, LibreView'e kayıt olmayı gerektirir.
2. LibreView web sitesi yalnızca belirli işletim sistemleri ve tarayıcılarla uyumludur. Daha fazla bilgi için lütfen www.LibreView.com adresini kontrol edin.

Yeni FreeStyle Libre 2 Plus sensörünüzü iPhone'1 telefonunuzla nasıl başlatırsınız?

FreeStyle Libre 2 Plus sensörü başlatırken Bluetooth açık olmalı ve her zaman açık kalmalıdır.

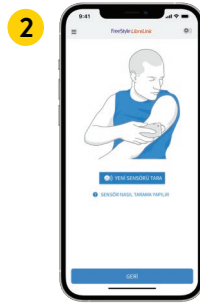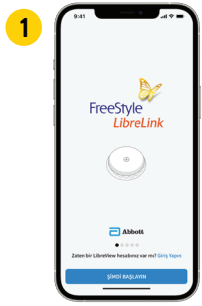

“GİRİŞ YAP” veya “ŞİMDİ BAŞLA” seçeneğine dokununuz ya da mevcut hesabınızla giriş yapınız.

“YENİ SENSÖRÜ OKUT” seçeneğine dokununuz.






Yeni sensörünüzü akıllı telefonunuzun üst kısmıyla okutarak etkinleştiriniz.

Sensörünüz “60 dakika” içinde kullanıma hazır olacaktır. Akıllı telefonunuzu kullanmaya devam edebilirsiniz. Bildirimler açıksa, sensör hazır olduğunda bir bildirim alırsınız.

Yeni FreeStyle Libre 2 Plus sensörünüzü Android'1 telefonunuzla nasıl başlatırsınız?

Sensörünüzü FreeStyle LibreLink uygulamasıyla başlatabilmek için akıllı telefonunuzda NFC özelliğinin etkinleştirilmiş olması gerekir.

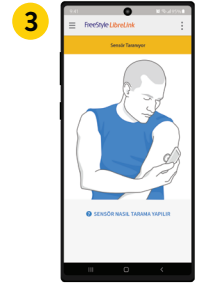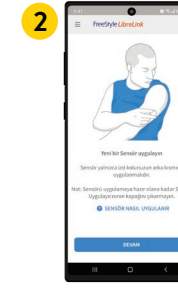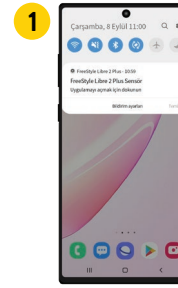

Uygulamanın her zaman arka planda çalışmasına izin veriniz.

Sensörünüzü üst kolunuzun arka kısmına nazikçe uygulayınız.


Sensörünüzü akıllı telefonunuzun arka kısmını sensöre dokundurarak okutunuz. Modeller arası farklılık olabilir.




Sensörünüz “60 dakika” içinde kullanıma hazır olacaktır. Akıllı telefonunuzu kullanmaya devam edebilirsiniz. Bildirimler açıksa, sensör hazır olduğunda bir bildirim alırsınız.

FreeStyle LibreLink uygulamanızda¹ alarmları² ayarlamak çok kolaydır


Opsiyonel (isteğe bağlı) alarmlar, ne zaman bilgilendirilmek istediğinizi seçmenizi sağlar. Alarmları ihtiyacınıza göre açıp kapatabilirsiniz.

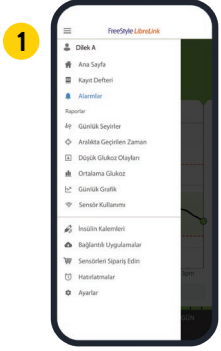


Ana menüde “**Alarmlar**” seçeneğine dokununuz.

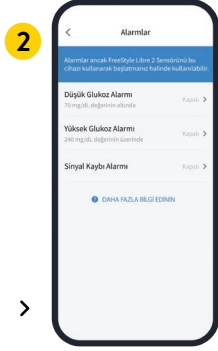


İstedüğün “**Alarm**”’ı seçin.

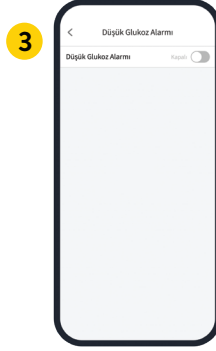


“**Alarm**”’ı açmak için kaydırıcıya dokununuz veya sağa doğru kaydırın.

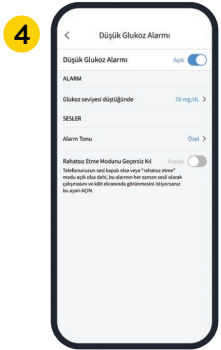


Glukoz alarmı “**Açık**” konumuna getirildiğinde, sinyal kaybı alarmı otomatik olarak etkinleştirilir.

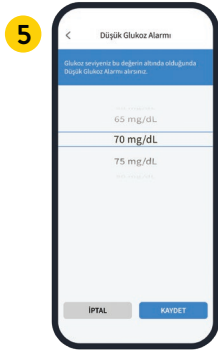

Ardından düşük glukoz alarm sınırını ayarlayabilirsiniz.

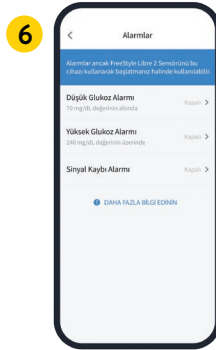

Yüksek glukoz alarmını aynı adımları izleyerek ayarlayın.

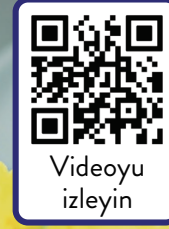


Videoyu izleyin



Glukoz alarmlarını ayarlayın

¹FreeStyle LibreLink uygulaması yalnızca belirli mobil cihazlar ve işletim sistemleriyle uyumludur. Uygulamayı kullanmadan önce cihaz uyumluluğu hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitesini kontrol edin. FreeStyle LibreLink'in kullanımı, LibreView'e kayıt olmayı gerektirir. ²Bildirimler yalnızca alarmlar açık olduğunda ve sensör ile uygulamanın olduğu cihazınız engelsiz 6 metre mesafe içerisinde olduğunda alınacaktır.

Artık glukoz ölçümlerinizi ilgili her şeyi akıllı telefonunuzdan takip edin

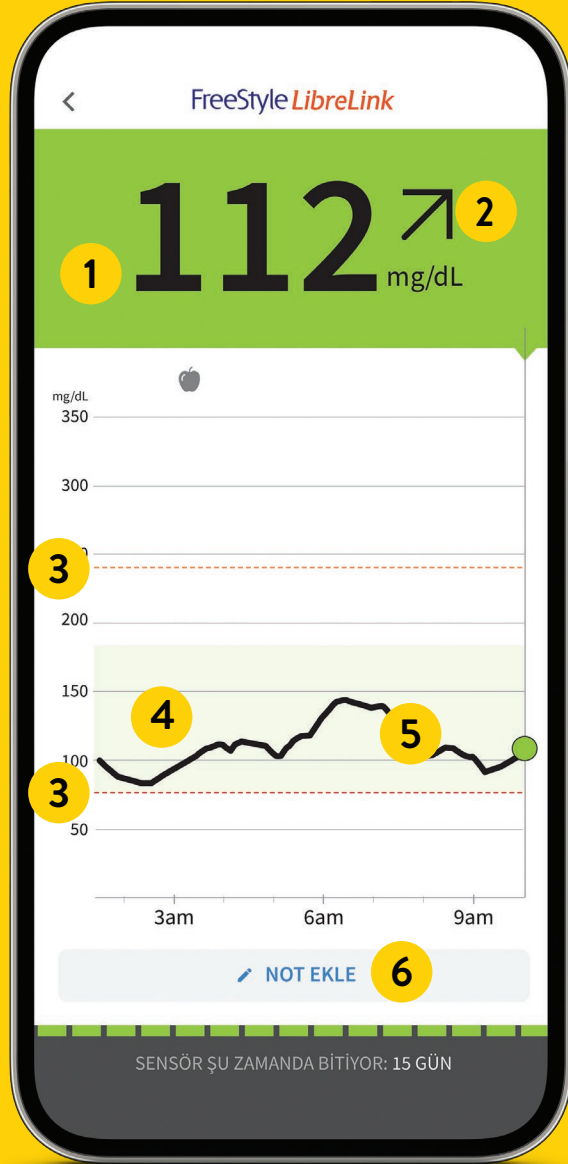


FreeStyle LibreLink uygulaması¹ ile anlık glukoz değerlerinizi, trend okunu, geçmiş verilerinizi ve daha fazlasını görüntüleyebilirsiniz

-  **Anlık Glukoz Ölçümleri**
Her dakika otomatik yenilenen şeker ölçümleri.
-  **Trend Oku**
Yükselişleri, düşüşleri ve gece hipoglisemilerini kolayca fark etmenizi; şeker seviyelerinin hangi yönde ve ne kadar hızlı değiştiğini görmeyi sağlar.
-  **Opsiyonel Alarmlar²**
Yüksek ve düşük glukoz alarmları için belirlenen aralık değerlerine göre seçiminizi yaparak alarm özelliğini etkinleştirebilirsiniz.
-  **Glukoz Hedef Aralığı**
Hedef aralığın üzerinde veya altında olduğunuz durumları kolayca belirleyin.
-  **Glukoz Grafği**
8 saate kadar glukoz geçmişi.
-  **Kayıt Defteri**
“NOT EKLE” özelliğini kullanarak girdiğiniz insülin uygulama zamanı, egzersiz ve beslenme detaylarını takip etmenizi sağlar.

¹FreeStyle LibreLink uygulaması yalnızca belirli mobil cihazlar ve işletim sistemleriyle uyumludur. Uygulamayı kullanmadan önce cihaz uyumluluğu hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitesini kontrol edin. FreeStyle LibreLink'in kullanımı, LibreView'e kayıt olmayı gerektirir. ²Bildirimler yalnızca alarmlar açık olduğunda ve sensör ile uygulamanın olduğu cihazınız engelsiz 6 metre mesafe içerisinde olduğunda alınacaktır.

"NOT EKLE" özelliği ile glukoz seviyenizi ve trendinizi daha iyi anlayabilirsiniz

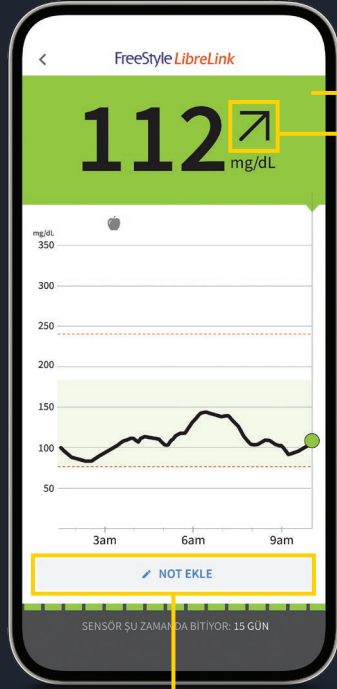

FreeStyle LibreLink uygulamanızın¹ "NOT EKLE" özelliğini kullanın

FreeStyle LibreLink uygulamasında notları sonradan kaydedebilir, düzenleyebilir ve "Kayıt Defteri" alanında görüntüleyebilirsiniz.



Beslenme



Egzersiz



İlaç

Hedef Aralık ve Trend Okları, şeker seviyenizin nerede olduğunu ve nereye doğru gittiğini gösterir

Mevcut glukoz seviyeniz, akıllı telefon¹ ekranının arka plan rengini belirler. Böylece glukoz seviyenizin hangi aralıkta olduğunu hızlıca görebilirsiniz. Trend oku, şekerinizin hangi yönde hareket ettiğini gösterir.

Hedef Aralıkta Geçen Zaman, glukoz seviyenizin belirlediğiniz hedef aralıkta kaldığı sürenin yüzdesini ölçer.

Çok Yüksek (>240 mg/dL)

Yüksek (>180 mg/dL)

Hedef Aralık (70-180 mg/dL)

Düşük (<70 mg/dL)

Çok Düşük (<55 mg/dL)



Glukoz hızla yükseliyor



Glukoz yükseliyor



Glukoz yavaş değişiyor



Glukoz düşüyor




Glukoz hızla düşüyor

¹FreeStyle LibreLink uygulaması yalnızca belirli mobil cihazlar ve işletim sistemleriyle uyumludur. Uygulamayı kullanmadan önce cihaz uyumluluğu hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitesini kontrol edin. FreeStyle LibreLink'in kullanımı, LibreView'e kayıt olmayı gerektirir.

Glukoz yükseliş ve düşüşlerinizi takip edin ve glukoz seviyelerinizle ilgili ayrıntılı raporlar alın

FreeStyle Libre sisteminin raporlarını anlamak, hipo ve hiperglisemi olaylarından kaçınmanıza ve glukoz trendinizi takip etmenize yardımcı olur¹

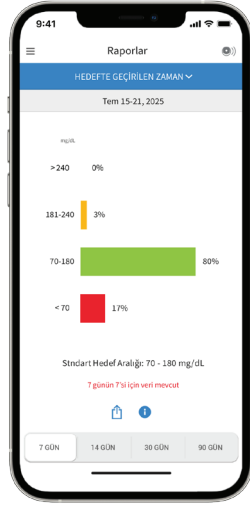

Hedef Aralıkta Geçirilen Zaman

Bu özellik, glukoz seviyelerinizin Hedef Aralık içinde ne sıklıkla kaldığına hızlıca dair bir fikir verir.

Ortadaki yeşil "**Hedef Aralık**" çubuğu, sensör ölçümlerinizin ilgili süre boyunca hedef aralıkta kaldığı zamanın yüzdesini gösterir.

Hedef aralığın üzerinde veya altında geçirdiğiniz süre turuncu ve kırmızı çubuklarla gösterilir. Hedef Aralık değeri ne kadar yüksekse, o kadar iyidir!



Glukozunuzu takip edin

Aileniz için güven ve gönül rahatlığı

LibreLinkUp


LibreLinkUp uygulaması¹ ile aile bireyleri ve bakım verenler glukoz ölçümlerinizi uzaktan takip edebilir ve alarmlar ile bildirim alabilir. Bu işinizin rahat olmasını sağlar ve diyabet yönetiminizde ek destek sunar.




Glukoz değerlerinizi sevdiğinizlerle, ister alarmlarla ister alarmsız olarak LibreLinkUp uygulamasıyla paylaşın.




Aile üyeleri, şeker seviyeniz çok yükseldiğinde veya çok düştüğünde size destek olabilir.

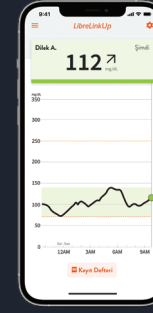

LibreLinkUp'u şimdi ücretsiz olarak Apple App Store veya Google Play Store'dan indirin.

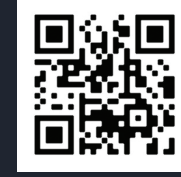

Download on the
App Store

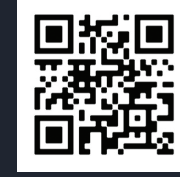

ANDROID APP ON
Google play



Sevdiklerinizle bağlantı kurma adımları:

- 1 FreeStyle LibreLink uygulamanızı açın¹
- 2 Uygulama menüsünden **Bağlı Uygulamalar**'i seçin
- 3 LibreLinkUp² bölümünde **Bağlan**'i seçin
- 4 Glukoz değerlerinizi paylaşmak istediğiniz kişinin adını, soyadını ve e-posta adresini girin
- 5 **"Tamamlandı"** ile onaylayın. Karşı taraf davetinizi kabul edene kadar veriler paylaşılmaz.

Sevdiklerinizin yapması gerekenler:

- 1 LibreLinkUp uygulamasını indirin.
- 2 Uygulama menüsünden **"Başla"**, ardından **"Hesap Oluştur"**u seçin.
- 3 Uygulamada gösterilen adımları izleyerek bir **LibreView** hesabı oluşturun.
- 4 Görünen daveti kabul edin.
- 5 Artık güvenilir kişi³ olarak tanımladığınız kişinin şeker verilerini alacaksınız.

¹ LibreLinkUp uygulaması yalnızca belirli mobil cihazlar ve işletim sistemleriyle uyumludur. Uygulamayı kullanmadan önce cihaz uyumluluğu hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.freestyle.abott/tr-izlenimler/mobil-uygulamalar/librelinkup adresini ziyaret edin. LibreLinkUp ve FreeStyle LibreLink uygulamalarının kullanımı, LibreView'e kayıt olmayı gerektirir. LibreLinkUp mobil uygulamasının birincil glukoz görüntüleyicisi olması amaçlanmamıştır. Kullanıcılar, uygulama tarafından sağlanan bilgiler aracılığıyla herhangi bir tıbbi yorum ve tedavi ayarlaması yapmadan önce cihazın kullanıcılarına ve bir sağlık uzmanına danışmalıdır. ² Bildirimler yalnızca alarmlar açık olduğunda ve sensör ile uygulamanın olduğu cihazınız engelsiz 6 metre mesafe içerisinde olduğunda alınacaktır. ³ 2-12 yaş arası çocuklar için 18 yaş ve üzeri bakım veren biri, FreeStyle Libre 2 Plus sistemini kullanma ve ölçümleri yorumlama konusunda gözetim, yönetim ve yardım etmektен sorumludur.

¹ FreeStyle LibreLink uygulaması yalnızca belirli mobil cihazlar ve işletim sistemleriyle uyumludur. Uygulamayı kullanmadan önce cihaz uyumluluğu hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitesini ziyaret edin. FreeStyle LibreLink'in kullanımı, LibreView'e kayıt olmayı gerektirir. ² LibreLinkUp mobil uygulamasının birincil glukoz görüntüleyicisi olması amaçlanmamıştır. Kullanıcılar, uygulama tarafından sağlanan bilgiler aracılığıyla herhangi bir tıbbi yorum ve tedavi ayarlaması yapmadan önce cihazın kullanıcılarına ve bir sağlık uzmanına danışmalıdır. ³ Glukoz verilerinin otomatik olarak yüklenmesi için kullanıcının cihazının internet bağlantısının olması gerekmektedir.

Sensörünüzün çıkarılması ve yenisiyle değiştirilmesi

Sensör, 15 güne kadar kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Sistem bileşenlerini nasıl çıkaracağınız, değiştireceğiniz ve uygun şekilde nasıl imha edeceğinizi aşağıda açıklanmıştır.



Sensörü Çıkarın

Uygulamanız, sensörü çıkarma zamanı geldiğinde sizi bilgilendirecektir. Sensörü cildinize bağlı tutan yapışkanlı kenarı kaldırın. Ardından tek bir hareketle, cildinizden yavaşça çıkarın.



Sensörü Değiştirin

Sensörünüz, 15 günün sonunda verileri otomatik olarak ölçmeyi durdurur ve değiştirilmesi gerekir. Sensör stoğunuz bitmeden önce yeni sensörlerinizi temin ettiğinizden emin olun.

Yeni sensörü uygularken üst kolunuzun arka kısmında farklı bir bölge seçmeyi unutmayın. Bu, cilt tahrişini önlemeye yardımcı olur.

Sensörün İmhası:

Sensör; elektronik ekipman, piller, kesici-delici atıklar ve vücut sıvılarıyla temas etmiş olabilecek materyallerin imhasına ilişkin geçerli tüm yerel düzenlemelere uygun olarak imha edilmelidir.

Daha fazla bilgi için Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.



Freestyle Libre 2 Plus sensör bileşenleri



FreeStyle
LibreLink App


FreeStyle
Libre 2 Plus Sensör

FreeStyle
Libre 2 Okuyucu

1 DÜNYANIN
EN ÇOK
TERCİH EDİLEN'
CGM'İ




Hep Yanınızdayız!

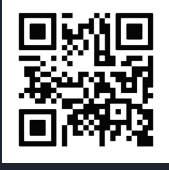

Sensörünüzle ilgili her türlü bildirimini
7/24 web sitemizden anında iletebilirsiniz.

Destek almak için QR kodu okutun.

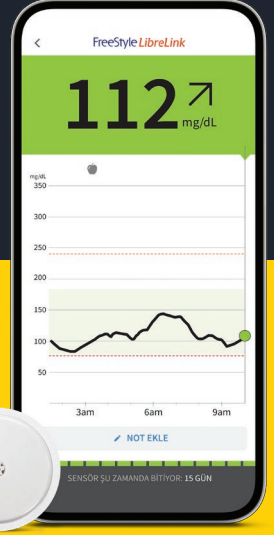

Libre sistemi hakkında sorularınız mı var?

Müşteri Destek Ekibimize iletişime geçin:
Hafta içi: 09:00 – 17:00 (Resmi tatiller hariç)
☎ 0850 577 7504



Ürünle ilgili detaylı bilgi ve kapsamlı
hizmetlerimize web sitemizden
ulaşabilirsiniz.
www.freestyle.abbott/tr-tr

Sosyal medyadan bizi takip edin!



En güncel paylaşımlar
FreeStyleTürkiye



Ücretsiz eğitim videoları
FreeStyleTürkiye



Görseller ve simüle edilmiş veriler yalnızca örnekleme amaçlıdır. Gerçek hasta veya gerçek veriler değildir.

© 2026 Abbott. Tüm Hakları Saklıdır. Libre, kelebek logosu, sensör şekli ve görünümü, sarı renk ve ilgili markalar ve/veya tasarımlar, Abbott şirketler grubunun çeşitli bölgelerdeki fikri mülkiyetidir. Diğer markalar ilgili sahiplerine aittir. ADC-126022 v2.0 02/26