



Guia de aplicação do sensor FreeStyle Libre

Aqui estão algumas dicas para ajudar você a manter o sensor no lugar

AO SELECIONAR O LOCAL DE APLICAÇÃO DO SENSOR, LEMBRE-SE DE



- Selecione uma área na **parte de trás do braço** que geralmente permaneça plana (sem se dobrar ou flexionar).
- Escolher um local que esteja a pelo menos 2,5 cm (1 polegada) de **distância de um local de injeção de insulina**.
- Evite desconforto ou irritação da pele **selecionando um local diferente daquele que foi usado mais recentemente**.
- Certifique-se de que o local esteja **depilado** para evitar interferência no sensor.

LIMPEZA DA SUPERFÍCIE DA PELE PARA A ADESÃO IDEAL



1. LAVE

Use apenas sabonete, não hidratante e sem fragrância para lavar a área.

2. LIMPE

Use o lenço com álcool, contido na embalagem, para remover qualquer resíduo oleoso.

3. SECAR

Deixe sua pele **secar completamente** antes de aplicar o sensor. Isso é especialmente importante se você planeja aplicar o sensor depois de tomar banho ou nadar.

ALGUMAS DICAS DO QUE DEVE SER EVITADO ENTRE O SENSOR E A PELE



- Qualquer tipo de umidade
- Pelos; considere raspar a área de aplicação
- Resíduos oleosos de sabonete, cremes, xampu ou condicionador

PARA AJUSTAR O APLICADOR COM O SENSOR SEMPRE FAÇA EM CIMA DE UMA SUPERFÍCIE DURA E PLANA



FreeStyle Libre

- **Retire a tampa da embalagem** do sensor e **rompa o lacre** da tampa do aplicador do sensor.
- **Alinhe as marcas** | das embalagens do aplicador com a do pote do sensor. Após alinhadas, pressione para baixo firmemente o aplicador contra o pote do sensor até que ele pare.
- **Puxe o aplicador para fora do pote do sensor.** Pronto o aplicador do sensor agora está pronto para ser usado e aplicar o sensor no seu braço.

OBSERVAÇÃO: os códigos do pacote de sensores e do aplicador de sensores devem corresponder ou as leituras de glicose poderão ser imprecisas.

CUIDADO: os aplicadores do sensor contêm uma agulha. Não toque no interior do aplicador do sensor nem coloque-o de volta no pacote do sensor.

SIGA ESTAS ORIENTAÇÕES AO APLICAR O SENSOR



- Coloque o aplicador do sensor sobre o local da aplicação na parte posterior do braço, **pressione com firmeza** e mantenha-o pressionado por alguns segundos.
- **Puxe com cuidado** o aplicador do sensor para longe de seu corpo.
- **Certifique-se de que o sensor esteja seguro** pressionando-o para baixo e passando o dedo ao longo do adesivo do sensor.

O USO DE PRODUTOS COM PROPRIEDADES HIDRATANTES PODE AJUDÁ-LO A REMOVER O SENSOR

ÓLEO PARA BEBÊS

Um hidratante suave.

REMOVEDOR DE ADESIVO

Remove resíduos de adesivo na pele.

SOLUÇÃO LIMPADORA

Auxiliar na remoção de curativos e trauma adesivo na pele, dissolvendo completamente as fitas de curativos e os adesivos.

Estamos aqui para ajudar. Para obter mais informações visite nosso site [FreeStyleLibre.com.br](https://www.FreeStyleLibre.com.br) e veja nossos vídeos tutoriais. Caso precise assistência, entre em contato com a **Equipe de Atendimento ao Cliente da Abbott - Ligue 0800 703 0128** (ligação gratuita) de segunda a sexta das 08h às 17h, sábado das 08h às 14h (exceto feriados).



Informações importantes sobre segurança

Se as leituras não corresponderem aos sintomas ou às expectativas, use um valor de punção digital de um medidor de glicose no sangue para tomar decisões de tratamento. Consulte um médico quando apropriado.

Ligue 0800 703 0128 (ligação gratuita) de segunda a sexta das 08h às 17h, sábado das 08h às 14h (exceto feriados). Imagens meramente ilustrativas. Para indicações de uso e contraindicações dos produtos citados, consulte www.FreeStyleLibre.com.br.

FreeStyle Libre Sensor - RMS ANVISA: 80146502021. FreeStyle Libre Leitor - RMS ANVISA: 80146501903. ANATEL - 4072-14-9992. FreeStyle LibreLink - RMS ANVISA: 80146502168. LibreView e LibreLinkUp - RMS ANVISA: 80117580705. Produtos LibreView e LibreLinkUp cadastrados por Emergo Brazil Import - importação e distribuição de produtos médicos hospitalares LTDA. A estrutura do sensor, FreeStyle Libre e marcas relacionadas são marcas da Abbott. Abbott FreeStyle: 0800 703 0128.