



Juntos no monitoramento da glicose com o aplicativo LibreLinkUp



FreeStyle **LibreLink**

- ➔ Com o aplicativo FreeStyle LibreLink você pode verificar seus níveis de glicose utilizando um smartphone com as mesmas funcionalidades do leitor FreeStyle Libre.¹
- ➔ Leituras de glicose a qualquer hora e em qualquer lugar.

LibreLinkUp

- ➔ O aplicativo LibreLinkUp é ideal para pais e cuidadores, com um máximo de 20 convites.
- ➔ Compartilhe os valores e as tendências da sua glicose com familiares, amigos e cuidadores.
- ➔ Saiba em tempo real quando os níveis de glicose estiverem muito altos ou muito baixos, permitindo o acompanhamento mesmo a distância.

BAIXAR NA
App Store

OBTER NO
Google Play

Apple e o logotipo da Apple são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países. Google Play e o logotipo do Google Play são marcas comerciais da Google LLC.



LIBRELINKUP: COMPARTILHE SUAS LEITURAS DE GLICOSE COM SEUS ENTES QUERIDOS

Amigos, cuidadores e familiares podem monitorar seus níveis de glicose remotamente.¹




LIBREVIEW: COMPARTILHE SEUS DADOS DE GLICOSE COM SEU PROFISSIONAL DE SAÚDE

A cada leitura, seus dados de glicose são automaticamente carregados no LibreView.¹

1. O aplicativo FreeStyle LibreLink é compatível apenas com determinados dispositivos móveis e sistemas operacionais. Consulte www.freestylelibre.com. O LibreLinkUp permite que os cuidadores façam conexões com até 20 usuários do FreeStyle LibreLink. Da mesma forma, os usuários do FreeStyle LibreLink podem compartilhar informações de glicose com até 20 conexões do LibreLinkUp.com.br para obter mais informações sobre compatibilidade de dispositivos antes de usar o aplicativo. O uso do FreeStyle LibreLink requer registro no LibreView. A transferência de dados de glicose entre os aplicativos FreeStyle LibreLink e LibreLinkUp depende da conexão com a internet.

3 passos fáceis para compartilhar remotamente suas leituras de glicose com amigos e familiares usando o aplicativo LibreLinkUp.


Para compartilhar suas leituras de glicose, primeiro faça o download do aplicativo FreeStyle LibreLink em seu smartphone.¹

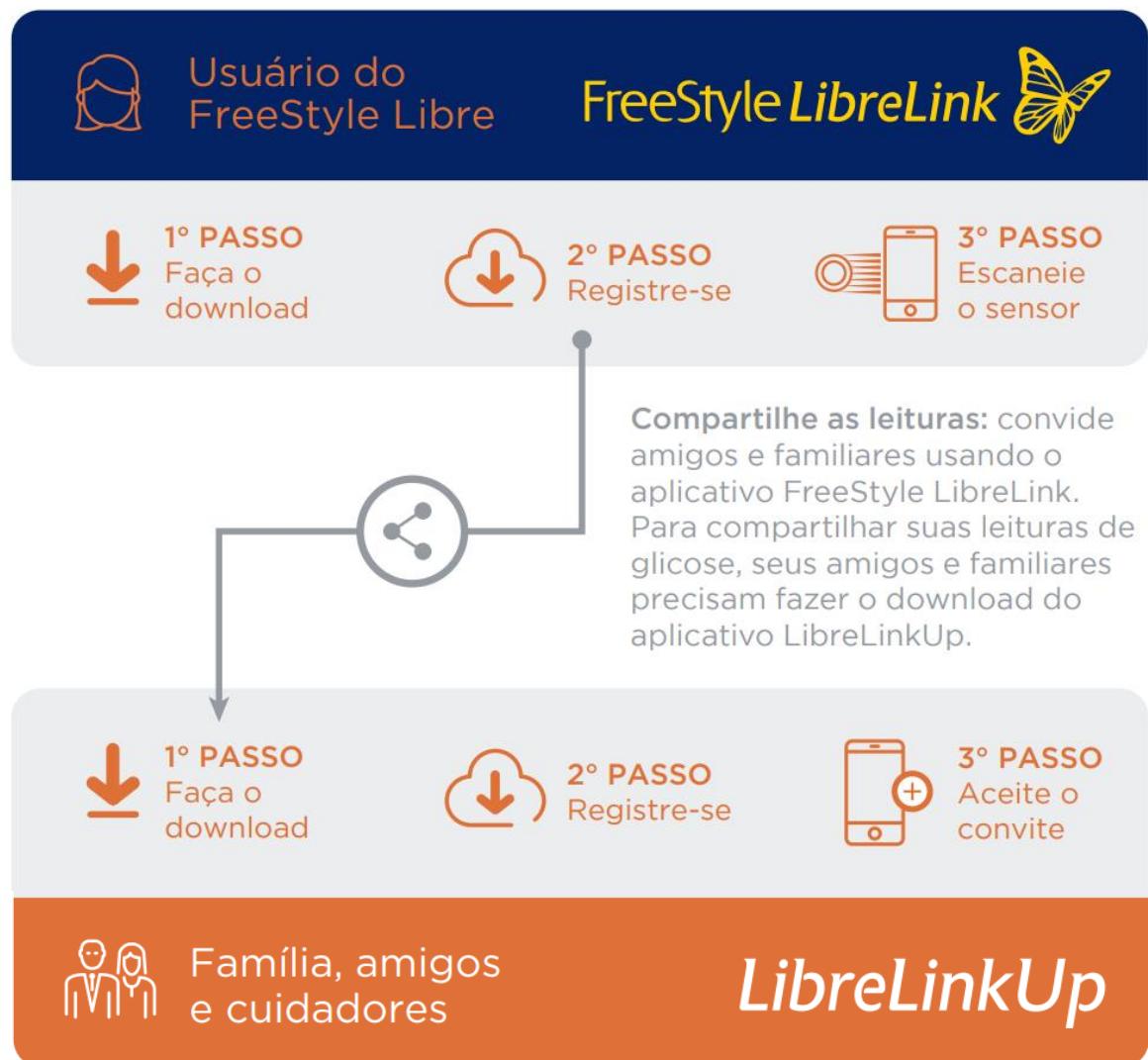

O aplicativo LibreLinkUp permite que outras pessoas mantenham contato e ajudem a te apoiar com suas leituras de glicose, dia e noite.

1. O aplicativo FreeStyle LibreLink é compatível apenas com determinados dispositivos móveis e sistemas operacionais. Consulte www.freestylelibre.com. O LibreLinkUp permite que os cuidadores façam conexões com até 20 usuários do FreeStyle LibreLink. Da mesma forma, os usuários do FreeStyle LibreLink podem compartilhar informações de glicose com até 20 conexões do LibreLinkUp.com.br para obter mais informações sobre compatibilidade de dispositivos antes de usar o aplicativo. O uso do FreeStyle LibreLink requer registro no LibreView. A transferência de dados de glicose entre os aplicativos FreeStyle LibreLink e LibreLinkUp depende da conexão com a internet.

Usando o aplicativo FreeStyle LibreLink, convide familiares, amigos e cuidadores que tenham baixado o aplicativo LibreLinkUp (máximo de 20 convites).

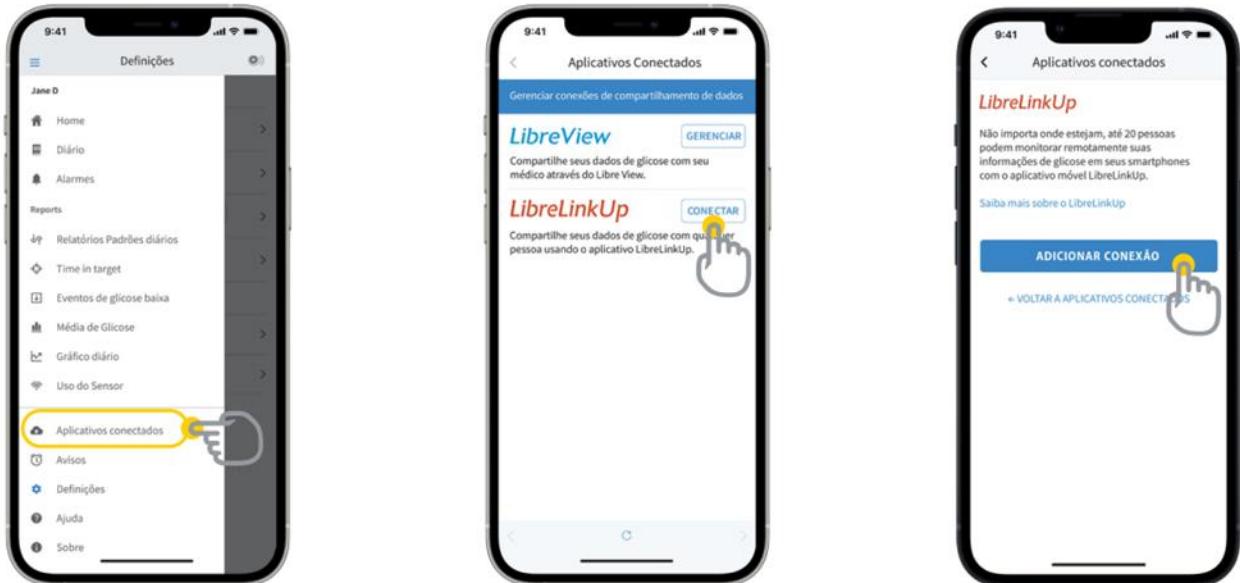

Para receber notificações das leituras de glicose, as notificações de push precisam estar autorizadas nas configurações do seu smartphone e no aplicativo aplicativo LibreLinkUp.


SIGA SEMPRE AS INSTRUÇÕES DE USO.

SAIBA MAIS


1. O aplicativo FreeStyle LibreLink é compatível apenas com determinados dispositivos móveis e sistemas operacionais. Consulte www.freestylelibre.com. O LibreLinkUp permite que os cuidadores façam conexões com até 20 usuários do FreeStyle LibreLink. Da mesma forma, os usuários do FreeStyle LibreLink podem compartilhar informações de glicose com até 20 conexões do LibreLinkUp.com.br para obter mais informações sobre compatibilidade de dispositivos antes de usar o aplicativo. O uso do FreeStyle LibreLink requer registro no LibreView. A transferência de dados de glicose entre os aplicativos FreeStyle LibreLink e LibreLinkUp depende da conexão com a internet.

GUIAS DE TECLAS NA TELA DOS APLICATIVOS

FreeStyle *LibreLink* 

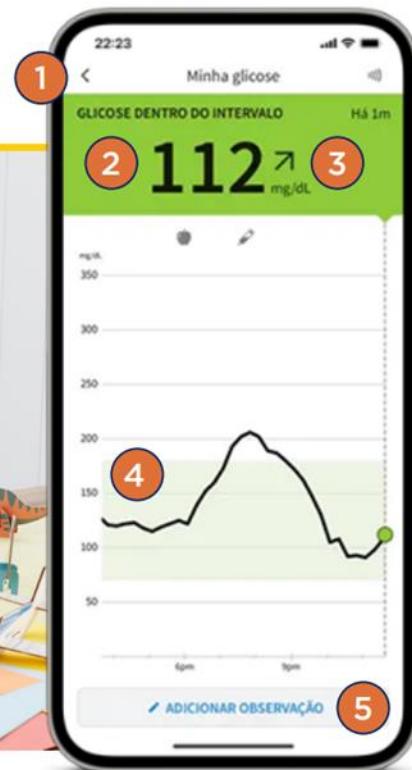

LibreLinkUp

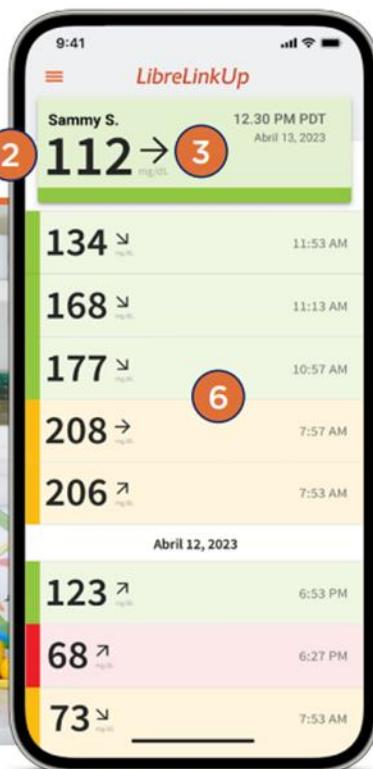

1 Seta [<] =

Voltar para a tela inicial.

2 Valor atual do nível de glicose

A faixa colorida indica se seu nível de glicose está alto ou baixo e dentro ou fora do intervalo-alvo.

3 Um indicador de tendência

Indica a direção e a velocidade em que a glicose está mudando.

4 Gráfico dos dados de glicose das últimas 8 horas

Veja como os alimentos, a atividade física e a insulina afetam a glicose, dia e noite.

5 Adicionando observações

Monitore alimentos, uso de insulina, exercícios e outros eventos.

6 Histórico

Mostra as últimas 100 leituras.

Para mais informações acesse nossos links diretos:



Telefone*
0800 703 0128

E-mail
diabetesbr@abbott.com



*Ligue 0800 703 0128 (ligação gratuita) de segunda a sexta das 08h às 17h, sábado das 08h às 14h (exceto feriados). Imagens meramente ilustrativas. Os dados apresentados são meramente representativos e não constituem dados de um paciente real. Para indicações de uso e contraindicações dos produtos citados, consulte www.FreeStyleLibre.com.br. O site LibreView só é compatível com determinados sistemas operacionais e navegadores. Consulte www.libreview.com para obter informações adicionais. O aplicativo LibreLinkUp só é compatível com determinados dispositivos móveis e sistemas operacionais. Verifique o site www.librelinkup.com para obter mais informações sobre a compatibilidade do dispositivo antes de usar o aplicativo. O uso do LibreLinkUp e FreeStyle LibreLink requer registro no LibreView. O aplicativo móvel LibreLinkUp não se destina a ser um monitor primário de glicose: os usuários domésticos devem consultar seu(s) dispositivo(s) primário(s) e consultar um profissional de saúde antes de fazer qualquer interpretação médica e ajustes de terapia a partir das informações fornecidas pelo aplicativo.