

Ayuda a mantener tu sensor en su lugar

Preparación de la zona de instalación de tu sensor

- 1** Selecciona una zona en la parte posterior del brazo.



- 2** Lava la zona con jabón común, agua y sécala con una toalla.



- 3** Limpia la zona con un paño con alcohol y deja secar.



Consejo profesional:

Realiza estos pasos después de la ducha para obtener mejores resultados

Consejos para mantener tu sensor seguro

Tu sensor está diseñado para soportar las exigencias de la vida cotidiana. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas cosas para maximizar el tiempo de uso:


Secar siempre con palmaditas después de ducharse o nadar¹ para evitar que el sensor se enganche en una toalla.




Elige ropa holgada y tómate tu tiempo para vestirte para que tu sensor no se enganche ni sufra tirones.



Resiste el impulso de jugar con tu sensor y mantenlo alejado de manos curiosas, tanto de pequeños como de mayores.

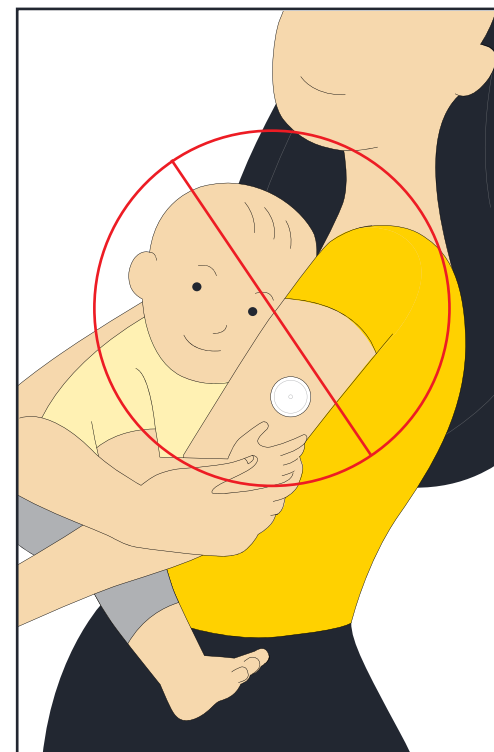

Ten cuidado con los obstáculos cotidianos, como portales, puertas de autos, cinturones de seguridad y bordes de muebles.

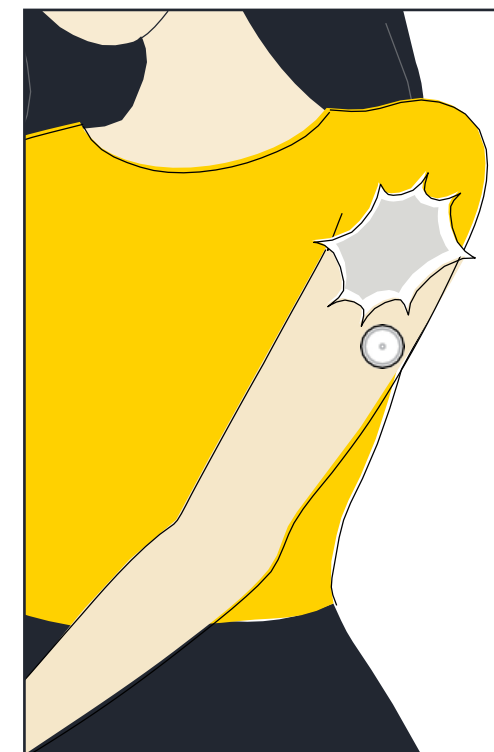



¿Atleta o deportista?

Considera la posibilidad de añadir un adhesivo adicional y elige un lugar en la parte posterior de la parte superior del brazo en el que sea menos probable que el sensor sufra golpes.

¿Quieres más adherencia?

Consulta con tu médico si las vendas o parches son adecuados para ti.

Vendas o parches impermeables

Puedes utilizar vendas o parches² de calidad médica para mayor seguridad, pero deben aplicarse en el momento de la colocación del sensor y retirarse únicamente cuando el sensor se haya desgastado por completo, ya que el sensor podría desprenderse al despegar. Asegúrate de dejar al descubierto la abertura/orificio del centro del sensor para que pueda respirar.

¿Necesitas ayuda con tu sensor?

Servicio de atención al usuario

Si tu sensor se cayó o si recibió un mensaje de error, ¡No dudes en contactar a nuestro equipo de atención al usuario!



800 802 226

Lunes a viernes de 8:00 a 18:00 hrs.
sábados y domingos de 10:00 a 15:00 hrs.



servicioclientesLATAM@abbott.com

1.El sensor FreeStyle Libre 2 Plus es resistente al agua, hasta un metro de profundidad. No sumergir durante más de 30 minutos.

2. Pueden aplicarse vendas/cinta de grado médico adicionales, pero no retire las vendas/cinta una vez aplicadas hasta que el sensor esté listo para ser retirado. Abbott Diabetes Care no se hace responsable de la integridad o exactitud de la información sobre los productos. La disponibilidad de los productos puede variar según el país y la región. Deben seguirse las instrucciones de uso del fabricante de cada producto.

La cubierta del sensor, FreeStyle, Libre y las marcas relacionadas son marcas de Abbott. Abbott Laboratories Chile, Ltda. ©2025 Abbott ADC-113459 v1.0