

ساعد المجس على البقاء في مكانه

إحصل على أقصى إستفادة من مدة إرتداء المجس في ثلاث خطوات سهلة:

1 الغسيل

استخدم صابوناً خالياً من الترتيب و خالياً من العطور لغسل موقع التطبيق وإزالة أي زيوت.

احلق اي شعر متواجد على ظهر ذراعك العلوي (الموقع المعتمد) لمساعدة اللاصق على التماسك.



2 التحضير

بعد الغسيل، استخدم مسحة كحولية لتعقيم الموقع.

لا تضع مستحضرات ترطيب الجسم أو الكريمات حتى يتم وضع المجس في مكانه.



3 التجفيف

دع الجلد يجف تمام مما يساعد على تماسك اللاصق.

قد يتطلب ذلك بعض الوقت، اعتماداً على درجة الحرارة والرطوبة في بيئتك.



نصيحة محترف: أكمل هذه الخطوات بعد الاستحمام للحصول على نتائج أفضل.



نصائح للحفاظ على المجس في مكانه




تم تصميم المجس لتحمل متطلبات الحياة اليومية. ومع ذلك يمكن تحقيق أقصى استفادة خلال فترة ارتداء المجس من خلال الأخذ في الاعتبار الأمور التالية:

انتبه إلى العوائق اليومية مثل الأبواب، وأبواب السيارات، وأحزمة الأمان، وحواف الأثاث.

تجنب لمس المجس وابتعد عن الأيدي الفضولية، سواء كانت صغيرة أو كبيرة في السن.

ارتداء الملابس فضفاضة^١ ووقتك في ارتداء الملابس حتى لا يتعثر المجس أو ينسحب.

جفف الجلد بعد الاستحمام أو السباحة^٢ دائمًا لتجنب أن يتعثر المجس في منشفة.

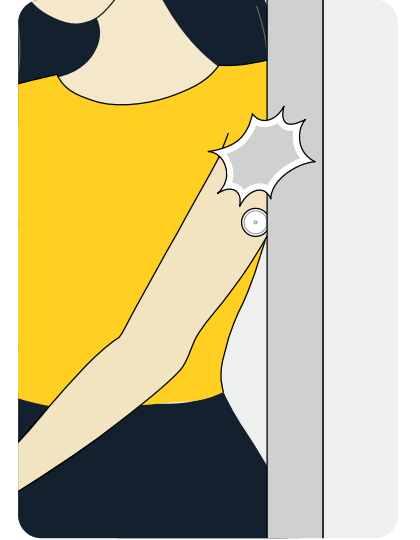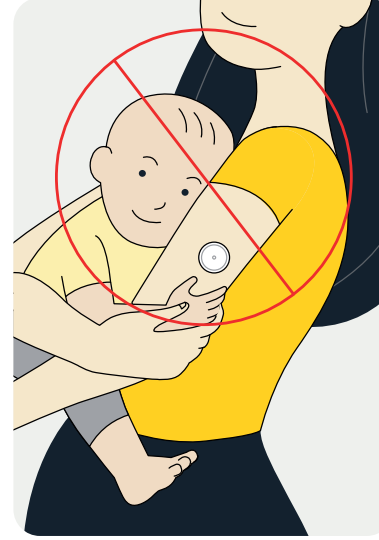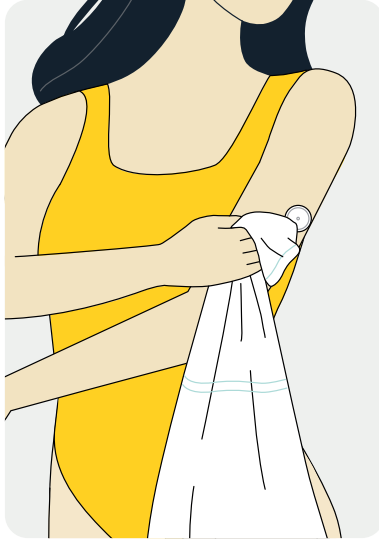

هل أنت رياضي أو تمارس الرياضة بشكل مكثف؟ فكر في إضافة واحدة من اللاصقات الإضافية على الصفحة التالية واختيار موقعًا على ظهر ذراعك العلوي الأقل احتمالًا لتساقط المجس.



١. المجس مقاوم للماء لما يصل إلى عمق ١ متر (٣ أقدام) من الماء. لا تغمره لمدة أطول من ٣٠ دقيقة. لا يجوز استخدامه فوق ١٠,٠٠٠ قدم.
٢. يستطيع القارئ التقاط البيانات من المجس عندما يكون على مسافة تتراوح من (١) سنتيمتر إلى (٤) سنتيمتر من المجس.

هل تريد لاصق إضافي؟

يمكن للمنتجات المذكورة أدناه زيادة قوة تماسك المجس^١.
تحقق من فريقك الطبي لمعرفة المنتج المناسب لك.

● سائل Torbot Skin Tac

turbot.com

مسحة جلدية لاصقة خالية من الحساسية
واللاتكس

● مسحة Skin-Prep Protective

smith-nephew.com

مسحة خالية من الكحول تساعد الشريط والأفلام
على التماسك بالجلد

● Tegaderm I.V.

3m.com

فيلم شفاف يوفر قوة لاصقة

● Mastisol Liquid Adhesive

eloquesthealthcare.com

الغراء السائل الشفاف غير المهيج الذي يؤمن
الضمادات

● Over-bandage

يمكنك استخدام الضمادات الطبية أو الشريط الطبي^٢ للحصول على أمان إضافي، ولكن يجب تطبيقها في وقت وضع المجس فقط وإزالتها عند اكتمال وقت الارتداء، حيث قد يتساقط المجس عند تقشيرها. تأكد من ترك الفتحة / الثقب في وسط المجس غير مغطاة حتى يتمكن من التنفس.

١. هذه القائمة ليست شاملة ولا تشكل تأييداً للشركة المصنعة أو لجودة المنتج. شركة أبوت للعناية بمرضى السكري ليست مسؤولة عن اكتمال أو دقة معلومات المنتج. قد يختلف توفر المنتجات حسب البلد والمنطقة. يجب اتباع تعليمات الاستخدام الخاصة بكل منتج كما وردت من الشركة المصنعة.

٢. يمكن استخدام ضمادات/ أشرطة طبية إضافية، ولكن لا تقم بإزالة الضمادات/ الأشرطة بعد وضعها حتى يصبح المجس جاهزاً للإزالة.
© 2025 أبوت. غلاف المجس، فري ستايل، وليبري، والعلامات التجارية ذات الصلة هي علامات لشركة أبوت. ADC-105817 v1.0