

## ساعد السنسر على البقاء في مكانه

إحصل على أقصى إستفادة من مدة إرتداء السنسر في ثلاث خطوات سهلة:

### 1 الغسيل

استخدم صابوناً خالياً من الترتيب و خالياً من العطور لغسل موقع التطبيق وإزالة أي زيوت.

احلق اي شعر متواجد على ظهر ذراعك العلوي (الموقع المعتمد) لمساعدة اللاصق على التماسك.



### 2 التحضير

بعد الغسيل، استخدم مسحة كحولية لتعقيم الموقع.

لا تضع مستحضرات ترطيب الجسم أو الكريمات حتى يتم وضع السنسر في مكانه.



### 3 التجفيف

دع الجلد يجف تمام مما يساعد على تماسك اللاصق.

قد يتطلب ذلك بعض الوقت، اعتماداً على درجة الحرارة والرطوبة في بيئتك.




نصيحة محترف: أكمل هذه الخطوات بعد الاستحمام للحصول على نتائج أفضل.



## نصائح للحفاظ على السنسر في مكانه

تم تصميم السنسر لتحمل متطلبات الحياة اليومية. ومع ذلك يمكن تحقيق أقصى استفادة خلال فترة ارتداء السنسر من خلال الأخذ في الاعتبار الأمور التالية:


جفف الجلد بعد الاستحمام أو السباحة دائمًا لتجنب أن يتعثّر السنسر في منشفة.

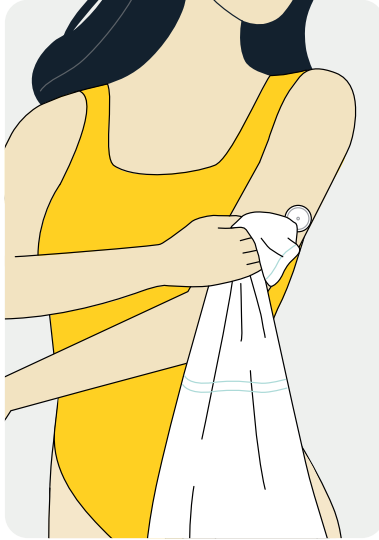


ارتداء الملابس فضفاضة وقتك في ارتداء الملابس حتى لا يتعثّر السنسر أو ينسحب.



تجنب لمس السنسر وابتعد عن الأيدي الفضولية، سواء كانت صغيرة أو كبيرة في السن.

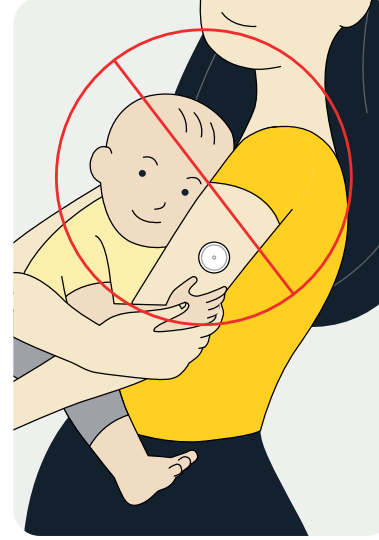

انتبه إلى العوائق اليومية مثل الأبواب، وأبواب السيارات، وأحزمة الأمان، وحواف الأثاث.

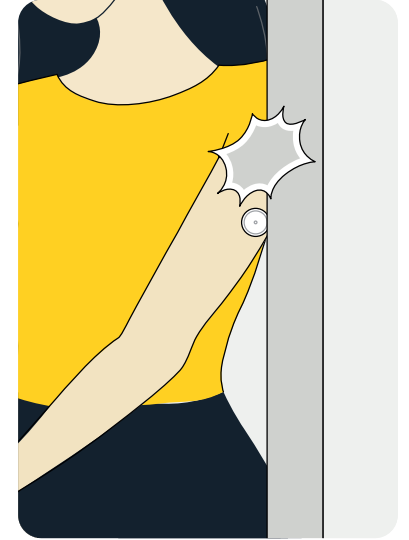

هل أنت رياضي أو تمارس الرياضة بشكل مكثف؟ فكر في إضافة واحدة من اللاصقات الإضافية على الصفحة التالية واختيار موقعًا على ظهر ذراعك العلوي الأقل احتمالًا لتساقط السنسر.



١. السنسر مقاوم للماء لما يصل إلى عمق ١ متر (٣ أقدام) من الماء. لا تغمره لمدة أطول من ٣٠ دقيقة. لا يجوز استخدامه فوق ١٠,٠٠٠ قدم.  
٢. يستطيع القارئ التقاط البيانات من السنسر عندما يكون على مسافة تتراوح من (١) سنتيمتر إلى (٤) سنتيمتر من السنسر.

## هل تريد لاصق إضافي؟

يمكن للمنتجات المذكورة أدناه زيادة قوة تماسك السنسر<sup>١</sup>.  
تحقق من فريقك الطبي لمعرفة المنتج المناسب لك.

### ● سائل Torbot Skin Tac

[turbot.com](http://turbot.com)

مسحة جلدية لاصقة خالية من الحساسية  
واللاتكس

### ● مسحة Skin-Prep Protective

[smith-nephew.com](http://smith-nephew.com)

مسحة خالية من الكحول تساعد الشريط والأفلام  
على التماسك بالجلد

### ● Tegaderm I.V.

[3m.com](http://3m.com)

فيلم شفاف يوفر قوة لاصقة

### ● Mastisol Liquid Adhesive

[eloquesthealthcare.com](http://eloquesthealthcare.com)

الغراء السائل الشفاف غير المهيج الذي يؤمن  
الضمادات

### ● Over-bandage

يمكنك استخدام الضمادات الطبية أو الشريط الطبي<sup>٢</sup> للحصول على أمان إضافي، ولكن يجب تطبيقها في وقت وضع السنسر فقط وإزالتها عند اكتمال وقت الارتداء، حيث قد يتساقط السنسر عند تقشيرها. تأكد من ترك الفتحة / الثقب في وسط السنسر غير مغطاة حتى يتمكن من التنفس.

١. هذه القائمة ليست شاملة ولا تشكل تأييداً للشركة المصنعة أو لجودة المنتج. شركة أبوت للعناية بمرضى السكري ليست مسؤولة عن اكتمال أو دقة معلومات المنتج. قد يختلف توفر المنتجات حسب البلد والمنطقة. يجب اتباع تعليمات الاستخدام الخاصة بكل منتج كما وردت من الشركة المصنعة.

٢. يمكن استخدام ضمادات / أشرطة طبية إضافية، ولكن لا تقم بإزالة الضمادات / الأشرطة بعد وضعها حتى يصبح السنسر جاهزاً للإزالة.  
© 2025 أبوت. غلاف السنسر، فري ستايل، وليبري، والعلامات التجارية ذات الصلة هي علامات لشركة أبوت. ADC-105652 v1.0